



NÁVOD K OBSLUZE: CHODÍTKO S PODPOROU

REF:0805452



Verze 12/2022

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Chodítka mohou používat lidé s omezenou pohyblivostí pro cestování v rámci domova i mimo něj.



SPECIFIKACE

- Hliníkový rám
- Antibrachiální podpora
- Držák na vycházkovou hůl
- Nouzové brzdy s aretací na rukojeti
- Nastavitelná výška rukojeti
- Sedadlo uživatele a taška na přenášení
- Skládací pro menší nároky na úložný prostor
- Pro vnitřní i venkovní použití
- 8" kola, PRŮMĚR koleček: 20 cm

ROZMĚRY

53cm	63cm	45cm	60cm	102-114cm	8Kg	136Kg

SYMBOLY

Viz PŘÍLOHA A

MONTÁŽ

Viz PŘÍLOHA b

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Často čistěte každou část chodítka. Na povrchy, které je třeba vyčistit, používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím produktu dobře osušte. Pokud musíte výrobek dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.

DŮLEŽITÉ!

Před použitím chodítka se ujistěte, že:

- Chodítko je v plném rozložení a je v této poloze zajištěno.
- Kolečka (pokud jsou k dispozici) jsou pevně upevněna.
- Ověřte funkčnost brzd.
- Před použitím sedačky musí být aktivována madla
- Rukojeti mají stejnou výšku a šrouby, které je připevňují k rámu, jsou utažené.
- Rám nemá žádné praskliny



VAROVÁNÍ

Pokud se vyskytne problém v některém z výše uvedených bodů, **NEPOUŽÍVEJTE** chodítko, dokud nebude problém vyřešen.

DALŠÍ INSTRUKCE

- Chcete-li chodítko složit nebo rozložit, použijte madla nebo tlačítko (pokud je k dispozici)
- Chodítko pravidelně čistěte.
- Nenechávejte chodítko mokré.
- Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

ZÁRUKA

Výrobek má záruku na dobrý provoz 2 roky od data nákupu.

Záruka se vztahuje na tovární vady a NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly, jako jsou brzdy, a cokoli, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud jsou poskytovány), přepravními společnostmi se také nevztahuje záruka.

Eldomed s.r.o. ,

web: www.eldomed.cz, Tel.: +420 602 770 375, 739 585 777

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
ÚDAJE O PRODEJCI			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ		ADRESA	
TELEFON		PODPIS A RAZÍTKO	

E.C. Declaration of Conformity

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.



MOBIAC S.A

KΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



PŘÍLOHA A. SYMBOLY

Symbyly na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením

PŘÍLOHA B. MONTÁŽ

Produkt po rozbalení.



Umístěte podpěry do správného slotu tak, aby pojistný kolík směřoval k vám.



Stiskněte pojistný kolík při nastavování výšky. Bezpečnostní kolík musí zapadnout do správného otvoru.



Opakujte postup také pro druhé
rameno podpěry



Rozložte rolátor zatažením za
podpěry sedadla.



Umístěte tašku tak, že ji umístíte na
podpěry sedadla a svážete na
příslušných ramenech držáku.

