

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Chodítko WALKY 0805492

Chodítko RUBY 0805499



CE

-

Revize: 09/2024



Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu. Verze: F, 2022-12

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

Chodítka jsou určena pro podporu a zlepšení omezené schopnosti chůze. Zbývající schopnost chůze uživatele musí být dostatečná pro opuštění domova, pro běžné denní aktivity a pro účast na společenském životě, aniž by ohrožoval sebe nebo ostatní.

Dále jsou chodítka určena k přepravě nákladu ve speciálně navrženém vaku.

Maximální zatížení produktu uvedené v PŘÍLOZE A.

Toto omezení hmotnosti zahrnuje hmotnost uživatele i obsah tašky.

- Tento návod MUSÍ být předán uživateli produktu.
- PŘEČTĚTE SI tuto uživatelskou příručku a USCHOVEJTE ji pro budoucí použití.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.
- Zvláštní opatrnosti je vždy zapotřebí tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit sevření končetin a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat výrobek za odnímatelné části.

DŮLEŽITÉ!

Konstrukce tohoto produktu je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Uživatelé však mohou být ohroženi používáním nevhodného produktu. Pro vaši vlastní bezpečnost je třeba dodržovat následující pravidla. Nespecifické nebo nesprávné seřizovací práce mohou zvýšit riziko nehod.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli pro ostatní snadněji dosažitelní.
- Používejte svůj výrobek na rovném povrchu a také do kopce a z kopce.
- Nepoužívejte na silnicích nebo dálnicích.
- Nechoďte nahoru ani dolů po schodech.
- Nepoužívejte na eskalátorech.
- Nepoužívejte neautorizované díly, příslušenství nebo adaptéry jiné než schválené společností MOBIAK.
- Nestůjte na výrobku. • Náklad smí být přepravován pouze v tašce. Buďte opatrní při velkém zatížení.

PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Na rámu nejsou žádné praskliny ani praskliny)
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
- Zkontrolujte, zda je rám zcela otevřený. Výrobek je v plném vysunutí a je v této poloze zajištěn.
- Zkontrolujte, zda brzda správně funguje.
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby a knoflíky pevně utaženy a v dobrém stavu.
- Vždy kontrolujte stav opotřebení mechanických částí, abyste zajistili absolutně bezpečné používání výrobku pro osoby a předměty.
- Zkontrolujte opotřebení předních a zadních kol.
- Zkontrolujte pneumatiky, tlak v pneumatikách (v případě potřeby id) a zámky kol (brzdy). Brzdy nebudou správně fungovat, pokud je tlak příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a koly příliš dlouhá.
- Ujistěte se, že na kolech nejsou vlasy, vlákna a jiné nečistoty.
- Nedoporučujeme, aby byl produkt vydáván komukoli bez předchozího úplného posouzení jeho specifických potřeb.

Pokud nejste zkušení, požádejte prosím o pomoc obsluhu!

CHŮZE S CHODÍTKEM:



1. Umístěte výrobek blízko k vám.
2. Udělejte krok směrem k, zatímco používáte rukojeti jako podporu.

SEZENÍ NA CHODÍTKU:



1. Postavte se před chodítko, zařadte parkovací brzdu do brzděné polohy.
2. Položte ruce na opěradla židle, mírně se předkloňte a posadte se dolů opatrně.

VSTÁVÁNÍ ZE ŽIDLE S CHODÍTKEM:

5. Zařadte parkovací brzdu do brzděné polohy.
6. Umístěte chodítko před sebe, jako podpěru použijte područky židle a opatrně se zvedněte do stoje.
7. Jakmile se ustálíte ve stoje, přeneste ruce do držadel chodítka
8. Uvolněte parkovací brzdu a vykročte směrem k.

DALŠÍ POKYNY:

1. Vyhněte se schodům nebo překážkám, jinak požádejte o pomoc obsluhu:
2. Výrobek má na kolech brzdy, které by měly být zajištěny, když se nepohybuje.
3. Během pohybu se NEDOTÝKEJTE pohyblivých částí - NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čistěte každou část chodítka. Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo na povrchy, které potřebují čištění.

Před použitím chodítko dobře osušte. Pokud musíte produkt dezinfikovat, použijte běžný, mírný dezinfekční prostředek.

V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- MOBIAS S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- MOBIAS S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
- Pro měření na Produktech je odchylka $\pm 3 \%$.

POZOR!!!

Pokud se vyskytne problém v některém z výše uvedených případů, NEPOUŽÍVEJTE chodítko, dokud nebude problém vyřešen.

DALŠÍ INSTRUKCE

- Chcete-li chodítko složit nebo rozložit, použijte rukojeti nebo tlačítko (pokud je k dispozici)
- Chodítko pravidelně čistěte.
- Nenechávejte chodítko mokré.
- Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš produkt je třeba vyměnit nebo vám již nefunguje, Je třeba zvážit ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem (to je také význam zobrazené recyklační značky).
- 2) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním zařízení, musí být nahlášen výrobci.

ZÁRUKA

Výrobek má záruku 2 roky. Záruka se vztahuje na výrobní vady & NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržení návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly jako jsou brzdy a cokoli, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození popř závady způsobené: živelnými pohromami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, napájením problému (pokud jsou poskytovány), na přepravní společnosti se také nevztahuje záruka.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

Specifikace:

	Chodítko Walky 0805492	Chodítko Ruby 0805499
RÁM	Hliníkový, skládací	Hliníkový, skládací
BARVA	Bílá	Červená
RUKOJETI	Výškově nastavitelné – 6 pozic	Výškově nastavitelné – 6 pozic
BRZDY	Bezpečnostní, uzamykací	Bezpečnostní, uzamykací
KOLA	8" pevná	8" pevná
SEDÁK	ano	ano
DRŽÁK NA BERLI/HŮL	ano	ano
ODKLÁDACÍ TAŠKA	ano	ano
ODPRUŽENÍ	ne	ano
MAX.NOSNOST	136 kg	136 kg
MAX.ZATÍŽENÍ TAŠKY	5 kg	5 kg

Pro vnitřní i venkovní použití

							
0805492	45.5cm	59cm	63cm	55cm	80-93cm	8,5kg*	136kg
0805499	45.5cm	64cm	67cm	60cm	80-93cm	9kg	136kg

*Hmotnost je udaná včetně tašky, hmotnost chodítka bez tašky je 8 kg.

Návod

Produkt, který máte v rukou, se může lišit od produktu na následujících fotografiích. Postup montáže je podobný.

0805492

Obsah balení:



Rozložte chodítko, jak je naznačeno šipkami.



Pro odemknutí zatáhněte za knoflík a spusťte dolů po části zadního kola. Poté knoflík znovu zajistěte.



Nastavení výšky rukojeti – stiskněte západku
Můžete použít výhradně úložný vak i jako batoh.



Ve vhodné poloze Zavěste úložný vak a umístěte držák hole.



Můžete upevnit hůl nebo deštník na speciální základnu a zajistíte přes pásek na suchý zip.



Chodítko** zavřete zatažením směrem nahoru. Poté zatáhněte za přední část kola, k dokončení skládání.



0805499

Obsah balení:



1. Vložte přední kolo do předního otvoru rámu, poté vložte šroub a utáhněte matici
2. Spojte zadní rám s předním rámem a srovnajte otvory. Poté vložte pojistný kolík.
3. Vyrovnajte otvory tlumiče s rámem a vložte pojistný kolík.
4. Upevněte brzdové lanko pomocí přezky.

Rozložte chodítko, jak je naznačeno šipkami.



Posuňte rukojeti nahoru a dolů do požadované výšky stisknutím nastavovacího tlačítka.



Pro složení chodítka zatáhněte směrem nahoru za sedátko s páskem na polštáři a skládání se provede automaticky.



Obecné společné pokyny

Rozložení chodítka

1. Držte výrobek a ujistěte se, že všechna čtyři kola jsou stabilně na zemi.
2. Zatlačte ocelovou tyč směrem dolů, aby se produkt rozložil.
3. Když jsou boční výztuhy v přímé linii, výrobek je zcela rozložen.
4. Spusťte sedadlo do správné polohy.

Skládání chodítka

1. Vyklopte sedadlo.
2. Zvedněte z ocelové tyče nebo bočních vzpěr směrem nahoru, abyste výrobek složili.

Montáž koše nebo tašky



Připevněte košík nebo tašku na upevňovací háčky, nebo jej umístěte pod sedadlo, podle modelu, který máte.

Nastavení výšky rukojeti

1. Vložte rukojeti do speciálních zářezů. Namontujte trubku rukojeti s hlavní trubkou rámu.
2. Zajistěte rukojeti do požadované výšky utažením podložky nebo rukojeti nebo stisknutím

Použití ručních brzd

1. Zatáhněte provozní brzdy zatažením obou brzdových rukojetí A nahoru.
2. Chcete-li zabrzdit parkovací brzdu, stiskněte brzdové rukojeti A úplně dolů. Uslyšíte zvuk, který indikuje, že brzda je ve správné poloze.
3. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, zatáhněte za rukojeti brzdy nahoru.
4. V případě slabého brzdného účinku je nutné provést seřízení brzdy

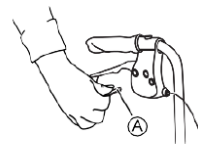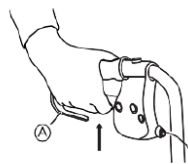

MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Symbole na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením