

0805510

PAG. 03



0805511

PAG. 03



0805512

PAG. 03



0805513

PAG. 03



MOBIAK S.A

Καθiana Ακρωτηρίου, Χανια- Κρήτη,
Kathiana Akrotiriou, Chania-Crete

T: +302821063222

web: www.mobiakcare.com



2 YEARS
GUARANTEE

Produkty řady Raised Toilet Seat (RTS) jsou navrženy tak, aby zvýšily výšku záchodové mísy, aby usnadnily procedury sezení a vstávání a podpořily nezávislost a pohodlí.

Verze opatřené víkem zajišťují lepší hygienické podmínky při splachování toalety. Víko lze v zavřené poloze použít jako sedátko.


INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Zvýšené záchodové sedátko je určeno pro starší lidi, vozíčkáře, osoby se sníženou pohyblivostí beder, kolen nebo kyčlí a pro všechny, kteří by mohli mít potíže se sedáním a vstáváním ze záchodové mísy. Při používání je vyžadována schopnost samostatně sedět.

RTS se nedoporučuje používat při poruchách vnímání nebo problémech s rovnováhou při sezení.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je RTS ve stabilní poloze na WC a je na něm správně upevněno speciálním dodaným upevňovacím příslušenstvím.
- Uzamykací systém příliš neutahujte.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v této uživatelské příručce.
- RTS a jeho součásti žádným způsobem neupravujte.
- Nepoužívejte RTS, pokud je poškozen nebo jakkoli pozměněn

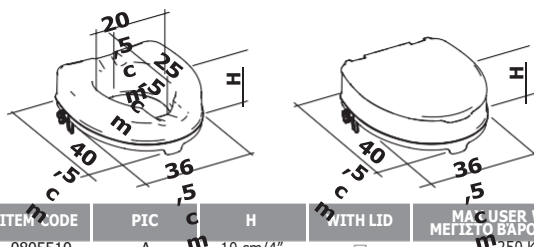


ITEM CODE	PIC	H	WITH LID	MAX USER WEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗ:
0805510	A	10 cm/4"	☐	250 Kg
0805511	A	15 cm/6"	☐	250 Kg
0805512	B	10 cm/4"	☒	250 Kg
0805513	B	15 cm/6"	☒	250 Kg

1




FOR
0805510
0805511

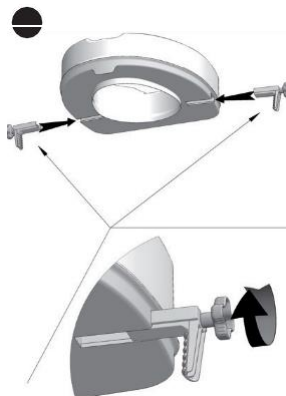

3



4

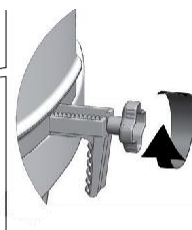

5



Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením



MOBIAK S.A

Καθiana Ακρωτηρίου, Χανια- Κρήτη,

Kathiana Akrotiriou, Chania-Crete

T: +302821063222

web: www.mobiakcare.com



2 YEARS
GUARANTEE