



MOBIAKCARE®
M E D I C A L E Q U I P M E N T



NÁVOD K OBSLUZE: **HEAVY DUTY VOZÍK**

REF :0808527

CE

Unor [2023]

URČENÉ POUŽITÍ:

- Tyto invalidní vozíky jsou určeny pro tělesně nebo mentálně postižené osoby s omezenou schopností pohybu.
- Umožňuje přepravu osob s pohybovými problémy nebo omezenou pohyblivostí a může být využíván k pohybu samotným pacientem (pokud má zadní kola 20-24") nebo s pomocí doprovodu.
- Když má invalidní vozík zadní kolo o průměru 50 až 60 cm a ruční ráfek na kolečku, může se uživatel pohybovat samostatně
- **SPECIFIKACE**
Viz PŘÍLOHA A
- **ROZMĚRY**
Viz PŘÍLOHA B
- **MONTÁŽ**
Viz PŘÍLOHA A
- **SYMBOLY**
Viz PŘÍLOHA B

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, raději tento výrobek ani jinou dostupnou součást nepoužívejte.
- Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.
- Zvláštní opatrnosti je vždy zapotřebí tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit sevření končetin a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat invalidní vozík za odnímatelné části.
- Nastupování a vystupování z invalidního vozíku lze provádět nezávisle za předpokladu, že máte dostatečnou pohyblivost a sílu horní části těla.

DŮLEŽITÉ!

- Konstrukce tohoto invalidního vozíku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Uživatelé však mohou být ohroženi nevhodným používáním svých invalidních vozíků. Pro vaši vlastní bezpečnost je třeba dodržovat následující pravidla. Nespecifické nebo nesprávné seřizovací práce mohou zvýšit riziko nehod.
- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli pro ostatní snadněji viditelní.
- Buďte opatrní během první jízdy na tomto vozíku.
- Seznamte se se svým invalidním vozíkem.
- Používejte svůj invalidní vozík na rovném povrchu a také do kopce a z kopce.
- Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, pokud je potřebujete zvednout z podlahy.
- Pokud se potřebujete přesunout na sedadlo, nepokoušejte se dosáhnout na předměty.
- Nepoužívejte na silnicích nebo dálnicích.
- Nepokoušejte se lézt nebo sestupovat s vodou, ledem nebo olejovou membránou.
- Nepoužívejte neautorizované díly, příslušenství nebo adaptéry jiné než schválené společností MOBIAK.
- Nestůjte na vozíku.

PŘED POUŽITÍM:

1. Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Na rámu nejsou žádné praskliny)
2. Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
3. Zkontrolujte, zda je sedadlo zcela otevřené. Pokud ne, zatlačte sedadlo dolů z bočního rámu.
4. Zkontrolujte, zda brzda funguje správně.
5. Vždy zkontrolujte stav opotřebení mechanických částí, abyste zajistili naprosto bezpečné používání výrobku pro osoby a předměty.
6. Pokud jsou k dispozici osy s rychlým uvolněním, zkontrolujte, zda byly správně zajištěny.
7. Zkontrolujte pneumatiky, tlak v pneumatikách (v případě potřeby id) a zámky kol (brzdy). Brzdy nebudou správně fungovat, pokud je tlak příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a koly příliš dlouhá.

VAROVÁNÍ!

Následující metody musí být použity pouze od zkušených pacientů. Pokud nemáte zkušenosti, požádejte o pomoc obsluhu.

NÁSTUP DO VOZÍKU:

1. Umístěte invalidní vozík co nejblíže k vám.
2. Zajistěte zámky kol.
3. Opřete se pažemi o rám a pomalu sestupujte dolů směrem k sedadlu.

VÝSTUP Z VOZÍKU:

1. Umístěte invalidní vozík co nejblíže k sedadlu, na které přesouváte.
2. Zajistěte zámky kol.
3. Spolehněte se na obě rukojeti stejně. Podpírání pouze jedné ruky (a bez dozoru) může způsobit zranění.
4. Přeneste váhu těla do sedadla, které budete přenášet.

DALŠÍ POKYNY:

1. Vždy používejte výtahy a rampy. Pokud tyto nejsou k dispozici, můžete cíle dosáhnout pomocí dvou doprovodů. Musí zvedat invalidní vozík za stabilní části rámu. Invalidní vozík by se nikdy neměl zvedat, když cestující sedí. Mělo by se pouze tlačit.
2. Vyhněte se schodům nebo překážkám, jinak požádejte o pomoc svého průvodce.
3. Tento invalidní vozík musí být používán výhradně k přepravě osoby na sedadle.
4. Uživatelé by neměli sedět na invalidním vozíku, když používají jakýkoli dopravní prostředek.
5. Invalidní vozíky mají na zadních kolech brzdu, která by měla být zajištěna, když se vozík nepohybuje.
6. **NETLAČTE** na stupačky při sezení nebo vstávání, **NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ**. Opěrky nohou používá uživatel, když sedí.
7. Během pohybu se **NEDOTÝKEJTE** pohyblivých částí - **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!!**

ÚDRŽBA:

Pravidelná kontrola níže uvedených postupů pomůže udržet životnost a účinnost vašeho invalidního vozíku.

TÝDNĚ

1. Zkontrolujte tlak v kolech podle pokynů na kolech.
2. Zkontrolujte, zda je středový šroub příčného ramene dotažen a v dobrém stavu.
3. Očistěte látku mýdlovou vodou nebo dostatečným množstvím přípravků.

Unor [2023]

4. Kovové části židle čistěte suchým hadříkem nebo speciálními přípravky na chromované povrchy nebo lakované povrchy.
5. Zkontrolujte šrouby kola a v případě potřeby je seřídte.
6. Zkontrolujte poškození předních a zadních kol.

ČTVRTLETNÍ

1. Zkontrolujte a v případě potřeby seřídte: vidlice kol, tažná kola, vrtule.
2. Namažte nebo naolejujte všechny součásti, které jsou vystaveny tření nebo hrozícímu opotřebení.
3. Utáhněte šrouby a matice.
4. Obecná revize stavu křesla a opravy podle potřeby.

KAŽDOROČNĚ

1. Doporučujeme jednou ročně provést úplnou kontrolu kvalifikovaným dodavatelem.
2. Pro bezpečnost pacienta doporučujeme, aby byl vozík každé 2 roky zkontrolován výrobcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ:

Kromě údržby a kontroly je třeba rám i čalounění důkladně vyčistit.

- Pro zachování vzhledu je nutné látku pravidelně čistit.
- Nečistoty lze odstranit houbou a jemným čisticím prostředkem s teplou vodou, ve směru textury.
- Před vysušením opláchněte čistou vodou.
- NENECHÁVEJTE invalidní vozík mokrý.
- Nevkládejte látku do bubnové sušičky. Pokud je nečistota hluboká, měl by být povrch očištěn měkkým kartáčem.
- Rám by měl být pravidelně čištěn jemným čisticím prostředkem.
- Invalidní vozíky s koženými sedadly je nutné čistit suchým hadříkem.
- Očistěte kola teplou vodou a jemným mýdlem. Věnujte pozornost sušení kol. je nebezpečné používat invalidní vozík s mokřými koly.
- Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.
- Chraňte předmět před poškrábáním, pořezáním a proražením.



POZOR (!):

- V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- MOBIAS S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- MOBIAS S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
- Existuje $\pm 3\%$ Odchylka rozměrů produktů.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

ZÁRUKA:

Na váš invalidní vozík je poskytována záruka 2 roky.

Záruka se vztahuje na tovární vady a NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly, jako jsou brzdy, řemeny, popruhy, pneumatiky kol a vše, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud jsou poskytovány), přepravními společnostmi se také nevztahuje záruka. Přepravní náklady na záruční zboží hradí zákazník nebo prodejce.

Eldomed s.r.o.

web: www.eldomed.cz, Tel.: +420 602 770 375, 739 585 777

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT :			
ÚDAJE O PRODEJCI			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
ADRESA			
TELEFON			
		PODPIS A RAZÍTKO	

Příloha A SPECIFIKACE

MBK CODE		
0808527	VOZÍK HEAVY DUTY	

RÁM	OCELOVÝ, SKLÁDACÍ
BARVA	ČERVENÁ-ČERNÁ
SEDADLO	LÁTKA S PODŠÍVKOU
PODRUČKY	ODKLOPNÉ A ODNÍMATELNÉ
PODNOŽKY	ODNÍMATELNÉ A NASTAVITELNÉ
ZADNÍ KOLA	24" PEVNÉ
PŘEDNÍ KOLA	8"x2" (200x50mm) PEVNÉ
KOLEČKO PROTI PŘEVRÁCENÍ	NE
BRZDY	NE
MAX NOSNOST	182 Kg
EXTRA	DVOJITÝ KŘÍŽ
DRŽÁK BERLÍ	kód: 0811369


PŘÍLOHA B ROZMĚRY

												
0808527	56 cm	56 cm	45 cm	44 cm	74 cm	110 cm	91 cm	50 cm	24" 8"	182 Kg	20,5 kg	Tolerance hmotnosti vozíku: +/- 2 kg

invalidní vozík, který máte v rukou, se může lišit od toho na následujících fotografiích. Postup montáže je podobný.

- 1. Otevření:** Uchopte rukojeti a vytáhněte je směrem ven, poté zatlačte na tyče na straně sedadla směrem dolů, dokud se invalidní vozík zcela neotevře.



Složení: Postupujte v opačném pořadí.

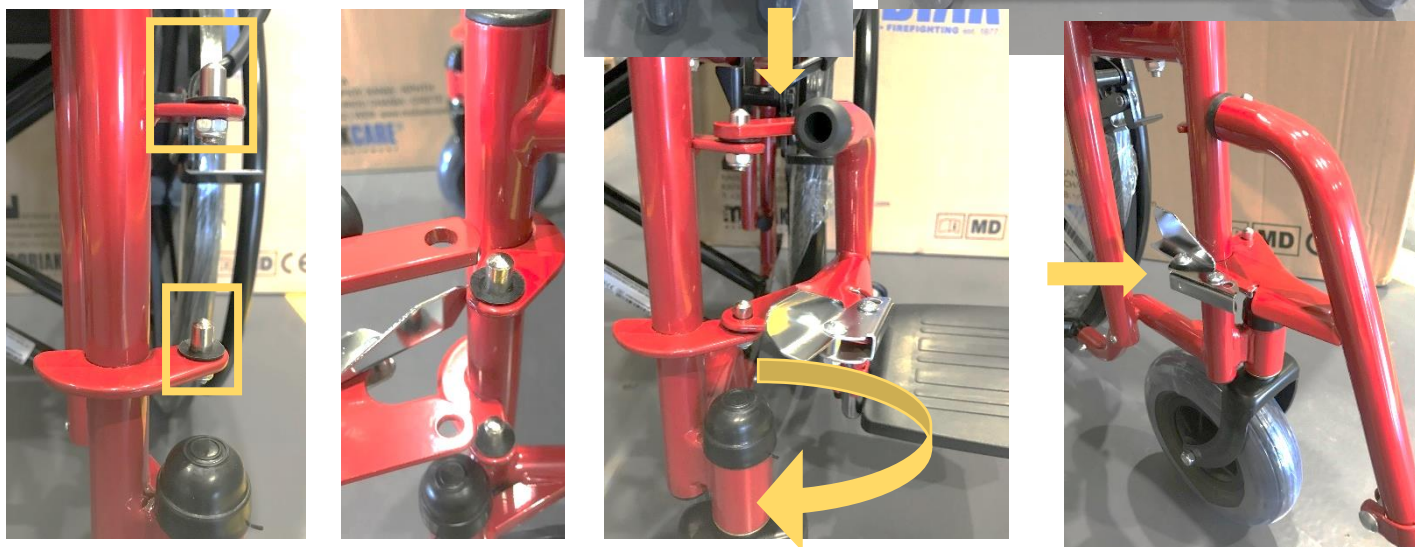

Namontujte opěrku nohou instalací desek závěsu, které jsou na dílu, na čepy závěsu na rámu invalidního vozíku. Zatlačte opěrku nohou směrem dovnitř invalidního vozíku, dokud nezapadne na místo. Stejný postup opakujte u druhé opěrky nohou.
Odstraňte opěrku nohou zatlačením uvolňovací páčky, otočte ji směrem ven, zvedněte opěrku nohou z čepů závěsu.

Pomocí nástroje, který je součástí balení produktu, upravte délku opěrky nohou. Povolte šroub a utáhněte jej na požadovanou délku, abyste jej zajistili.

Použijte přiložený pás na opěrku nohou, abyste se ujistili, že nohy pacienta jsou ve správné poloze.

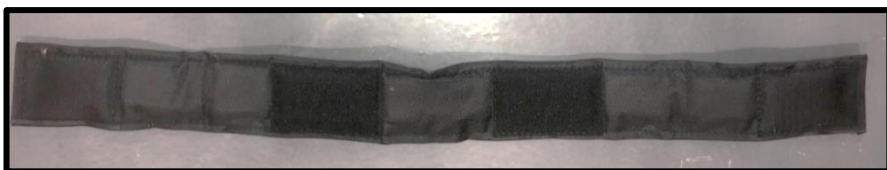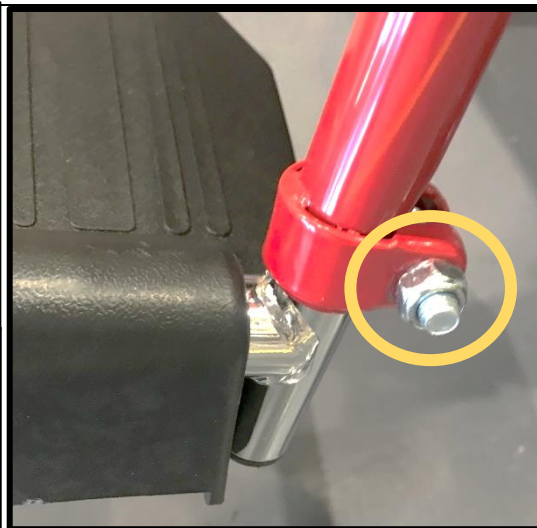

Váš produkt je připraven k použití.



Brzdy se používají k znehybnění invalidního vozíku, když stojí, aby se zabránilo jeho rozjetí. Chcete-li zabrzdít, zatlačte brzdovou páku dlaní dopředu. (1) Chcete-li brzdu uvolnit, zatáhněte za brzdovou páku dozadu pomocí nízkých prstů (2)


Nikdy nezatahujte parkovací brzdu, když se pohybujete.

Nezařazujte parkovací brzdy, abyste




invalidní vozík zpomalili.

Neopírejte se o parkovací brzdy pro podporu nebo přesun.

Při používání brzdy držte prsty v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, vždy mějte ruku na brzdové páce.

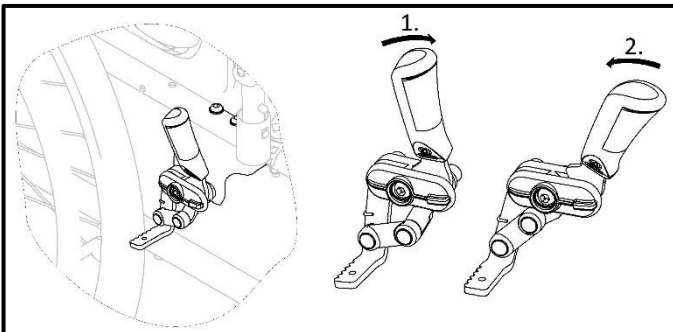

Chcete-li zvednout sklopnou loketní opěrku, stiskněte bezpečnostní páku a vytáhněte ji nahoru.

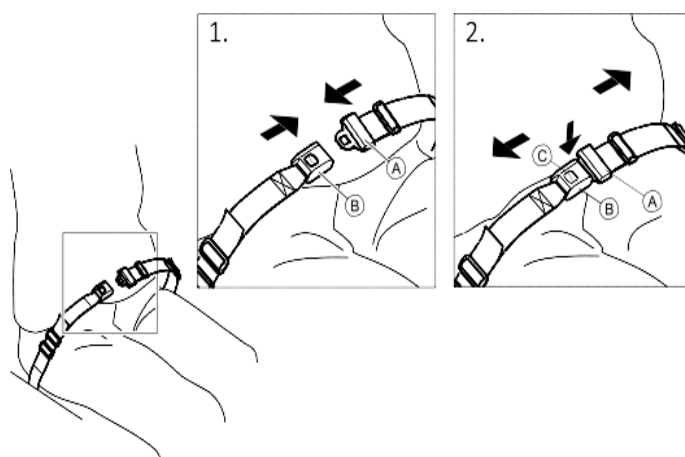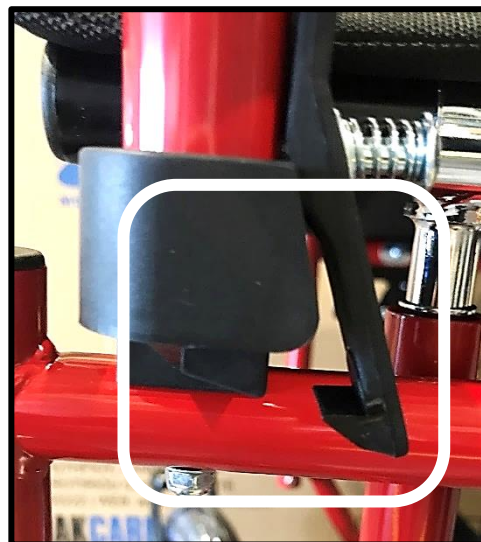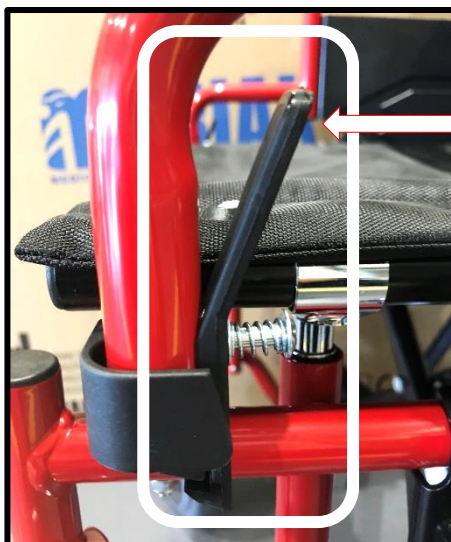

Vozík lze vybavit bezpečnostním pásem. (Volitelné ref.: 0806482 ř 0806478 6 ř 0808364 ř 0809750 ř 0804478).

Zabraňuje uživateli sklouznout z vozíku dolů nebo z vozíku vypadnout.

Volný pás může uživateli umožnit sklouznout a vytvořit riziko úškrcení.

Ujistěte se, že sedíte zcela zády v sedadle a že pánev je co nejvíce vzpřímená a symetrická.

Pro uzavření zatlačte západku A do spony B.

Pro otevření stiskněte tlačítko C a vytáhněte západku A ze spony B.

PŘÍLOHA D – SYMBOLY

Symbody na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením