



NÁVOD K POUŽITÍ: MECHANICKÝ HLINÍKOVÝ VOZÍK, 24" ZADNÍ KOLA

REF :0810804;0810805;0810806



ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Tyto invalidní vozíky jsou určeny pro tělesně nebo mentálně postižené osoby s omezenou schopností pohybu.

Umožňuje přepravu osob s pohybovými problémy nebo omezenou pohyblivostí a může být využíván k pohybu samotným pacientem (pokud má zadní kola 20-24") nebo s pomocí doprovodu.

Když má invalidní vozík zadní kolo o průměru 50 až 60 cm a ruční ráfek na kole, může se uživatel pohybovat samostatně

Když má invalidní vozík zadní kolo o průměru 13 až 40 cm a nemá na kole ruční ráfek, pak uživatel potřebuje obsluhu, která vozík posune přes madla umístěná na zadní straně vozíku.

SPECIFIKACE

VIZ PŘÍLOHA A

ROZMĚRY

VIZ PŘÍLOHA B

MONTÁŽ

VIZ PŘÍLOHA C

SYMBOLY

VIZ PŘÍLOHA D

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, raději tento výrobek ani jinou dostupnou součást nepoužívejte. Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.
- Zvláštní opatření je vždy zapotřebí tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit sevření končetin a zranění.
 - Nepokoušejte se zvedat invalidní vozík za odnímatelné části.
- Nastupování a vystupování z invalidního vozíku lze provádět nezávisle za předpokladu, že máte dostatečnou pohyblivost a sílu horní části těla.

DŮLEŽITÉ!

Konstrukce tohoto invalidního vozíku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Uživatelé však mohou být ohroženi nevhodným používáním svých invalidních vozíků. Pro vaši vlastní bezpečnost je třeba dodržovat následující pravidla. Nespecifické nebo nesprávné seřizovací práce mohou zvýšit riziko nehod.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli pro ostatní snadněji viditelní
- Buďte opatrní během první jízdy na tomto vozíku.
- Seznamte se se svým invalidním vozíkem.
- Invalidní vozík můžete používat jak na rovném povrchu, tak také do kopce a z kopce.
- Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, pokud je potřebujete zvednout z podlahy
- Nepoužívejte na silnicích nebo dálnicích.
- Nepokoušejte se lézt nebo nastupovat na vozík s vodou, ledem nebo olejovou membránou.
- Nepoužívejte neautorizované díly, příslušenství nebo adaptéry jiné než schválené společností MOBIK.
- Nestůjte na vozíku.

PŘED POUŽITÍM:

1. Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Na rámu nejsou žádné praskliny)
2. Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
3. Zkontrolujte, zda je sedadlo zcela otevřené. Pokud ne, zatlačte sedadlo dolů na bočním rámu.
4. Zkontrolujte, zda brzda funguje správně.
5. Vždy zkontrolujte stav opotřebení mechanických částí, abyste zajistili naprosto bezpečné používání výrobku pro osoby a předměty.
6. Pokud jsou k dispozici osy s rychlým uvolněním, zkontrolujte, zda byly správně zajištěny.
7. Zkontrolujte pneumatiky, tlak v pneumatikách (v případě potřeby id) a zámky kol (brzdy). Brzdy nebudou správně fungovat, pokud je tlak příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a koly příliš dlouhá.

VAROVÁNÍ!

Následující metody musí být použity pouze od zkušených pacientů. Pokud nemáte zkušenosti, požádejte o pomoc obsluhu.

VSTUP DO VOZÍKU:

1. Umístěte invalidní vozík co nejbližší k vám.
2. Zajistěte zámky kol.
3. Opřete se pažemi o rám a pomalu sestupujte dolů směrem k sedadlu.

VÝSTUP Z VOZÍKU:

1. Umístěte invalidní vozík co nejbližší k sedadlu, na které přesouváte.
2. Zajistěte zámky kol.
3. Spolehněte se na obě rukojeti stejně. Podpírání pouze jedné ruky (a bez dozoru) může způsobit zranění.
4. Přeneste váhu těla do sedadla, které budete přenášet.

DALŠÍ POKYNY:

1. Vždy používejte výtahy a rampy. Pokud tyto nejsou k dispozici, můžete do cíle dosáhnout pomocí dvou doprovodů. Musí zvedat invalidní vozík za stabilní části rámu. Invalidní vozík by se nikdy neměl zvedat, když cestující sedí. Mělo by se pouze tlačít.
2. Vyhněte se schodům nebo překážkám, jinak požádejte o pomoc svého průvodce.
3. Tento invalidní vozík musí být používán výhradně k přepravě osoby na sedadle.
4. Uživatelé by neměli sedět na invalidním vozíku, když používají jakýkoliv dopravní prostředek.
5. Invalidní vozíky mají na zadních kolech brzdu, která by měla být zajištěna, když se vozík nepohybuje.
6. **NETLAČTE** na stupačky při sezení nebo vstávání, **NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ**.
Opěrky nohou používá uživatel, když sedí.
7. Během pohybu se **NEDOTÝKEJTE** pohyblivých částí **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!!!**

ÚDRŽBA:

Pravidelná kontrola níže uvedených postupů pomůže udržet životnost a účinnost vašeho invalidního vozíku.

TÝDNĚ

1. Zkontrolujte tlak v kolech podle pokynů na kolech.
2. Zkontrolujte, zda je středový šroub příčného ramene dotažen a v dobrém stavu.
3. Očistěte látku mýdlovou vodou nebo dostatečným množstvím přípravků.
4. Kovové části židle čistěte suchým hadříkem nebo speciálními přípravky na chromované povrchy nebo lakované povrchy.
5. Zkontrolujte šrouby kola a v případě potřeby je seřídte.
6. Zkontrolujte poškození předních a zadních kol.

ČTVRTLETNÍ

1. Zkontrolujte a v případě potřeby seřídte: vidlice kol, kola, vrtule.
2. Namažte nebo naolejujte všechny součásti, které jsou vystaveny tření nebo hrozícímu opotřebení.

3. Utáhněte šrouby a matice.
4. Obecná revize stavu křesla a opravy podle potřeby.

KAŽDOROČNĚ

1. Doporučujeme jednou ročně provést úplnou kontrolu kvalifikovanému poskytovateli služeb.
2. Pro bezpečnost pacienta doporučujeme, aby byl vozík každé 2 roky zkontrolován výrobcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ:

Kromě údržby a kontroly lze rám i čalounění důkladně vyčistit.

- Pro zachování vzhledu je nutné látku pravidelně čistit.
- Nečistoty lze odstranit houbou a jemným čisticím prostředkem s teplou vodou, zametáním ve směru textury.
- Před vysušením opláchněte čistou vodou.
- NENECHÁVEJTE invalidní vozík mokrý.
- Nevkládejte potah do bubnové sušičky. Pokud je nečistota hluboká, měl by být povrch očištěn měkkým kartáčem.
- Rám by měl být pravidelně čistěn jemným čisticím prostředkem.
- Invalidní vozíky s koženými sedadly je nutné čistit suchým hadříkem.
- Očistěte kola teplou vodou a jemným mýdlem. Věnujte pozornost sušení kol. je nebezpečné používat invalidní vozík s mokřými koly.
- Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.
- Chraňte předmět před poškrábáním, pořezáním a proražením.

POZOR (!):

- V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- MOBIAK S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
- Existuje $\pm 3\%$. Odchylka rozměrů produktů.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš výrobek vyměnit nebo pokud vám již nebude dále sloužit, myslete na ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, do kterých musí být vaše výrobky zlikvidovány.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

E.C. Declaration of Conformity

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Pokud došlo k vážnému incidentu s tímto produktem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese mobiakcarequality@mobiak.com

ZÁRUKA:

Na váš invalidní vozík je poskytována záruka 2 roky.

Záruka se vztahuje na tovární vady a NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly, jako jsou brzdy, řemeny, popruhy, pneumatiky kol a vše, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud jsou poskytovány), přepravními společnostmi se také nevztahuje záruka. Přepravní náklady na záruční zboží hradí zákazník nebo prodejce.

Eldomed s.r.o. ,web: www.eldomed.cz, Tel.: +420 602 770 375,739 585 777

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
:			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT :			
ÚDAJE O PRODEJCI			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
ADRESA			
TELEFON			
			PODPIS A RAZÍTKO

VÝROBCE:



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



PŘÍLOHA A SPECIFIKACE

MBK kód	popis	
0810804	Mechanický vozík 41cm "Lion"	
0810805	Mechanický vozík 43cm "Lion"	
0810806	Mechanický vozík 46cm "Lion"	
0810830	Mechanický vozík 48cm "Lion"	

	0810804-0810805-0810806-0810830
RÁM	ALUMINIUM
RÁM	SKLÁDACÍ SE SKLOPENÍM ZÁDOVÉ OPĚRKY
BARVA	STŘÍBRNÁ
SEDÁK	LÁTKA S PODŠÍVKOU
PODRUČKY	ODNÍMATELNÉ A ODKLOPNÉ
PODNOŽKY	ODNÍMATELNÉ A NASTAVITELNÁ DÉLKA
ZADNÍ KOLA	24" RYCHLOUPÍNACÍ
PŘEDNÍ KOLA	8"x2" (200x50mm) PEVNÉ
KOLEČKO PROTI PŘEVŘÁCENÍ	ANO STANDARD
BRZDY	ANO STANDARD
ODRAZKY NA ZADNÍM KOLE	ANO, STANDARD (CODE: 0811356)
NOSNOST	135 kg
EXTRA	DVOJITÝ KŘÍŽ
ZVÝŠENÉ OPĚRKY NA NOHY	VOLITELNÝ KÓD: 0811342 &0811343
DRŽÁK NA BERLE	VOLITELNÝ KÓD: 0811369
VÁHA VOZÍKU BEZ ZADNÍCH KOL	12 - 13 kg

PŘÍLOHA B PARAMETRY

											
0810804	42 cm	41 cm	42 cm	42 cm	62 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5 Kg
0810805	44 cm	43 cm	42 cm	42 cm	63 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5Kg
0810806	46 cm	45 cm	42 cm	42 cm	66 cm	103 cm	92 cm	49 cm	24" 8"	120 Kg	16,5 Kg
0810830	49cm	48cm	42cm	45.5cm	67 cm	99cm	90cm	46cm	24" 8"	135 Kg	17,5 Kg

Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerance měření ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.




PŘÍLOHA C. MONTÁŽ

Invalidní vozík, který máte v rukou, se může lišit od toho na následujících fotografiích. Postup montáže je podobný.

1. Rozložení: Uchopte rukojeti a zatáhněte směrem ven, poté zatlačte na tyče na straně sedadla směrem dolů, dokud se invalidní vozík zcela neotevře

Složení: Postupujte v opačném pořadí.

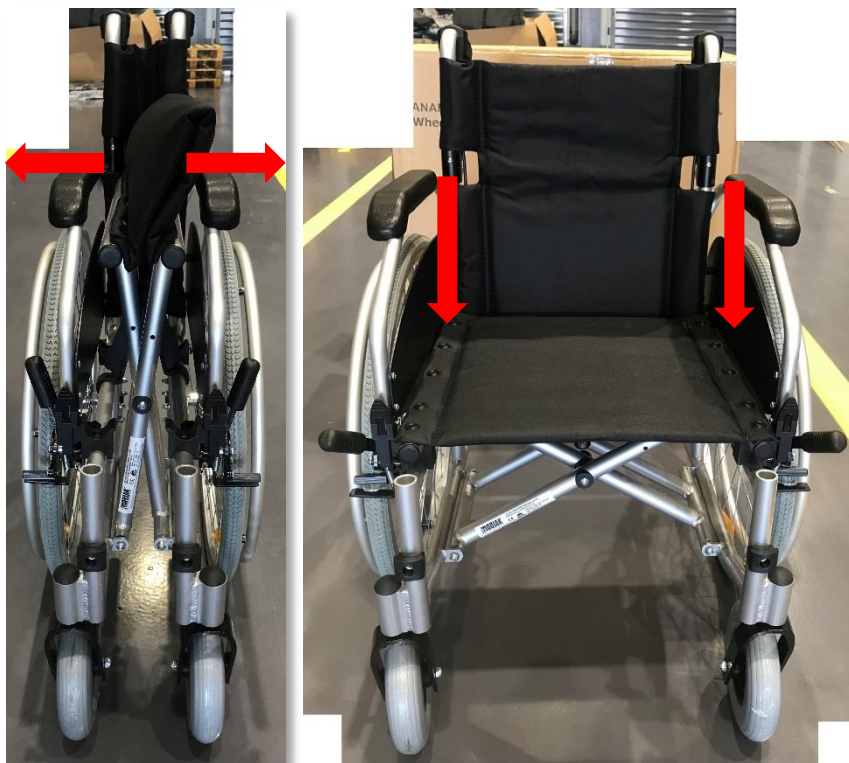

Namontujte opěrku nohou pomocí výstupků na závěsu zasazením na čepy závěsu na rámu invalidního vozíku. Zatlačte opěrku nohou směrem dovnitř invalidního vozíku, dokud nezapadne na místo. Stejný postup opakujte u druhé opěrky nohou. Odstraňte opěrku nohou zatlačením uvolňovací páčky, otočte ji směrem ven, zvedněte opěrku nohou z čepů závěsu..



Pomocí klíče, který je součástí balení produktu, upravte délku opěrky nohou.
Povolte šroub a utáhněte jej na požadovanou délku, abyste jej zajistili.

Použijte přiložený pás na opěrku nohou, abyste se ujistili, že nohy pacienta jsou ve správné poloze.

Volitelné příslušenství - zakoupení zvedacích stupaček
0811342 a 0811343

Nožní pás nebudete potřebovat. Demontujte standardní stupačky a nainstalujte zvedací stupačky stejným způsobem jako standardní.


Chcete-li stupačku posunout nahoru, zatáhněte za hlavní část a nechte ji v požadované výšce. Chcete-li stupačku posunout dolů, zatlačte na páčku a spusťte ji, držte ji za spodní část. Tuto funkci z bezpečnostních důvodů doporučujeme provádět pouze od dodavatele a nikoli od samotného uživatele.

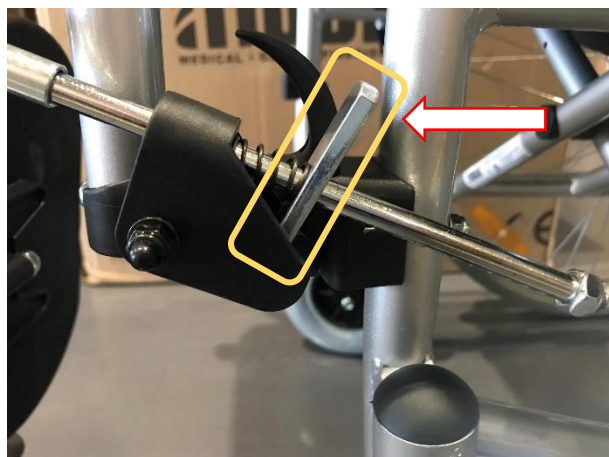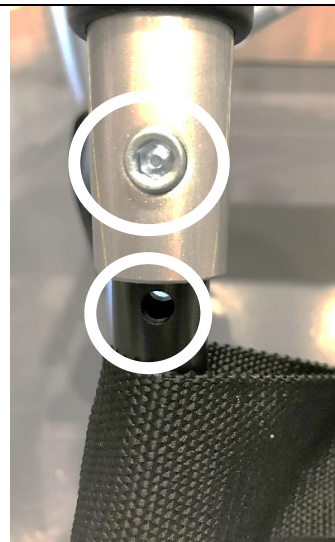



Chcete-li zvednout sklopnou loketní opěrku, stiskněte bezpečnostní páku a vytáhněte ji nahoru.

Chcete-li opěradlo sklopit, zatlačte na bezpečnostní páčky, které jsou na zadní straně opěradla, a současně zatlačte obě strany mírně dolů.

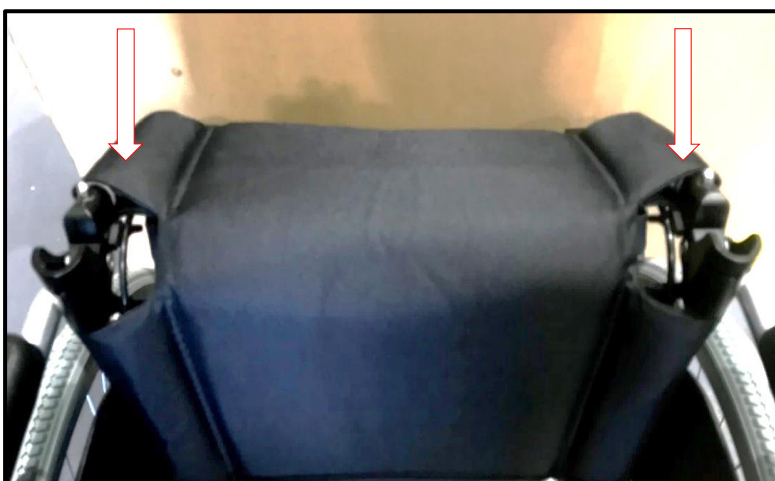


Chcete-li na invalidní vozík nainstalovat systém proti převrácení (součástí balení) (obr. č. 1):
 1) Odstraňte „C klip“ (obrázek č. 2),
 2) Zarovnejte otvor součásti s otvorem hlavního rámu (obr. 3),
 3) Zajistěte ochranu proti naklonění pomocí „C klipu“ (obr. č. 4),
 4) Můžete nastavit výšku od země - vyjměte druhý „C klip“ a přizpůsobte jej jakémukoliv ze tří požadovaných slotů (obr. č. 5 a č. 6).

POZOR

Před přejetím schodu nebo obrubníku vždy demontujte kola proti převrácení.


Nikdy na ně nestoupejte ani ji nepoužívejte jako pomůcku při naklápění.

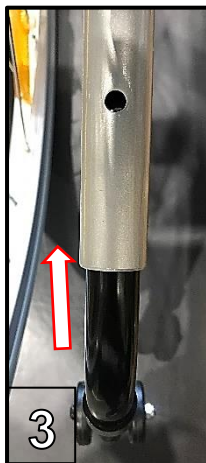

Brzdy se používají k znehybnění invalidního vozíku, když stojí, aby se zabránilo jeho rozjetí.

Chcete-li zabrzdít, zatlačte brzdovou páku dlaní dopředu. (1)

Chcete-li brzdu uvolnit, zatáhněte za brzdovou páku dozadu (2)

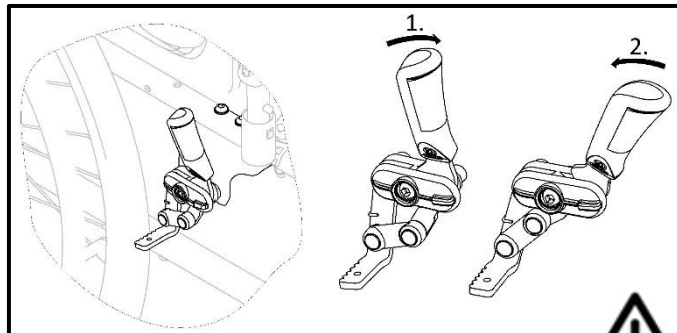


Nikdy nezatahujte parkovací brzdu, když se pohybujete. Nezařazujte parkovací brzdy, abyste invalidní vozík zpomalili. Neopírejte se o parkovací brzdy pro podporu nebo přesun. Při používání brzdy držte prsty v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, vždy mějte ruku na brzdové páce.

Díky brzdám doprovodu může asistent brzdit invalidní vozík, když je v pohybu. Brzdu doprovodu lze také použít jako parkovací brzdu.

Chcete-li brzdít, zatáhněte za brzdovou páku A na rukojeti.

Chcete-li zaparkovat, pevně zatáhněte za brzdovou páku, dokud bezpečnostní páka B nezapadne

Pro uvolnění zatáhněte za brzdovou páku a uvolněte bezpečnostní páku pod brzdovou pákou.

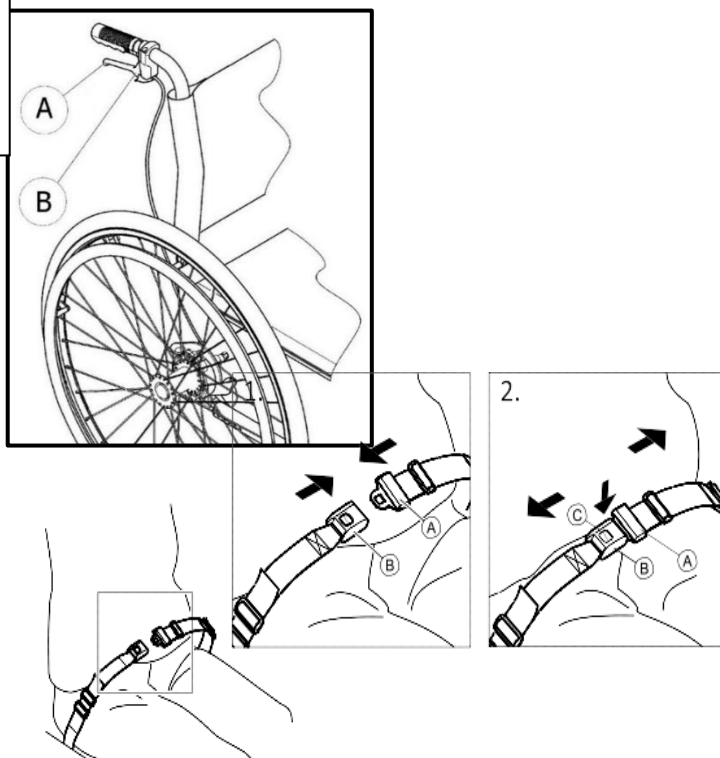

Vozík lze vybavit bezpečnostním pásem. (Volitelné ref.: 0806482 ř 0806478 6 ř 0808364 ř 0809750 ř 0804478). Zabraňuje uživateli sklouznout na vozíku dolů nebo z vozíku vypadnout. Volný pás může uživateli umožnit sklouznout a vytvořit riziko uškrcení. Ujistěte se, že sedíte zcela zády v sedadle a že pánev je co nejvíce vzpřímená a symetrická. Pro uzavření zatlačte západku A do spony B. Chcete-li ji otevřít, stiskněte tlačítko C a vytáhněte západku A ze spony B.


Jak odstranit Q.R. zadní kola:

Invalidní vozík má na zadních kolech rychloupínací systém, takže je lze snadno vyjmout a snížit také úložný prostor v autě a doma.

Chcete-li kolo demontovat, stiskněte černé tlačítko ve středu kola, pro odemknutí a současně vytáhněte kolo směrem ven, dokud se zcela nevysune ze základny.

Opakujte stejný postup na druhém kole.

Pro sestavení postupujte obráceným postupem.

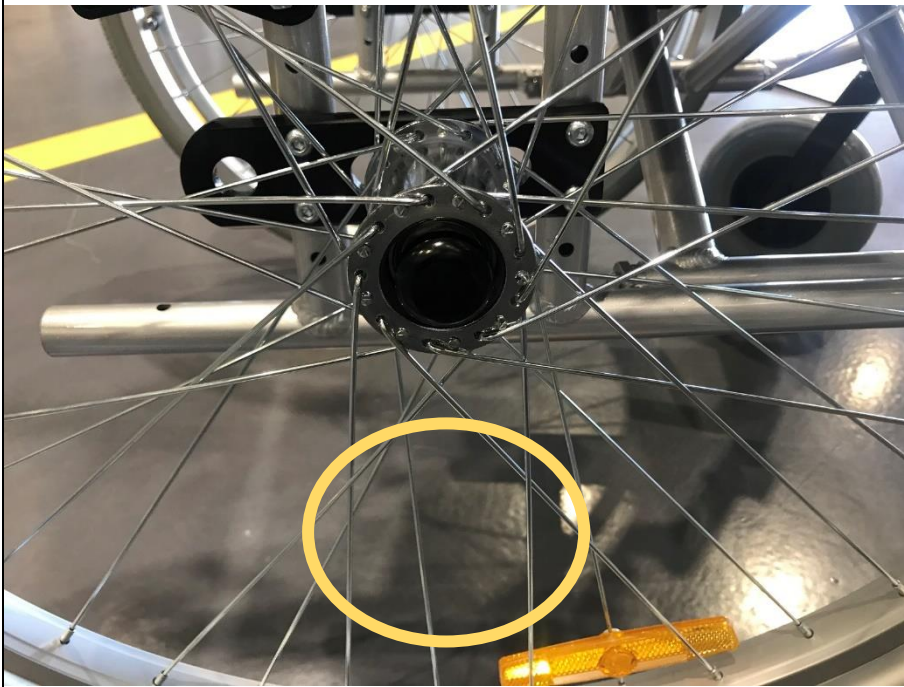

PŘÍLOHA D – SYMBOLY

Symboły na etykietě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením