



NÁVOD K POUŽITÍ: INVALIDNÍ VOZÍK PRO DĚTI "RAINBOW"

REF: 0811311



URČENÉ POUŽITÍ

Invalidní vozíky jsou určeny pro osoby s tělesným nebo mentálním postižením, které mají omezenou nebo žádnou osobní mobilitu, a slouží pouze k přepravě.



SPECIFIKACE

RÁM	Ocelový, skládací
BARVA	Zelená-oranžová-modrá
SEDÁK NASTAVITELNÁ HLOUBKA	tkanina
SEDAČKA	skládací
OPĚRKA NA NOHY	Odnímatelné Nastavitelná délka Otočná Nastavitelná délka a sklon
ZADNÍ KOLA	24" kompaktní s ráfky
PŘEDNÍ KOLA	8" x 1" Compact (200x25mm)
BRZDY	Na zadních kolech
PODRUČKY	Nastavitelné, odnímatelné a odklopné
KRYTY KOL	Ano, standard
KOLEČKA PROTI PŘEVŘÁCENÍ	Ano, standard

PARAMETRY

0811311	33cm	35cm	40cm	41cm	53cm	103cm	91cm	50cm	24"8"	80kg	17,9kg

Montáž

Viz příloha **ANNEX A**

SYMBOLY

Viz příloha **ANNEX B**

ÚDRŽBA

Pravidelná kontrola níže uvedených postupů pomůže zachovat životnost a účinnost vašeho invalidního vozíku.

☑ TÝDNĚ

- Zkontrolujte, zda je centrální šroub příčného ramene dotažen a v pořádku
- Tkaniny čistěte mýdlovou vodou nebo jinými prostředky.
- Kovové části křesla čistěte suchým hadříkem nebo speciálními přípravky na chromované povrchy nebo lakované povrchy.
- Zkontrolujte šrouby kol a v případě potřeby je seřídte.
- Zkontrolujte, zda nejsou poškozena přední nebo zadní kola.

☑ ČTVRTLETNÍ

- Namažte nebo naolejujte všechny součásti, které jsou vystaveny tření nebo hrozícímu opotřebení.
- Utáhněte šrouby a matice.
- Obecná revize stavu křesla a opravy všeho, co je nezbytné.

☑ ROČNĚ

Doporučujeme jednou ročně provést úplnou kontrolu kvalifikovaným poskytovatelem služeb. Pro fyzickou bezpečnost pacienta doporučujeme každé 2 roky vozík kontrolovat výrobcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ

Kromě údržby a kontroly je vhodné rám i látku důkladně vyčistit.

- Pro zachování vzhledu je nutné látku pravidelně čistit.
- Nečistoty lze odstranit houbou a jemným čisticím prostředkem s teplou vodou ve směru textury.
- Před vysušením opláchněte čistou vodou.
- Nevkládejte látku do bubnové sušičky. Pokud je nečistota velká, měl by být povrch očištěn měkkým kartáčem.
- Rám by měl být pravidelně čištěn jemným čisticím prostředkem.
- Invalidní vozíky s koženými sedadly je nutné čistit suchým hadříkem.
- Očistěte kola teplou vodou a jemným mýdlem. Věnujte pozornost sušení kol. Je nebezpečné používat vozík s mokřými koly.

DŮLEŽITÉ!

Konstrukce tohoto invalidního vozíku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Uživatelé však mohou být ohroženi nevhodným používáním svých invalidních vozíků. Pro vaši vlastní bezpečnost je třeba dodržovat následující pravidla. Nespecifické nebo nesprávné seřizovací úkony mohou zvýšit riziko nehod.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli pro ostatní snadněji viditelní.
- Buďte opatrní během první jízdy s vozíkem.
- Seznamte se se svým invalidním vozíkem.
- Používejte svůj invalidní vozík na rovném povrchu a také do kopce a z kopce.
- Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, pokud je potřebujete zvednout z podlahy mezi kolena.
- Pokud se potřebujete přesunout na sedadlo, nepokoušejte se dosáhnout na předměty.
- Nepoužívejte na silnicích nebo dálnicích.
- Nepoužívejte neautorizované díly, příslušenství nebo adaptéry jiné než schválené výrobcem.
- Nestoupejte na vozíku.
- Nepoužívejte podnožku jako plošinu při nastupování nebo vystupování z invalidního vozíku.

Při pohybu na vozíku nezapomeňte!!

Vždy používejte výtahy a rampy. Pokud tyto nejsou k dispozici, můžete do cíle dosáhnout pomocí dvou doprovodů. Musí chytit invalidní vozík v bezpečných místech. Vozík by nikdy neměl zvedat cestující. Mělo by se pouze tlačít.



VAROVANI

V případě problému nepoužívejte invalidní vozík, dokud nebude problém vyřešen.

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli následky v důsledku nesprávného použití tohoto produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez upozornění.
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití invalidního vozíku.
- Nedovolte dětem, aby si hrály na invalidním vozíku.
- Nepokoušejte se zvedat invalidní vozík za odnímatelné části.
- Uchovávejte zabalený invalidní vozík mimo zdroje tepla.
- Nastupování a vystupování z invalidního vozíku lze provádět nezávisle za předpokladu, že máte dostatečnou pohyblivost a sílu horní části těla.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš výrobek vyměnit nebo pokud vám již nebude dále sloužit, myslete na ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obraťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, do kterých musí být vaše výrobky zlikvidovány.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

E.C. Declaration of Conformity

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Pokud došlo k vážnému incidentu s tímto produktem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese mobiakcarequality@mobiak.com

ZÁRUKA:

Na váš invalidní vozík je poskytována záruka 2 roky.

Záruka se vztahuje na tovární vady a NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly, jako jsou brzdy, řemeny, popruhy, pneumatiky kol a vše, co se během používání nebo časem poškodí. Poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud jsou poskytovány), přepravními společnostmi se také nevztahuje záruka. Přepravní náklady na záruční zboží hradí zákazník nebo prodejce.

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
ÚDAJE O PRODEJCI			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ		ADRESA	
TELEFON		PODPIS A RAZÍTKO	
Výrobce:			



MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



PŘÍLOHA A. MONTÁŽ

Nejprve zkontrolujeme obsah balení. Umístěte invalidní vozík tak, jak je znázorněno na obrázku. Zatlačením na tyče na straně sedadla jedním pohybem se vozík otevře a dostane se do zcela otevřeného stavu.	
Držte opěrku nohou rukou a umístěte ji podle obrázku. Čep musí procházet jeho otvorem	
Po umístění opěrky nohou.	

Nastavení hloubky sedu – povolte šroubky a zahněte sedák dolů dle potřeby, šrouby nemontujte zpět.



Použijte přiložený pás, abyste se ujistili, že nohy pacienta jsou ve správné poloze.



Stisknutím kolíku vložte kolečka proti převrácení.



PŘÍLOHA B. SYMBOLY

Symbole na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



k
nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením