



UŽIVATELSKÝ MANUÁL: ZVEDACÍ ŽIDLE S KOLEČKY “ESTIA”

REF: 0811900



UŽIVATELSKÝ MANUÁL: ZVEDACÍ ŽIDLE S KOLEČKY “ESTIA II”

REF: 0811950



POUŽITÍ:

Zvedací židle s kolečky je určena pro zdravotně postižené, nemocné, seniory a osoby s pohybovými obtížemi.

Může být použit k přesunu pacienta na lůžko/křeslo a z něj a/nebo k použití pro osoby, které nemohou jít na toaletu kvůli omezené pohyblivosti.


SPECIFIKACE A ROZMĚRY

CODE 0811900



RÁM	OCEL
SEDADLO MATERIAL	ABS
PODSEDÁK	SNÍMATELNÉ S PRATELNÝM POTAHEM
ZÁDOVÁ OPĚRKA MATERIAL	PE
ZADNÍ KOLEČKA	3"
PŘEDNÍ KOLEČKA	5"
BRZDY	NA PŘEDNÍCH I ZADNÍCH KOLECH

Zvedací židle s kolečky je vhodná pro vnitřní použití a přepravní rychlost je ≤3 km/h.

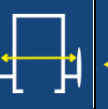									
0811900	46cm	40cm	60 cm	71 cm	79-99 cm	37-57cm	3"5"	100kg	25.5kg

CODE 0811950



RÁM	OCEL
SEDADLO MATERIAL	ABS
PODSEDÁK	SNÍMATELNÉ S PRATELNÝM POTAHEM
ZÁDOVÁ OPĚRKA MATERIAL	PE
ZADNÍ KOLEČKA	3"
PŘEDNÍ KOLEČKA	5"
BRZDY	NA PŘEDNÍCH I ZADNÍCH KOLECH
S HYDRAULICKÝM ZVEDACÍM SYSTÉMEM	

Zvedací židle s kolečky je vhodná pro vnitřní použití a přepravní rychlost je ≤3 km/h.

0811950	46cm	40cm	59 cm	77 cm	93-119cm	44-70cm	3"5"	120kg	32kg

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Účelem pravidelné kontroly zvedací židle s kolečky je potvrdit její správnou funkci a musí být prováděna alespoň jednou měsíčně.

- Zkontrolujte stav nádoby, zda nevykazuje praskliny, praskliny nebo netěsnosti.
- Zkontrolujte šrouby rámu. Pokud zjistíte, že jsou některé uvolněné, utáhněte je.
- Zkontrolujte plastové díly a rám zvedací židle s kolečky, zda nejsou uvolněné, prasklé nebo zlomené.
- Zkontrolujte stabilitu zvedací židle s kolečky
- Zkontrolujte brzdy kol a potvrďte jejich funkci.
- Zkontrolujte stav předních a zadních kol.

V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ

- Za čištění, kontrolu a údržbu odpovídá uživatel nebo obsluha vozíku.
 - Kromě údržby a kontroly lze provést generální čištění rámu a čalounění.
 - NENECHÁVEJTE výrobek mokrý nebo znečištěný prachem nebo blátem.
 - Rám a sedadlo doporučujeme vyčistit jemným čisticím prostředkem nebo antiseptickým roztokem. Nastříkejte přípravek a poté očistěte houbou. Otřete povrchy do sucha čistým hadříkem.
 - K otření povrchu výrobku použijte čistý a měkký hadřík.
 - Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný, jemný dezinfekční prostředek.
 - Chraňte předmět před poškrábáním, proříznutím a proražením.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte kyselé nebo žíravé roztoky.
- Povlak polštáře je snímatelný a lze jej ručně prát ve studené vodě.

DŮLEŽITÉ(!)

Před použitím zvedací židle s kolečky SE UJISTĚTE, že:

- Židle je plně vysunutá a zajištěná.
- Kola jsou dobře zajištěna, sedadlo je zajištěno na místě, nádoba je správně umístěna
- Rám nemá žádné praskliny ani praskliny.
- V blízkosti výrobku nekuřte a nepoužívejte žádný plamen.
- Chraňte výrobek před oděrkami, řezy a propíchnutím.
- Před použitím jej nastavte na správnou výšku a ujistěte se, že panely sedadla na obou stranách zůstávají ve stejné výšce.
- Když uživatel sedí na zvedací židli s kolečky nebo z ní vstává, neměl by stát na opěrce nohou, protože existuje vysoké riziko převrácení. Uživatel musí během tohoto procesu stát na zemi.
- Ošetřující osoba nesmí stát na stupačce, protože existuje vysoké riziko převrácení a poškození výrobku.
- V případě použití na svažitém terénu musí být všechna čtyři kola zabržděna
- Použití by mělo být vždy pod dohledem člena rodiny, sestry nebo ošetřovatele.

- Při používání výrobku na kobercích, mokřích nebo kluzkých površích zvýšte opatrnost.
- Nepoužívejte na zledovatělé povrchy.
- Nikdy nepřekračujte maximální hmotnost uživatele.
- U 0811950, pokud je na zvedacím mechanismu od pacienta voda nebo jiné tekutiny, okamžitě jej vyčistěte a osušte.

DALŠÍ POKYNY

- Při sezení nebo vstávání musíte madla zatlačit dolů, aby zvedací křeslo s kolečky zůstalo nehybné a neklouzalo.
- Při vstávání se musíte opírat o obě rukojeti stejně. Podpora pouze jednou rukou (a bez doprovodu) může způsobit poškození nebo zranění.
- Zvedací židli s kolečky pravidelně čistěte.
- Nenechávejte zvedací židli s kolečky mokrou.
- Nenechávejte děti v blízkosti zvedací židle s kolečky bez dozoru

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ

Zabalený produkt by měl být skladován v dobře větrané a čisté místnosti s teplotou nepřesahující 0 °C ~ 40 °C, relativní vlhkost nepřesahující 80 %.



POZOR

- Pokud se vyskytne problém s kterýmkoli z výše uvedených, **NEPOUŽÍVEJTE** křeslo, dokud nebude problém odstraněn.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Výrobce se zřídka veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit zde uvedené pokyny bez upozornění.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se zvedací židlí s kolečky
- Zvedací křeslo s kolečky udržujte mimo zdroje tepla.
- Nastupování a vystupování na zvedací židli s kolečky bez pomoci vyžaduje dostatečnou sílu a pohyblivost horní části těla.
- Zvedací křeslo s kolečky nepoužívejte na schodech (jednoduché schody nebo eskalátory).
- Neměla by být používána ve sprše. Rám a kola by mohla zrezivět.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš výrobek vyměnit nebo pokud vám již nebude dále sloužit, myslíte na ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obráťte se na své úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, do kterých musí být vaše výrobky zlikvidovány, správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobcí.

ZÁRUKA

Na zvedací křeslo s kolečky je poskytována záruka 2 roky od data nákupu.

Záruka se vztahuje na tovární vady a NEVZTAHUJE se na vady vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu.

Záruka se nevztahuje na opotřebované díly během používání, poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud jsou poskytovány), přepravou.

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ


Kupující		
Jméno a příjmení:		
Datum nákupu		TEL.:
Prodávající		
Razítko a podpis		

Prohlášení o shodě

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

MONTÁŽ -0811900


Umístěte trubky malých kol do příslušných otvorů pro trubky základny (levá a pravá) a upevněte je celkem 4 šrouby M10, 4 velkými plochými podložkami M10, 4 plochými podložkami M10 (menší velikosti) a 4 pojistnými maticemi M10 jako je zobrazeno na obrázku.

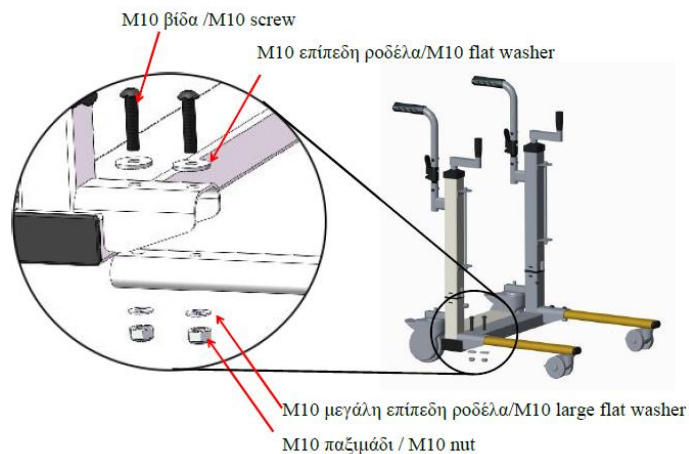

Umístěte rám levého sedadla do středu dvou "výčnělků" trubky levého sloupku stojanu, protáhněte čep sloupkem, nainstalujte jej a upevněte maticí M8 (jak je znázorněno na obrázku). Pravý rám sedadla je umístěn stejným způsobem.



Pokud potřebujete použít toal.nádobu, nejprve nainstalujte železný rám klozetu do upevňovacích otvorů dvou trubek základny a poté instalujte nádobu zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

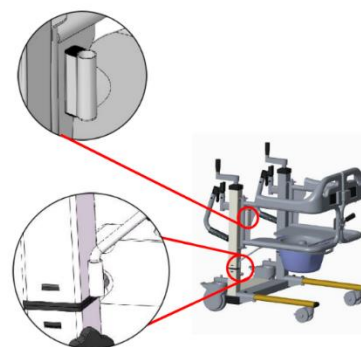


Po instalaci všech dílů zvedněte rukojeť a poté můžete židli začít normálně používat.




MONTÁŽ - 0811950


Vytáhněte rukojeť nahoru do polohy použití, vytáhněte dva kolíky ve tvaru $\phi 8$ D na základně, otočte podpěrné nohy dolů do vhodné polohy, posuňte kolíky ve tvaru D zpět do původní polohy a zajistěte podpěrné nohy.

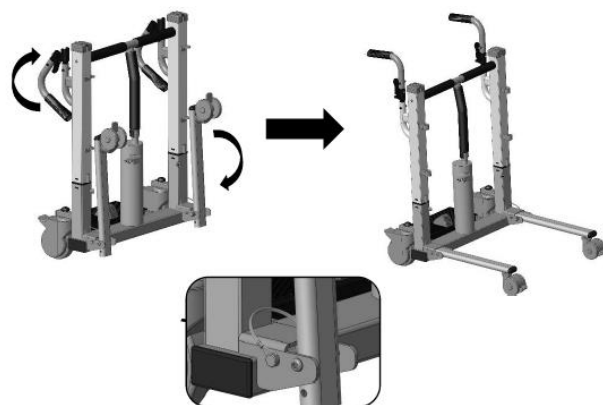


Nainstalujte nožní ovladač hydraulického čerpadla do otvoru hydraulického čerpadla pomocí šroubu M8.

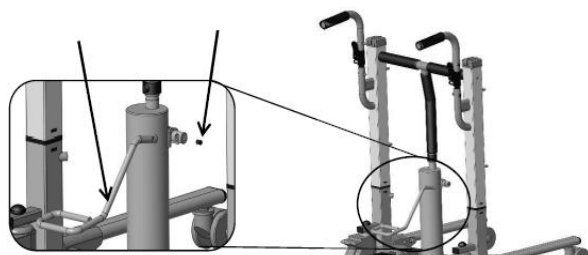

Umístěte pravou základnu sedadla na trubku pravého sloupku základny v poloze znázorněné na obrázku. Po zatlačení uzávěru hřídele pro rychlé uvolnění zarovnejte otvory a nainstalujte jej. Po instalaci a odladění ZKONTROLUJTE zda není základna sedadla uvolněná a může se flexibilně otáčet (stejným způsobem nainstalujte základnu levého sedadla)

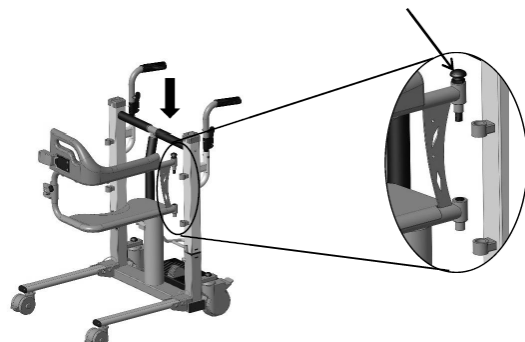

Pokud potřebujete použít toaletní nádobu, nejprve nainstalujte železný rám klozetu do upevňovacích otvorů dvou trubek základny a poté instalujte nádobu zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

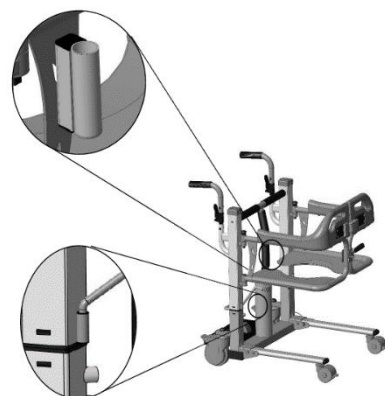

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ U PACIENTA

0811900 & 0811950

Nechte uživatele sedět vzpřímeně a nastavte výšku rámu sedadla zvedací židle s kolečky tak, aby spodní plocha rámu sedadla zvedací židle s kolečky byla o něco výše než rovina sedadla uživatele.

Otevřete rám sedadla na obou stranách a posuňte jej před uživatele, upravte polohu zvedací židle pomocí koleček tak, aby těžiště těla uživatele bylo ve středu rámu sedadla, a *upravte výšku rámu sedadla znovu tak, aby se spodní část rámu sedadla mírně dotýkala roviny sedadla uživatele.



* NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA PRO 0811900


Zvedání sedačky otáčením pák proti směru hodinových ručiček.



Snížení výšky sedáku otáčením pák ve směru hodinových ručiček.




(foto produktu je ilustrativní)

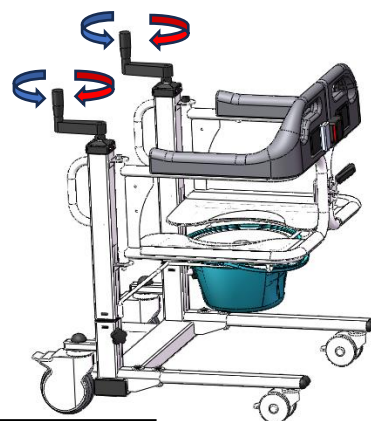


Chcete-li sedadlo zvednout, umístěte koncový blok dovnitř (jak je znázorněno na obrázku) a poté konstantní rychlostí stiskněte ovládací systém hydraulického čerpadla..

Chcete-li snížit výšku sedadla, umístěte koncový blok směrem ven (jak je znázorněno na obrázku) a poté stiskněte ovládací systém hydraulického čerpadla a podržte jej v této poloze.

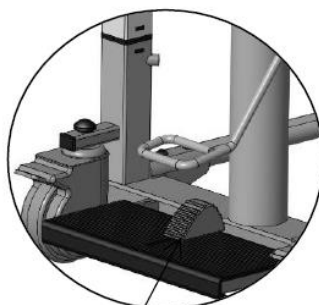

Μπλοκ ορίου θέσης προς τα μέσα
Limit control block in inward position

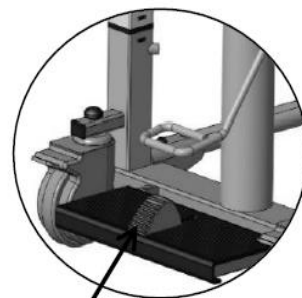

Μπλοκ ορίου θέσης προς τα έξω
Limit control block in outward position

Zavřete 5palcovou brzdu předního kolečka, zvedněte nohu uživatele a vložte ji do stupačky.

Nechte uživatele otočit své tělo mírně doleva a doprava a současně operátor otočí odpovídající boční rám sedadla (vlevo a vpravo), což uživateli umožňuje sedět na levém a pravém rámu zvedací židle s koly.



Když je uživatel zcela usazen ve zvedací židli s kolečky a rám levého a pravého sedadla je zcela uzavřen, bezpečnostní klíč zad se automaticky uzamkne a obsluha uzamkne bezpečnostní pás.

Uživatel se pohodlně usadí a položí ruce na područky (pravé a levé).

Obsluha zkontroluje vzdálenost mezi spodním povrchem zvedací židle s rámem kol a sedadlem, na kterém uživatel předtím seděl, zvedne rám sedadla o 2–3 cm, uvolní 5palcovou brzdu předního kolečka a pomalu pohybuje zvedací židlí. s koly z předchozí polohy.



Obsluha tlačí zvedací židli s kolečky ze zadní strany, aby ji posunula k okraji lůžka.

Zkontrolujte výšku rámu sedáku zvedací židle s kolečky na okraji lůžka, abyste se ujistili, že spodní plocha rámu sedáku je o něco výše než povrch lůžka (pokud potřebujete upravit výšku sedáku rámu, musíte zablokovat 5palcové přední kolečko, aby fungovalo).



Obsluha plně zatlačí zvedací křeslo s kolečky do předem určené polohy lůžka, zablokuje 5palcovou brzdu předního kolečka a znovu upraví výšku rámu sedadla tak, aby se jeho spodní plocha mírně dotýkala ložné plochy.



Otevřete bezpečnostní pás a bezpečnostní pojistku zad na zadní straně zvedací židle s kolečky, poté pomalu otevřete rám levého a pravého sedadla a nechte uživatele sedět na posteli.

Obsluha odblokuje 5palcové přední kolečko, zvedne nohy uživatele a přesune zvedací křeslo s kolečky od lůžka.

