

Návod k obsluze

Elektrický pohon pro invalidní vozíky

Model CNEBIKES WH12A



Elektrický pohon určený pro manuální invalidní vozíky.
Připojení pohonu reverzibilně přeměňuje manuální invalidní vozík na
elektrický tříkolový invalidní vozík.

CE

Technické parametry:

Model

CNEBIKES WH12A

Materiál rámu

Hliník

Motor

36 V 250 W/350 W v kole

Baterie

36 V 8.8 Ah, 10.4 Ah nebo 11.6 Ah

Ovladač

Chytrý ovladač

Nabíječka

AC 100 V-240 V, 2 Amps

Pneumatika

KENDA 12 1/2 * 2.4

Maximální rychlost

20 km/h

Brzdy

kotoučová a ruční

Osvětlení

Přední světlo LED

Displej

Displej LCD005

Akcelerátor

MOTOR

36 V 250 W/350 W v kole

Maximální rychlost omezená do 25 km/h

Kotoučová a ruční brzda



Baterie Thunder 36 V

8.8 Ah

10.4 Ah

11.6 Ah

Baterie by měla být úplně nabitá.

LED indikátor stavu




BATERIE

Blokada
na kluczyk

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ

Je nutné otočit bezpečnostní spínač, který obsluhuje ruční brzdu.

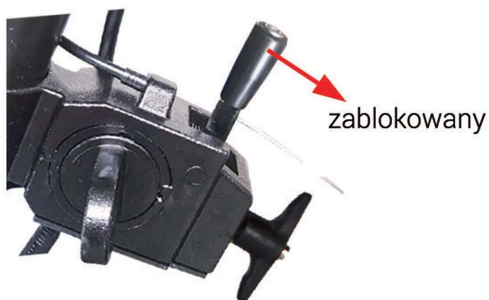

RUČNÍ BRZDA

Když zastavíte na svahu, blokáda ruční brzdy znemožní couvání vozíku.



Displej LCD0005, stupně 1-3 dopředu,
stupeň -1 dozadu




Perfektní tvar a délka
zajišťují pohodlný prostor pro nohy.



NÁVOD K OBSLUZE

Sedněte si na invalidním vozíku a popojeďte k pohonu.

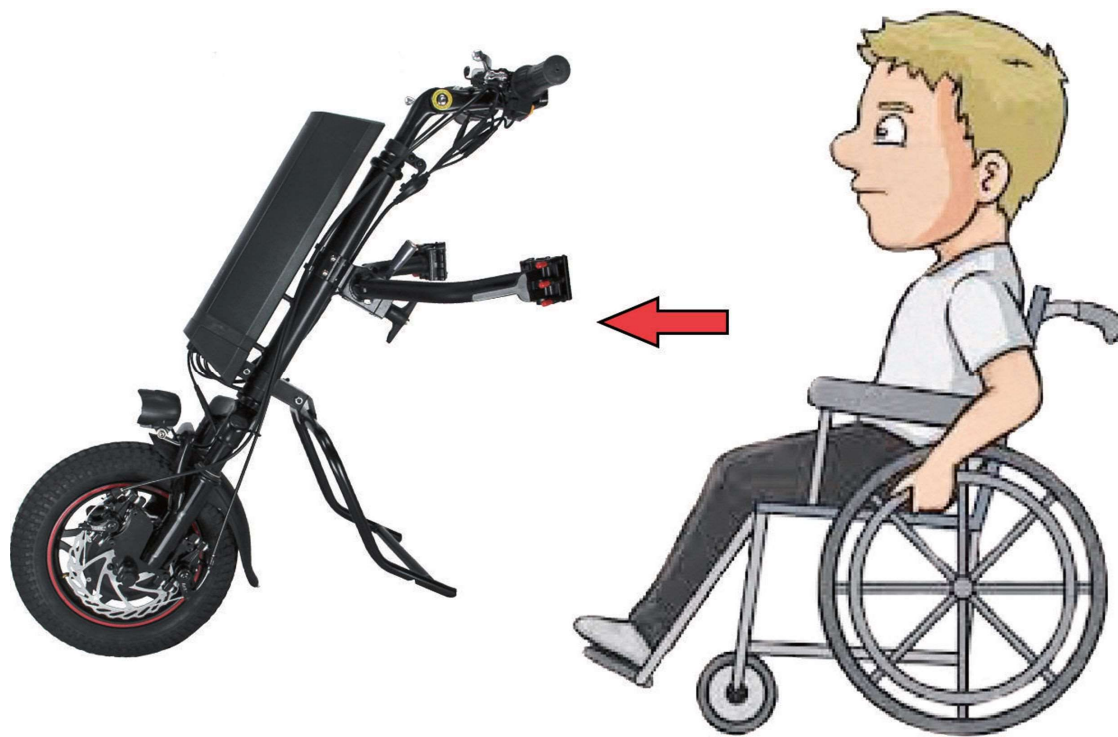

Upínací svorka pro invalidní vozík (pomocí červeného šroubu přizpůsobte průměru rámu vozíku)



Zatlačte řídítka dopředu, až se přední kola vozíku budou nacházet nad zemí.



Bezpečnostní páka



Stiskněte tlačítko ON/OFF a jeďte.

On/off




Nastavení režimů:
DST: Vzdálenost
ODO: Počet najetých kilometrů
VOL: Napětí baterie

OBSLUHA A NASTAVENÍ LCD DISPLEJE

1. ON/OFF

Přidrželte dlouho tlačítko pro zapnutí napájení, pro vypnutí zařízení přidrželte podruhé tlačítko . Když nebudete používat zařízení déle než 5 minut, automaticky se vypne a vypne napájení motoru.

2. SPÍNAČ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ

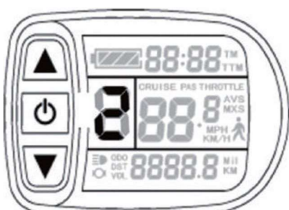


Pro změnu stupně přidrželte krátce D nebo O. 1-3.1 označuje minimální výkon, 3 maximální. -1 je zpětný chod.

3. FUNKCE ASISTENTA 6 km/h



Přidrželte šipku dolu a poté panáček začne blikat. Vozík pojede rychlostí do 6 km/hod.

4. FUNKCE VÝLETU

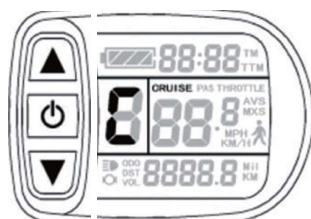

Když zapnete funkci výletu, vozík pojede s rychlostí větší než 7 km. Přidrželte tlačítko a vyberte CRUISE. Pro zrušení přidrželte brzdou nebo jakékoli tlačítko.

5. ZOBRAZTE A SMAŽTE JEDNOTLIVÁ DATA



Po zapnutí napájení přidrželte přes 5 vteřin tlačítko a , doba jednotlivé jízdy (TM) a DST bliknou. Pak krátce přidrželte tlačítko a obě data budou smazaná.





Pokud se vám nepovede přidrželte tlačítko po dobu 5 vteřin, údaje zůstanou zachovány.

6. PŘIDRŽTE TLAČÍTKO OVLADAČE

PRO VYPNUTÍ DISPEJE A NAPÁJENÍ

7. NASTAVTE MAXIMÁLNÍ RYCHLOST



Zapněte napájení a přidržte přes 5 vteřin tlačítka  a . Vyberte maximální rychlost jízdy (25 km/h) a přidržte krátce . Pak přidržte krátce tlačítko  a přejděte na další nastavení.



8. NASTAVENÍ PRŮMĚRU KOLA



Průměr kola zůstane nastaven po nastavení maximální rychlosti jízdy, uvedený průměr kola začne blikat. Přidržte šipku nahoru nebo dolů a nastavte požadovanou hodnotu průměru kola. Přidržte tlačítko power a přejděte do následného nastavení parametru.

NASTAVENÍ METRICKÝCH JEDNOTEK



Metrické jednotky zůstanou nastaveny po nastavení průměru kol, km/h a km. Přidržte šipku nahoru nebo dolů krátce a vyberte jednotky metrické pro rychlost a vzdálenost.

Rychlost jízdy	km/h	mph
vzdálenost	km	míle

VAROVÁNÍ!!!!!!!!!!!!

Při nouzovém brzdění netiskněte jenom ruční brzdu, ale zastavte také zadní kola vozíku!

Nebrzděte prudce, snažte se brzdit pomalu!

Maximální rychlost vozíku je 20 km/h. Můžete ji změnit v nastaveních. Nedoporučuje se zvyšovat maximální rychlost příliš brzy!

Údaje zplnomocněného zástupce v Polsku: Airwheel Poland S.C.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 63, Polsko

DIČ: PL9691616598,

IČ: 363321013

www.Airwheel.pl

Mobil: +48 570 876 092

Servis: +48 515 252 443

Datum vydání:
Prosinec 2018

UŽIJTE SI JÍZDU!

Výrobce:

CNEBIKES CO., LTD

ADD: No 3, Renmin west road.wujin district,

Changzhou city, Jiangsu, Čína, Mobil: +86-

85809291, Fax:+86-85801633

Webové stránky: www.cnebikes.com