


**Kompletní sada pro montáž elektrického pohonu
Techlife W1**

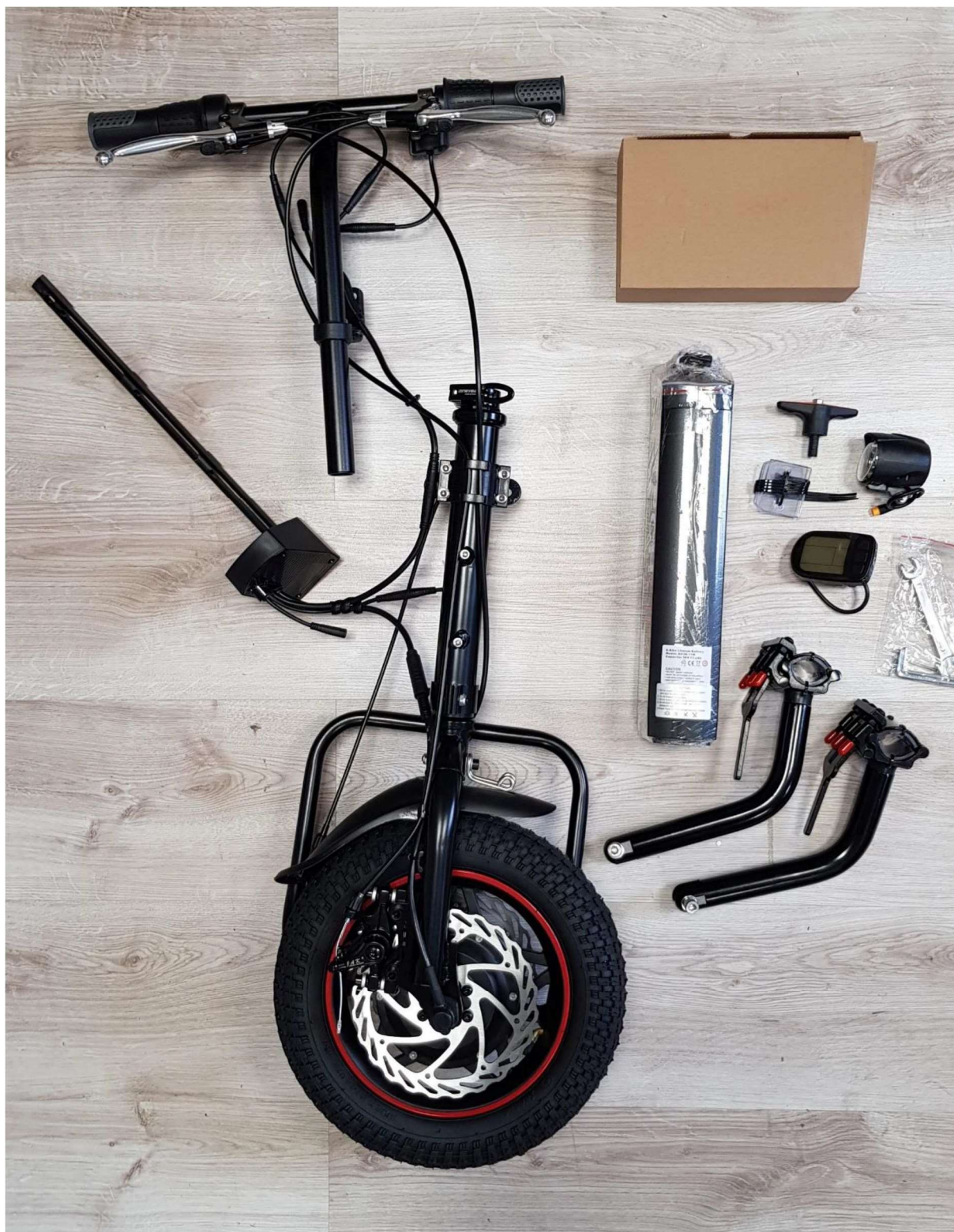

1. Vložte řídítka do rámu (dávejte pozor na kabely).



2. Pomocí skrytého šroubu utáhněte řídítka k rámu (kolo musí být v ose).




2. Připevněte kolejnici pro baterii do rámu pomocí dvou šroubů inbus.



3. Namontujte baterii do kolejnice.




5. Namontujte LED osvětlení pomocí přiloženého šroubu s maticí.

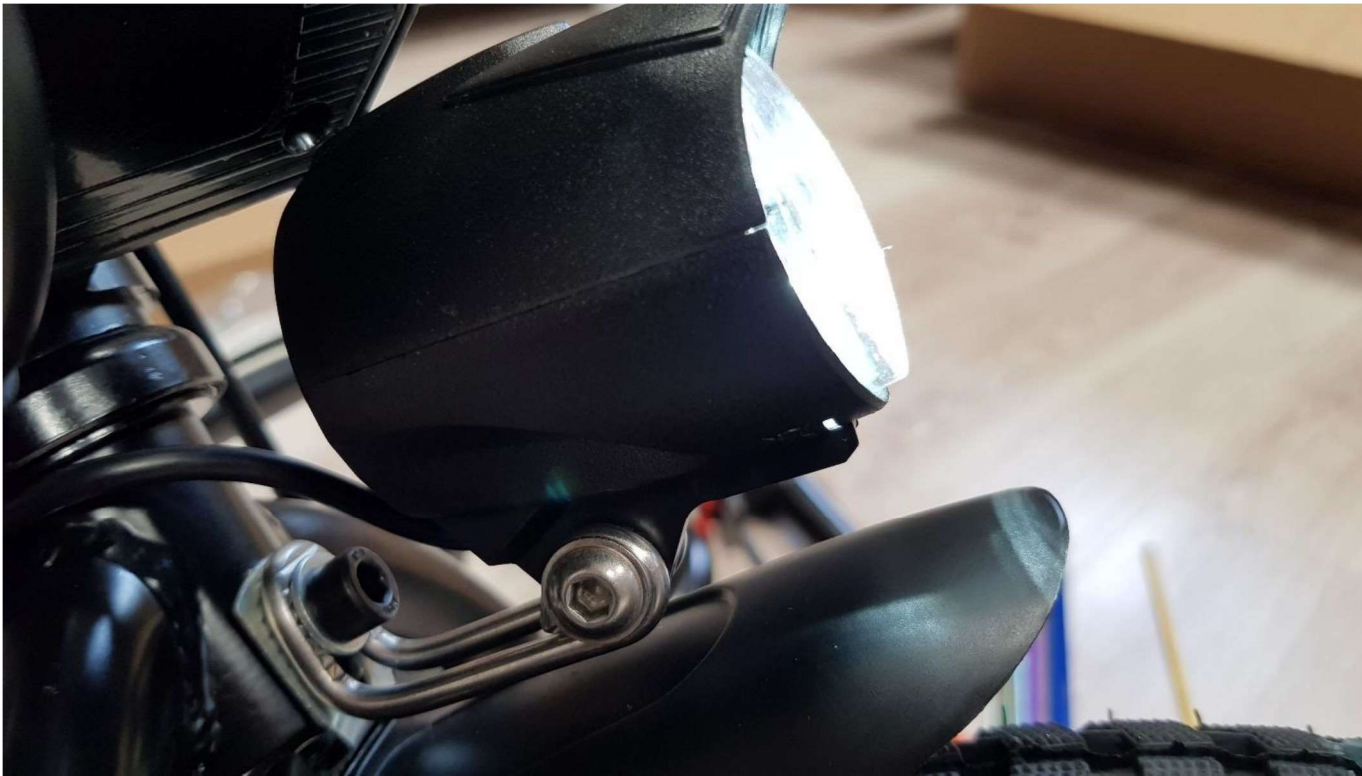

6. Namontujte LED displej a odblokovací tlačítko do řídítek a připojte zástrčku displeje.



7. Namontujte oranžový motýlkový šroub a dva upevňovací držáky pomocí plochého klíče 13 a klíče imbus 6.

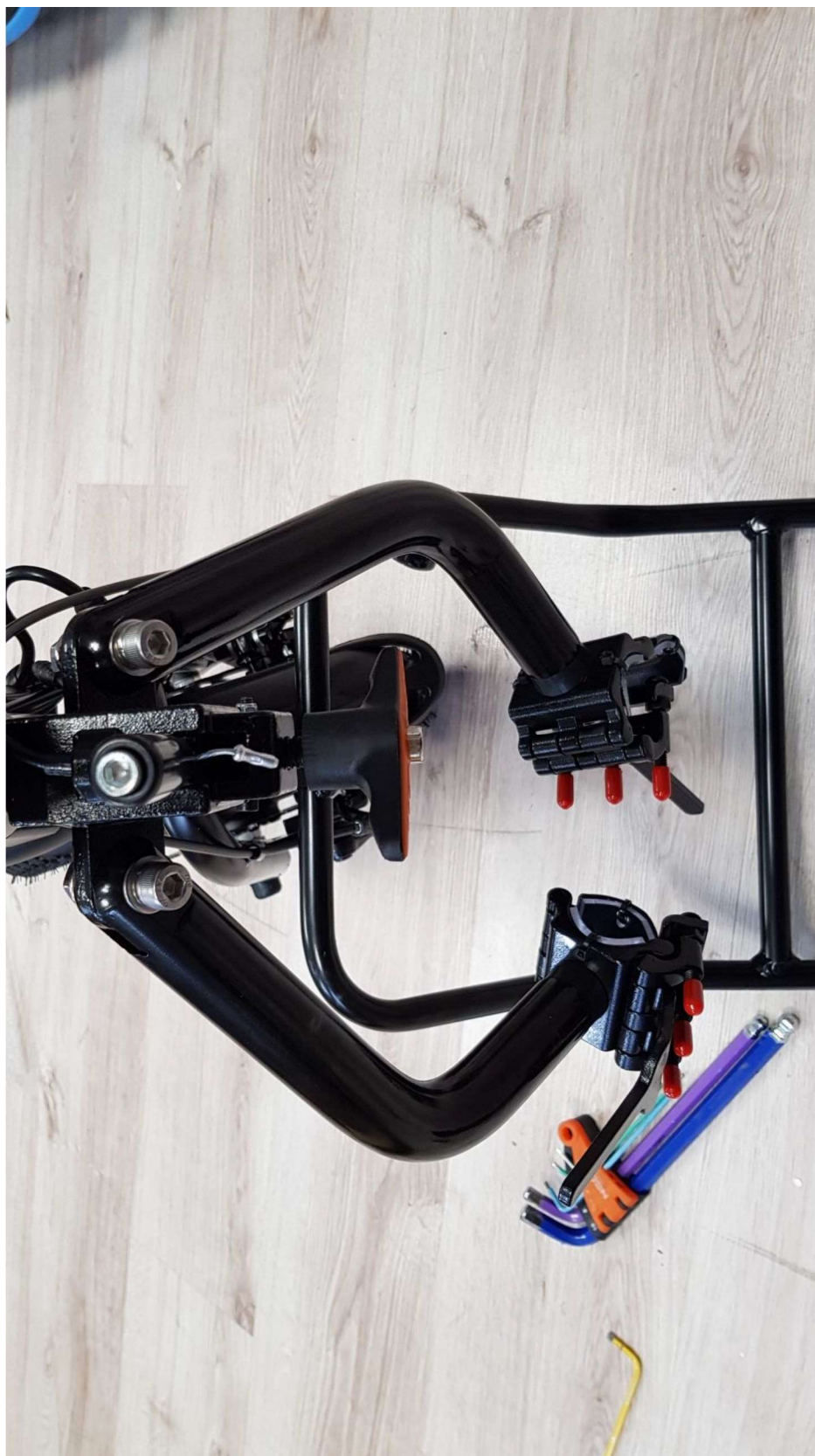

8. Přizpůsobte držáky rámu vozíku.



Demontáž elektrického pohonu Techlife W1:

1. Uvolněte oranžový motýlkový šroub.



2. Stiskněte brzdové paky a páčky parkovací brzdy.



**3. Přidržte blokovací tlačítko (se zavřeným visacím zámek), tlačte dopředu
Techlife W1 a směrujte vozík dolů.**

