

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Antidekubitní podsedáky

**REF: 0810010, 0810011 0810012, 0810013
0810014, 0810015, 0810016, 0810017,
0810230, 0810231, 0810232, 0810233**



REV 03/2023



Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu. Verze: F, 2022-12

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

Zamýšlené použití:

Tyto antidekubitní polštářky se vzduchovými buňkami nebo/a gelem uvnitř byly navrženy tak, aby redukovaly a oddalovaly vznik dekubitů.

Mohou být použity pro handicapované a starší osoby, které dlouhodobě udržují invalidní vozík a sedavý způsob života.

Může být také použit pro uživatele, kteří nemají žádné příznaky a chtějí nabídnout více pohodlí ve svém každodenním životě.

Při sezení na polštáři je důležité, aby uživatel dostal příležitost se co nejvíce zvedat, aby se omezilo trvalé stlačení pánve v blízkosti vyčnívajících kostí.

FUNKCE:

- Příjemný pocit a měkkost pro maximální ochranu měkkých tkání ,ergonomický design ,Lehký a snadno přenosný.
- Unikátní kombinace vzduchu a gelu (u příslušných verzí) poskytuje uživateli s proleženinami účinnou úlevu a komfort od tlaku
- Propojené vzduchové buňky poskytují vysoký tlak, zatímco gel (u příslušných verzí) nabízí nejen lepší komfort, ale také pomáhá udržovat tělesnou teplotu
- PU ochranný povlak pro snadné čištění (pouze pro kódy 0810010- 0810014)
- PVC ochranný povlak pro snadné čištění (pouze pro kódy 0810015-0810017 & 0810230-0810233)
- Snadné nastavení s nastavením vzduchu pro větší pohodlí, (pouze pro 0810010, 0810015,0810016,0810017,0810230, 0810231, 0810232, 0810233)

OBSAH BALENÍ:

- podsedák,obal
- OneRepair Kit. (pouze 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)
- vzduchová pumpa (pouze pro 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)

POKYNY K POUŽITÍ:

- 1.Umístěte podsedák na sedadlo.
2. Otevřete ventilký a nafoukněte polštář pomocí ruční pumpy a hadicové spojky a zavřete ventilek
- 3.Dvě přihrádky (pokud jsou k dispozici) lze nezávisle nastavit pro zvýšení polohy a stability nebo ovládání ze strany na stranu nebo zepředu dozadu (pro nastavení úhlu náklonu .
- 4.Posadte pacienta na podsedák
5. Doporučujeme každých 10 dní znovu upravit tlak polštáře.

ÚDRŽBA:

PODSEDÁK - Umyjte polštář antiseptickým mýdlem, otřete polštář mokrým hadříkem a poté osušte na vzduchu.

- Nepoužívejte detergenty ani jiná rozpouštědla.
- Nepoužívejte pračku ani nesusušte v sušičce.
- Nepoužívejte teplo ani parní autokláv.

POTAH:

- Prát na 30 °C, nežehlit.

Z hygienických důvodů by měl být každý polštář použit pouze pro jednoho pacienta.

DALŠÍ INSTRUKCE:

Pokud dojde k náhodnému propíchnutí polštáře, použijte opravnou sadu dodávanou s polštářem, nalepte náplast na správnou pozici, přitlačte opravnou záplatu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

CODE	NÁZEV		ROZMĚR	NOSNOST
0810010	Cushion COZY	AIR & GEL	41x41x5cm	130 Kg
0810011	Cushion GEL-TECH 3D I	GEL	42x40x2cm	130 Kg
0810012	Cushion GEL-TECH 3D II	GEL	46x42x2cm	130 Kg
0810013	Cushion GEL-TECH	GEL	40x40x1,6cm	130 Kg
0810014	Cushion GEL-TECH I	GEL	46x40x1,6cm	130 Kg
0810015	Cell Cushion PVC ERGO-LITE	AIR	46x40x6 & 10cm	110 Kg
0810016	Cell Cushion PVC Comfy II	AIR	40x40x8cm	130 Kg
0810017	Cell Cushion PVC Comfy I	AIR	46x40x8cm	130 Kg
0810230	AIR CELL CUSHION 35x41x5CM	AIR	35x41x5cm	130 Kg
0810231	AIR CELL CUSHION 41x41x5CM	AIR	41x41x5cm	130 Kg
0810232	AIR CELL CUSHION 47x41x5CM	AIR	47x41x5cm	130 Kg
0810233	AIR CELL CUSHION 47x47x5CM	AIR	47x47x5cm	130 Kg

MBK CODE	NÁZEV	MATE RIAL	VENTIL
0810010	Cushion COZY	PU	1
0810011	Cushion GEL-TECH 3D I	PU	BEZ
0810012	Cushion GEL-TECH 3D II	PU	BEZ
0810013	Cushion GEL-TECH	PU	BEZ
0810014	Cushion GEL-TECH I	PU	BEZ
0810015	Cell Cushion PVC ERGO-LITE	PVC	2
0810016	Cell Cushion PVC Comfy II	PVC	2
0810017	Cell Cushion PVC Comfy I	PVC	2
0810230	AIR CELL CUSHION 35x41x5CM	PVC	1
0810231	AIR CELL CUSHION 41x41x5CM	PVC	1
0810232	AIR CELL CUSHION 47x41x5CM	PVC	1
0810233	AIR CELL CUSHION 47x47x5CM	PVC	1

NÁHRADNÍ DÍLY:

MBK CODE	DESCRIPTION	SUITABLE:
0810021	COVER 41X41X5 (SP 0810010, 0810231)	0810010& 0810231
0810022	COVER 3D 42X40X2 (SP 0810011)	0810011
0810023	COVER 3D 46X42X2 (SP 0810012)	0810012
0810024	COVER 40X40X1,6 (SP 0810013)	0810013
0810025	COVER 46X40X1,6 (SP 0810014)	0810014
0810026	COVER 46X40X6/10 (SP 0810015)	0810015
0810027	COVER 40X40X8 (SP 0810016)	0810016
0810028	COVER 46X40X8 (SP 0810017)	0810017
0810234	COVER 35x41x5cm (SP 0810230)	0810230
0810235	COVER 47x41x5cm (SP 0810232)	0810232
0810236	COVER 47x47x5cm (SP 0810233)	0810233

POZOR!!!

- V blízkosti polštáře nekuřte a nepoužívejte žádný plamen a nevystavujte polštář přímému teplu.
- V blízkosti podsedáku nepoužívejte ostré předměty.
- Pokud potřebujete uložit polštář nejprve vyfoukněte (pouze pro 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)

- Chraňte díly před poškrábáním, proříznutím a proražením.
- V případě poškození nebo závady se prosím obraťte na svého autorizovaného a vyškoleného prodejce.
- Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu

MOBIAC S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.

MOBIAC S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním zařízení, musí být nahlášen výrobci.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš produkt je třeba vyměnit nebo vám již nefunguje, Je třeba zvážit ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem (to je také význam zobrazené recyklační značky).
- 2) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data zakoupení, 6 měsíců na ruční vzduchové čerpadlo a kryt. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na vady způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití produktu. Nezahrnuje také opotřebované díly a cokoli, co se během používání nebo časem poškodí.

Záruka se také nevztahuje na škody nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud je k dispozici) a přepravními společnostmi.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.



MOBIAC S.A

KATHIANA AKROTIRIOU, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiackcare.com
Symboly na etiketě, obalu či používání v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením