



NÁVOD K OBSLUZE: CHODÍTKA



REF: 0806508
0807998
0809396
0806507



Zamýšlené použití:

Chodítka mohou používat lidé s omezenou pohyblivostí pro cestování v rámci domova i mimo něj.

Montáž:

Chodítka jsou dodávána smontovaná a připravená k použití .

Další instrukce:

- 1) Chcete-li chodítko složit nebo rozložit, použijte rukojeti nebo tlačítko (pokud je k dispozici)
- 2) Při používání chodítka k sezení nebo vstávání zatlačte rukojeti dolů, aby chodítko zůstalo stát a neklouzalo. Když vystoupíte z chodítka, musíte se spolehnout na obě rukojeti stejně. Naklánění pouze k jedné rukojeti (bez doprovodu) může rukojeť poškodit.

Skladování a doprava:

Před uložením nebo přepravou chodítko zavřete a složte pomocí rukojetí nebo tlačítka

Údržba a čištění:

Každou část chodítka často čistěte. Na povrchy, které je třeba vyčistit, používejte pouze hadřík a jemné mýdlo. Poté použijte čistý hadřík a před použitím produktu dobře osušte. Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.

POZOR (!):

V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce. .

DŮLEŽITÉ (!)

Před použitím chodítka SE UJISTĚTE, že:

Chodítko je v plném vysunutí a v této poloze je zajištěno.

Kolečka (pokud jsou k dispozici) jsou pevně upevněna

Rukojeti jsou stejně vysoké a šrouby, které je připevňují k rámu, jsou utažené.

V rámu nejsou žádné praskliny.

Chodítko pravidelně čistěte. Nenechávejte chodítko mokré. Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru



Ochrana životního prostředí:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obraťte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktů.

Prohlášení o shodě:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient pobývá.

Záruka:

Na produkt je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu.

NEVZTAHUJE SE na části, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat. Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s dodávkami (pokud jsou relevantní), přepravci.

Reklamační formulář

Údaje o kupujícím

Jméno:.....

Datum nákupu:

.....S/N.....

LOT:.....Telefon:

Údaje o prodejci

Název:.....

.....

Adresa:.....

...

Telefon:

Razítko prodejce



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

1. Hliníkový rám
2. Skládací
3. Výškově nastavitelné
4. Gumová koncovka šedá kód: 0809553
5. Náhradní přední kolečko pro 0806507 kód: 0807621

						
1	0806508	53,5 cm	48 cm	48 cm	77-94 cm	100kg
2	0807998	54 cm	44 cm	37 cm	88-100 cm	100kg
3	0809396	54 cm	46 cm	46 cm	76-93 cm	100kg
4	0806507	60 cm	47 cm	52 cm	80-95 cm	100kg

1)



2)



	Obj.č.	POPIS	
1	0806508	Skládací chodítko	
2	0807998	Skládací chodítko se 2 úrovněmi rukojetí	
3	0809396	Skládací chodítko, vratný pohyb	
4	0806507	Skladací chodítko s koly	

3)



4)





zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením