



VÍCEJAZYČNÉ
MANUÁLY



GR EN

MOBIACARE®
MEDICAL EQUIPMENT

NÁVOD K POUŽITÍ: SKLÁPĚCÍ INVALIDNÍ VOZÍK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL: SKLÁPĚCÍ INVALIDNÍ VOZÍK

REF :0803400



REF :0803401



CE

January 25

[1]

URČENÉ POUŽITÍ

Invalidní vozíky jsou určeny k přepravě osob s tělesným nebo duševním postižením. Umožňují přepravu osob s pohybovými obtížemi nebo omezenou pohyblivostí a lze je používat k pohybu samotným pacientem (pokud mají velká zadní kola) nebo s pomocí doprovodu.

Pokud má invalidní vozík zadní kolo o průměru 50 až 60 cm a obruč pro ruce, může se uživatel pohybovat samostatně.

Pokud má invalidní vozík zadní kolo o průměru 13 až 40 cm a nemá obruč pro ruce, potřebuje uživatel k pohybu doprovod, který vozík tlačí pomocí madel umístěných na zadní straně vozíku.

SPECIFIKACE

Viz PŘÍLOHA A

ROZMĚRY

Viz PŘÍLOHA B

MONTÁŽ

Viz PŘÍLOHA C

SYMBOLY

Viz PŘÍLOHA D

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ani žádné dostupné volitelné vybavení, pokud jste si nejprve nepřečetli a plně neporozuměli tomuto návodu k použití.
- Pokud nejste schopni porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před použitím zařízení na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál; jinak může dojít ke zranění nebo poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, jsou-li v blízkosti dětí, a NEDOVOLTE dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Nepřekračujte maximální nosnost.
- Zvláštní opatrnost je vždy nutná v místech s pohyblivými částmi, které mohou způsobit zachycení končetin a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat invalidní vozík za jakékoli odnímatelné části.
- Samostatné usednutí do vozíku a vstávání z něj vyžaduje dostatečnou sílu a pohyblivost horní části těla.

DŮLEŽITÉ (!)

Konstrukce tohoto invalidního vozíku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Přesto může být uživatel při nesprávném používání vozíku vystaven riziku. Z důvodu vlastní bezpečnosti je nutné dodržovat následující pravidla. Neodborné nebo nesprávné úpravy či nastavení mohou zvýšit riziko nehody.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli dobře viditelní.
- Při první jízdě s tímto invalidním vozíkem buďte opatrní.
- Seznamte se se svým invalidním vozíkem.
- Používejte invalidní vozík na rovném povrchu i při jízdě do kopce a z kopce.
- Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, pokud byste je museli zvedat z podlahy mezi kolena.
- Nepokoušejte se dosáhnout na předměty, pokud byste se kvůli tomu museli posunout na sedadle.
- Nepoužívejte vozík na silnicích ani dálnicích.
- Nepokoušejte se vyjíždět nebo sjíždět svah s vodou, ledem nebo mazivem.
- Používejte pouze příslušenství nebo adaptéry schválené společností MOBIAK.
- Nestoupejte na rám invalidního vozíku.

PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zajištěno bezpečné používání výrobku. Na rámu nesmí být praskliny ani zlomeniny.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
- Zkontrolujte, zda je sedadlo zcela otevřené. Pokud není, zatlačte sedadlo dolů za boční části rámu.
- Zkontrolujte správnou funkci brzdy.
- Vždy kontrolujte stav opotřebení mechanických částí, aby bylo zajištěno bezpečné používání výrobku pro osoby i předměty.
- Pokud jsou použity rychloupínací osy, zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny.
- Zkontrolujte pneumatiky, jejich tlak (pokud jsou nafukovací) a brzdy kol. Brzdy nebudou správně fungovat, pokud je tlak příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a brzdou příliš velká.

JAK USEDNOUT DO INVALIDNÍHO VOZÍKU:

1. Umístěte vozík co nejbližší k sobě.
2. Zajistěte kola brzdami.
3. Uchopte se bočních částí a pomalu usedněte na sedadlo.

JAK VSTÁT Z INVALIDNÍHO VOZÍKU:

1. Umístěte vozík co nejbližší k místu, kam se budete přesouvat.
2. Zajistěte kola brzdami.
3. Opírejte se rovnoměrně o obě madla. Opírání pouze o jednu ruku (bez doprovodu) může způsobit poškození nebo zranění.
4. Přeneste váhu těla na místo, kam se budete přesouvat.

ÚDRŽBA

Pravidelná kontrola níže uvedených postupů pomůže zachovat životnost a účinnost vašeho invalidního vozíku.

TÝDNĚ

1. Zkontrolujte tlak v kolech podle pokynů uvedených na kolech, pokud jsou nafukovací.
2. Zkontrolujte, zda je centrální šroub příčného ramene utažený a v dobrém stavu.
3. Čalounění čistěte mýdlovou vodou nebo vhodnými čistícími prostředky (u koženého sedadla suchým hadříkem).
4. Kovové části vozíku čistěte suchým hadříkem nebo speciálními prostředky na chromované či lakované povrchy.
5. Zkontrolujte zajištění kol a v případě potřeby je seřídte.
6. Zkontrolujte opotřebení předních a zadních kol.

ČTVRTLETNĚ

1. Zkontrolujte a v případě potřeby seřídte vidlice kol, osu a úchyty kol.
2. Promažte tukem nebo olejem všechny součásti vystavené tření nebo hrozícímu opotřebení.
3. Ujistěte se, že všechny matice a šrouby jsou dobře utažené, ale ne příliš.
4. Proveďte celkovou kontrolu stavu vozíku a opravte vše, co je nutné.

ROČNĚ

1. Doporučujeme jednou ročně provést kompletní kontrolu u kvalifikovaného poskytovatele servisu.
2. Z důvodu bezpečnosti pacienta doporučujeme nechat vozík každé 2 roky zkontrolovat výrobcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ

Kromě údržby a kontroly lze důkladně čistit rám i čalounění.

- Pro zachování vzhledu je třeba čalounění pravidelně čistit.
- Nečistoty lze odstranit houbou a jemným čisticím prostředkem s teplou vodou; čistěte ve směru struktury materiálu.
- Před sušením opláchněte čistou vodou.
- **NENECHÁVEJTE** vozík moký.
- Čalounění nedávejte do sušičky. Při silném znečištění čistěte povrch měkkým kartáčem.
- Rám pravidelně čistěte jemným čisticím prostředkem.
- Vozíky s koženým sedadlem čistěte suchým hadříkem.
- Kola čistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Mokrá kola jsou nebezpečná pro používání vozíku.
- Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.
- Chraňte výrobek před oděrkami, řezy a propíchnutím.



POZOR (!)

- V případě problému výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**, dokud nebude závada odstraněna, a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Používání tohoto výrobku k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu, je zakázáno.
- **MOBIAS S.A.** odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku nebo jeho použitím k jinému než uvedenému účelu.
- **MOBIAS S.A.** si vyhrazuje právo měnit výrobek a informace v tomto návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.
- Rozměry výrobků se mohou lišit v rozmezí $\pm 3\%$.



ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka správné funkce po dobu dvou (2) let od data zakoupení.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a **NEVZTAHUJE** se na poškození způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením pokynů k použití výrobku. Nevztahuje se ani na opotřebitelné části, jako jsou čalounění, kola nebo brzdy, které se mohou používáním nebo časem opotřebovat.

Záruka se nevztahuje ani na škody nebo vady způsobené přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou či opravou, problémy s napájením (pokud se na výrobek vztahují) nebo přepravními společnostmi.

Žádná práce ani náhradní díl není kryt zárukou, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisem nebo výrobcem výrobku. Náklady na přepravu za účelem kontroly hradí uživatel/zákazník nebo maloobchodní prodejce.

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM			
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:			
DATUM NÁKUPU:	TELEFON:		
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT:			
ÚDAJE O PRODEJCI			
NÁZEV:			
ADRESA:			
TELEFON:			
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE			

HLÁŠENÍ INCIDENTU:

--

Jakýkoli závažný incident související s používáním zařízení musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient bydlí.



MOBIAC S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



URČENÉ POUŽITÍ

Invalidní vozíky jsou určeny k přepravě osob s tělesným nebo duševním postižením. Umožňují přepravu osob s pohybovými obtížemi nebo omezenou pohyblivostí a lze je používat k pohybu samotným pacientem (pokud mají velká zadní kola) nebo s pomocí doprovodu.

Pokud má invalidní vozík zadní kolo o průměru 50 až 60 cm a obruč pro ruce, může se uživatel pohybovat samostatně.

Pokud má invalidní vozík zadní kolo o průměru 13 až 40 cm a nemá obruč pro ruce, potřebuje uživatel k pohybu doprovod, který vozík tlačí pomocí madel umístěných na zadní straně vozíku.

ROZMĚRY

Viz PŘÍLOHA B

MONTÁŽ

Viz PŘÍLOHA C

SYMBOLY

Viz PŘÍLOHA D

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek ani žádné dostupné volitelné vybavení, pokud jste si nejprve nepřečetli a plně neporozuměli tomuto návodu k použití.
- Pokud nejste schopni porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před použitím zařízení na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál; jinak může dojít ke zranění nebo poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, jsou-li v blízkosti dětí, a **NEDOVOLTE** dětem, aby si s výrobkem hrály.
- **Nepřekračujte** maximální nosnost.
- Zvláštní opatrnost je vždy nutná v místech s pohyblivými částmi, které mohou způsobit zachycení končetin a zranění.
- **Nepokoušejte se zvedat** invalidní vozík za jakékoli odnímatelné části.
- Samostatné usednutí do vozíku a vstávání z něj vyžaduje dostatečnou sílu a pohyblivost horní části těla.

Konstrukce tohoto invalidního vozíku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezpečnost. Přesto může být uživatel při nesprávném používání vozíku vystaven riziku. Z důvodu vlastní bezpečnosti je nutné dodržovat následující pravidla. Neodborné nebo nesprávné úpravy či nastavení mohou zvýšit riziko nehody.

- Při pohybu na tmavých místech vždy noste světlé oblečení, abyste byli dobře viditelní.
- Při první jízdě s tímto invalidním vozíkem buďte opatrní.
- Seznamte se se svým invalidním vozíkem.
- Používejte invalidní vozík na rovném povrchu i při jízdě do kopce a z kopce.
- **Nepokoušejte se dosáhnout na předměty**, pokud byste je museli zvedat z podlahy mezi kolena.
- **Nepokoušejte se dosáhnout na předměty**, pokud byste se kvůli tomu museli posunout na sedadle.
- **Nepoužívejte** vozík na silnicích ani dálnicích.
- **Nepokoušejte se vyjždět nebo sjíždět svah s vodou, ledem nebo mazivem.**
- Používejte pouze příslušenství nebo adaptéry schválené společností MOBIAK.
- **Nestoupejte na rám** invalidního vozíku.

PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zajištěno bezpečné používání výrobku. Na rámu nesmí být praskliny ani zlomeniny.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
- Zkontrolujte, zda je sedadlo zcela otevřené. Pokud není, zatlačte sedadlo dolů za boční části rámu.
- Zkontrolujte správnou funkci brzdy.
- Vždy kontrolujte stav opotřebení mechanických částí, aby bylo zajištěno bezpečné používání výrobku pro osoby i předměty.
- Pokud jsou použity rychloupínací osy, zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny.
- Zkontrolujte pneumatiky, jejich tlak (pokud jsou nafukovací) a brzdy kol. Brzdy nebudou správně fungovat, pokud je tlak příliš nízký nebo je mezera mezi pneumatikou a brzdou příliš velká.

VAROVÁNÍ!

Následující postupy smí provádět pouze zkušení uživatelé. Pokud nemáte zkušenosti, požádejte o pomoc doprovod.

JAK USEDNOUT DO INVALIDNÍHO VOZÍKU:

1. Umístěte vozík co nejbližší k sobě.
2. Zajistěte kola brzdami.
3. Opřete se rukama o rám a pomalu klesejte na sedadlo.

1. Umístěte vozík co nejbližší k sedadlu, na které se budete přesouvat.
2. Zajistěte kola brzdami.
3. Opírejte se rovnoměrně o obě madla. Opírání pouze o jednu ruku bez doprovodu může způsobit zranění.
4. Přeneste váhu těla na sedadlo, na které se přesouváte.

DALŠÍ POKYNY:

1. Vždy používejte výtahy a rampy. Pokud nejsou k dispozici, můžete se do cíle dostat s pomocí dvou doprovázejících osob. Ty musí vozík zvedat za pevné části rámu. Vozík se nikdy nesmí zvedat s cestujícím vsedě. Smí se pouze tlačit.
2. Vyhybejte se schodům nebo překážkám; jinak požádejte o pomoc doprovod.
3. Tento vozík je určen pouze k přepravě jedné osoby na sedadle.
4. Uživatelé nesmějí sedět ve vozíku při přepravě jakýmkoli dopravním prostředkem.
5. Zadní kola mají brzdy, které musí být zajištěny, když se vozík nepohybuje.
6. NESTOUEJTE na stupačky při usedání ani vstávání – NEBEZPEČÍ PŘEVRAČENÍ. Stupačky slouží k opření nohou při sezení.
7. NEDOTÝKEJTE se pohyblivých částí během pohybu – NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ.

ÚDRŽBA:

Pravidelná kontrola níže uvedených postupů pomůže zachovat životnost a účinnost vašeho invalidního vozíku.

TÝDNĚ

1. Zkontrolujte tlak v kolech podle pokynů uvedených na kolech, pokud jsou nafukovací.
2. Zkontrolujte, zda je centrální šroub příčného ramene utažený a v dobrém stavu.
3. Čalounění čistěte mýdlovou vodou nebo vhodnými čisticími prostředky (u koženého sedadla suchým hadříkem).
4. Kovové části vozíku čistěte suchým hadříkem nebo speciálními prostředky na chromované či lakované povrchy.
5. Zkontrolujte zajištění kol a v případě potřeby je seřídte.
6. Zkontrolujte opotřebení předních a zadních kol.

ČTVRTLETNĚ

1. Zkontrolujte a v případě potřeby seřídte vidlice kol, osu a úchyty kol.
2. Promažte tukem nebo olejem všechny součásti vystavené tření nebo hrozícímu opotřebení.
3. Utáhněte šrouby a matice.
4. Proveďte celkovou kontrolu stavu vozíku a proveďte potřebné opravy.

ROČNĚ

ROČNĚ

1. Doporučujeme jednou ročně provést kompletní kontrolu u kvalifikovaného poskytovatele servisu.
2. Z důvodu bezpečnosti pacienta doporučujeme nechat vozík každé 2 roky zkontrolovat výrobcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.

ČIŠTĚNÍ

Kromě údržby a kontroly lze důkladně čistit rám i čalounění.

- Pro zachování vzhledu je třeba čalounění pravidelně čistit.
- Nečistoty lze odstranit houbou a jemným čisticím prostředkem s teplou vodou; čistěte ve směru struktury materiálu.
- Před sušením opláchněte čistou vodou.
- **NENECHÁVEJTE** vozík moký.
- Čalounění nedávejte do sušičky. Při silném znečištění čistěte povrch měkkým kartáčem.
- Rám pravidelně čistěte jemným čisticím prostředkem.
- Vozíky s koženým sedadlem čistěte suchým hadříkem.
- Kola čistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Mokrá kola jsou nebezpečná pro používání vozíku.
- Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek.
- Chraňte výrobek před oděrkami, řezy a propíchnutím.



POZOR (!)

- V případě problému výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**, dokud nebude závada odstraněna, a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Používání tohoto výrobku k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu, je zakázáno.
- **MOBIAC S.A.** odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku nebo jeho použitím k jinému než uvedenému účelu.
- **MOBIAC S.A.** si vyhrazuje právo měnit výrobek a informace v tomto návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.
- Rozměry výrobků se mohou lišit v rozmezí ± 3 %.



ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka správné funkce po dobu dvou (2) let od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje ani na škody nebo vady způsobené přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou či opravou, problémy s napájením (pokud se na výrobek vztahují) nebo přepravními společnostmi.

Žádná práce ani náhradní díl není kryt zárukou, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisem nebo výrobcem výrobku. Náklady na přepravu za účelem kontroly hradí uživatel/zákazník nebo maloobchodní prodejce.

ZÁRUČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM	
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	
DATUM NÁKUPU:	TELEFON:
SÉRIOVÉ ČÍSLO:	
LOT:	
ÚDAJE O PRODEJCI	
NÁZEV:	
ADRESA:	
TELEFON:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE	

HLÁŠENÍ INCIDENTU:

Jakýkoli závažný incident související s používáním zařízení musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient bydlí.



MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



PŘÍLOHA A - SPECIFIKACE


0803400 SKLOPENÝ INVALIDNÍ VOZÍK 24" „DIONE I“
0803401 SKLOPENÝ INVALIDNÍ VOZÍK 12" „DIONE II“

RÁM	OCEL	OCEL
SKLOPENÍ OPĚRADLA	NASTAVITELNÉ OD 95° DO 145°	NASTAVITELNÉ OD 95° DO 145°
VÝŠKA OPĚRADLA NASTAVITELNÁ	NASTAVITELNÁ	NASTAVITELNÁ
SEDADLO	POHODLNÉ, S NASTAVITELNOU HLOUBKOU SEDADLA	POHODLNÉ, S NASTAVITELNOU HLOUBKOU SEDADLA
SKLON SEDADLA	NASTAVITELNÝ SKLON SEDADLA OD 0° DO 32°	NASTAVITELNÝ SKLON SEDADLA OD 0° DO 32°
LOKETNÍ OPĚRKY	NASTAVITELNÉ NA VÝŠKU A ŠÍŘKU, S POHODLNOU PODUŠKOU	NASTAVITELNÉ NA VÝŠKU A ŠÍŘKU, S POHODLNOU PODUŠKOU
BOČNÍ PANELE	NASTAVITELNÉ NA VÝŠKU A ŠÍŘKU	NASTAVITELNÉ NA VÝŠKU A ŠÍŘKU
OPĚRA HRUDNÍKU	ODNÍMATELNÁ, NASTAVITELNÁ	ODNÍMATELNÁ, NASTAVITELNÁ
STUPAČKY	ODNÍMATELNÉ, VÝKLOPNÉ A S NASTAVITELNOU DĚLKOU, S OPĚRNOU PODUŠKOU	ODNÍMATELNÉ, VÝKLOPNÉ A S NASTAVITELNOU DĚLKOU, S OPĚRNOU PODUŠKOU
OPĚRA KOLEN	OTOČNÁ OPĚRA KOLEN, NASTAVITELNÁ, S PODUŠKOU	OTOČNÁ OPĚRA KOLEN, NASTAVITELNÁ, S PODUŠKOU

DĚLIČ NOHOU	NASTAVITELNÝ DĚLIČ NOHOU	NASTAVITELNÝ DĚLIČ NOHOU
ZADNÍ KOLA	24" PLNÁ, S DRÁTĚNÝMI KOLY A QUICK RELEASE	12" PLNÁ, QUICK RELEASE
PŘEDNÍ KOLA	8"x2" (200×50 mm) PLNÁ	8"x2" (200×50 mm) PLNÁ
KOLEČKA PROTI PŘEVŘÁCENÍ	SOUČÁST DODÁVKY	SOUČÁST DODÁVKY
BRZDY A MADLO PRO DOPROVOD	SOUČÁST DODÁVKY	SOUČÁST DODÁVKY
MAX. HMOTNOST UŽIVATELE	150 kg	150 kg
OPĚRKA HLAVY	NASTAVITELNÁ VÝŠKA, ŠÍŘKA A ÚHEL	NASTAVITELNÁ VÝŠKA, ŠÍŘKA A ÚHEL
BEZPEČNOSTNÍ PÁS	SOUČÁST DODÁVKY	SOUČÁST DODÁVKY
MATERIÁL ČALOUNĚNÍ, PODUŠKY SEDADLA A OPĚRKY HLAVY	POLYURETANOVÁ (PU) PĚNA (UVNITŘ) S NYLONOVOU PODŠÍVKOU	POLYURETANOVÁ (PU) PĚNA (UVNITŘ) S NYLONOVOU PODŠÍVKOU


REF :0803400



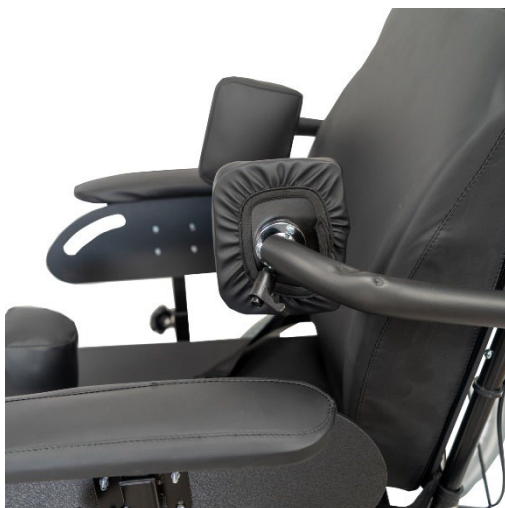

REF :0803401



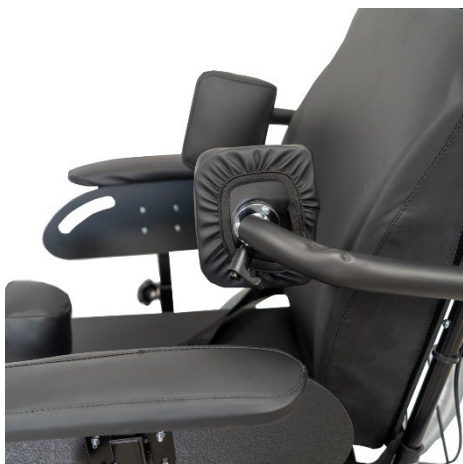

PŘÍLOHA B - ROZMĚRY

											CELKOVÁ HMOTNOST
0803400 *49,5-51,5 cm	37-43 cm	40-48 cm	52,5-59 cm	*62-72,5 cm	121 cm	114-134 cm	56 cm	24" 8"	150 kg	40 kg	45 kg
0803401 *49,5-51,5 cm	41-52,5 cm	40-52 cm	52,5-59 cm	*52-72,5 cm	121 cm	114-134 cm	56 cm	12" 8"	150 kg	38 kg	43 kg

* Hloubka sedadla je nastavitelná. Poduška sedadla má hloubku 49,5 cm. Viz PŘÍLOHA C - MONTÁŽ.

** Výška opěradla je nastavitelná. Poduška opěradla má výšku 56 cm. Viz PŘÍLOHA C - MONTÁŽ.

MĚŘENÍ S OPĚRKOU HLAVY V MAXIMÁLNÍ VÝŠCE		
	84 cm	134 cm

PŘÍLOHA C - MONTÁŽ


Invalidní vozík, který máte před sebou, se může lišit od vozíku na následujících fotografiích. Postup montáže je podobný.

Vyjměte výrobek z kartonu a rozložte jej.

Umístěte stupačky do určených poloh.

Otočte stupačku dopředu, dokud páčka uvolnění nezapadne (zřetelné cvaknutí).

Chcete-li stupačky odstranit, stiskněte páčku uvolnění. Otočte stupačku zpět do strany a zvedněte ji nahoru.

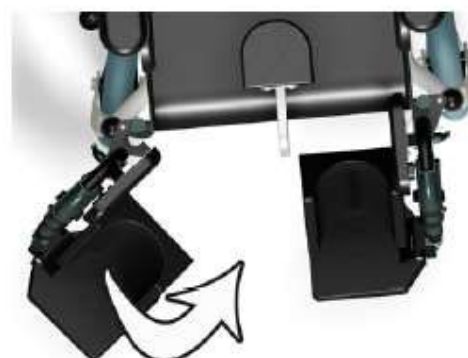

Montáž a nastavení bočního panelu

Zajistěte vozík brzdami.

Odšroubujte šroub, vložte boční panel do vodítka rámu a nastavte jej do požadované polohy. Šroub znovu utáhněte.





Montáž a nastavení opěrky hlavy

Vložte opěrku hlavy do určené trubky na opěradle.

Nastavte opěrku hlavy do požadované polohy. Nakonec utáhněte šroub.

Nastavení výšky opěrky hlavy: Povolte šroub. Vložte opěrku hlavy do určené trubky na opěradle. Nastavte ji do požadované polohy a šroub znovu utáhněte. Poté nastavte požadovanou výšku a šroub znovu utáhněte.

Nastavení hloubky opěrky hlavy: Povolte šroub. Posuňte opěrku hlavy po tyči do požadované hloubky. Nakonec šroub znovu utáhněte.

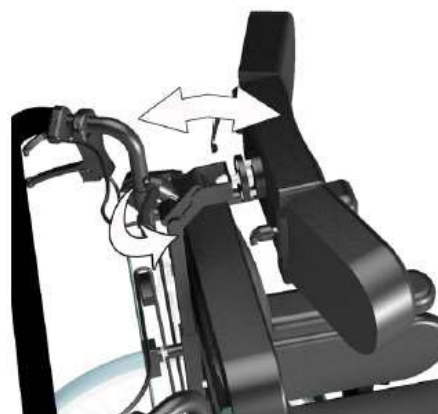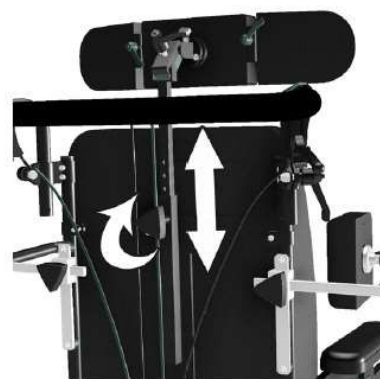

Montáž opěry hrudníku

Zajistěte vozík brzdami. Zasuňte opěry hrudníku do příslušného vodítka. Nakonec pevně utáhněte šrouby na obou stranách.



Montáž podušky opěradla

Zajistěte vozík brzdami. Podušku opěradla lze připevnit k opěradlu pomocí pásků Velcro.






Montáž podušky sedadla

Zajistěte vozík brzdami. Podušku sedadla lze připevnit pomocí pásků Velcro.



Kolečka proti převrácení

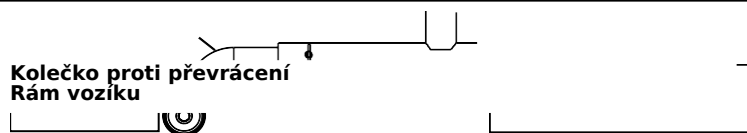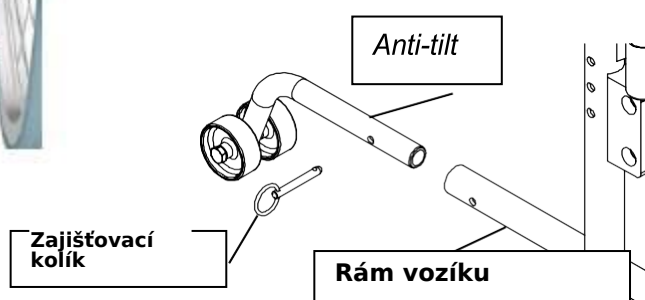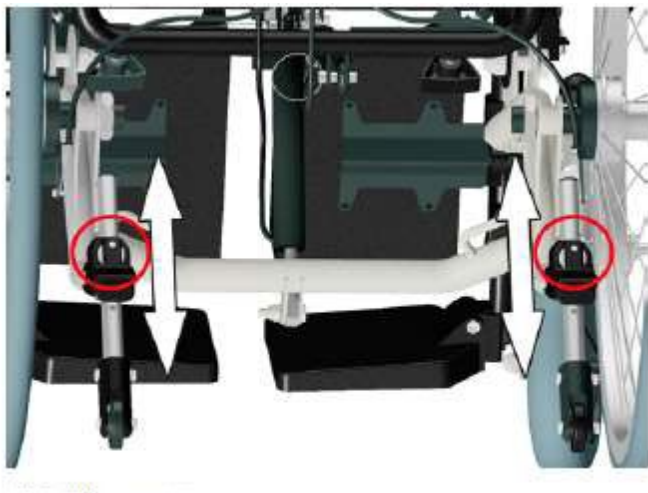

Namontujte kolečka proti převrácení podle výše uvedeného schématu.

Zajistěte kolečka proti převrácení k rámu vozíku pomocí zajišťovacích kolíků (nebo „C“ klipů).

Ujistěte se, že zajišťovací kolíky (nebo „C“ klipy) procházejí kolečky proti převrácení i rámem vozíku.

Před jízdou přes schod nebo obrubník vždy kolečka proti převrácení deaktivujte.

Nikdy na kolečka proti převrácení nestoupejte.

Nastavení stupaček

Zajistěte vozík brzdami. Uvolněte páčku a nastavujte stupačky nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu. Páčku znovu utáhněte.



Otočná poduška opěry kolen

Zajistěte vozík brzdami. Podušku opěry kolen lze otočit o 90°. Uvolněte páčku (slouží také k nastavení požadovaného úhlu stupačky), otočte podušku opěry kolen a páčku znovu utáhněte.



Nastavení délky stupaček

Délku stupaček lze nastavit do 4 poloh. Povolte upevňovací šroub. Nastavte stupačku do požadované polohy a šroub znovu utáhněte.



Nastavení výšky podušky lýtky

Podušku lýtky lze posouvat nahoru nebo dolů. Otočte podušku směrem ven a poté ji posuňte do požadované polohy.




Nastavení polohy podušky lýtky

Podušku lýtky lze posouvat dopředu nebo dozadu. Povolte šroub a vložte jej do požadovaného otvoru.



Nastavení hloubky sedadla

Hloubku sedadla lze nastavit posunutím sedací části dopředu nebo dozadu. Sejměte podušku a povolte 4 šrouby sedadla na spodní straně, přičemž z horní strany šrouby přidržujte. Poté nastavte hloubku u stupáček pomocí otočných adaptérů, aby bylo možné sedadlo posouvat dopředu a dozadu. Nastavte požadovanou polohu. Poté šrouby a otočné adaptéry znovu utáhněte.

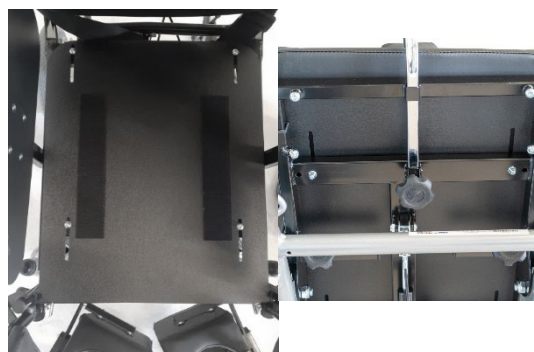

Nastavení výšky opěradla

Výšku opěradla lze nastavit posunutím části opěradla nahoru nebo dolů. Sejměte podušku opěradla a povolte 4 šrouby vodítek. Nastavte opěradlo do požadované polohy. Poté šrouby znovu utáhněte a nasadte podušku opěradla.



Nastavení výšky předních kol

Výšku předních kol lze nastavit do 3 poloh. Demontujte šroubové spojení os kol. Nastavte kola do požadované polohy a šroubové spojení znovu utáhněte.






Nastavení sklonu sedadla

Zajistěte vozík brzdami. Sedadlo lze naklonit dopředu pro snadnější nastupování a vystupování z vozíku. Stiskněte malou páčku na madlech pro tlačení a zatlačte vozík dopředu. Sedadlo se vpředu sklopí dolů. Chcete-li sedadlo naklonit dozadu, stiskněte páčku a zatlačte madlo pro tlačení dolů.



Nastavení sklonu opěradla

Zajistěte vozík brzdami. Opěradlo může doprovod nastavovat v rozsahu od -6° do 70° . Stiskněte malou páčku na madlech pro tlačení a zatlačením na opěradlo jej nastavte do požadované polohy.

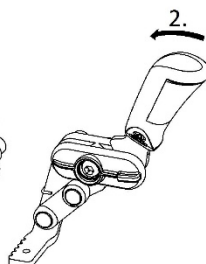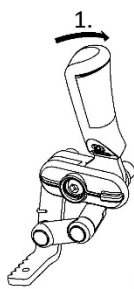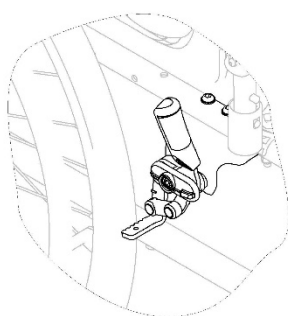

Parkovací brzdy slouží k zajištění invalidního vozíku, když stojí, aby se zabránilo jeho rozjetí.

Chcete-li brzdu aktivovat, zatlačte dlaní páčku brzdy dopředu. (1)

Chcete-li brzdu uvolnit, zatáhněte páčku brzdy prsty dozadu. (2)

Nikdy neaktivujte parkovací brzdy během jízdy. Neaktivujte parkovací brzdy za účelem zpomalení vozíku. Neopírejte se o parkovací brzdy při podepírání nebo přesunu. Při používání brzdy držte prsty mimo pohyblivé části a ruku vždy na páčce brzdy.

ΠΡÍΛΟΗΑ D - SYMBOLY

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive