



NÁVOD K OBSLUZE: HRAZDA MONKEY SE ZÁKLADNOU

MOBIACARE®
M E D I C A L E Q U I P M E N T

REF: 0808195

CE

Zamýšlené použití:

Hrazda je určena především lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko a potřebují pomoc při vstávání z polohy na zádech v sedě. Jedná se o příslušenství pečovatelského nebo nemocničního lůžka, které je nabízeno samostatně, je volitelné a je určeno pouze pro vnitřní použití. Doporučuje se umístit hrazdu za opěrku hlavy a ne na stranu postele. K připevnění produktu na stěnu nebo postel není potřeba žádné další příslušenství.

Pozor: Použití hrazdy není vhodné pro všechny uživatele. Poradte se prosím se svým terapeutem.

Obecná upozornění:

Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, je lepší nepoužívat tento produkt ani jinou dostupnou součást.

Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození.

Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.

Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti děti, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.

Před použitím:

1. Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Na rámu nejsou žádné praskliny)
2. Zkontrolujte, zda je výrobek správně sestaven.
3. Dávejte pozor na zajištění knoflíků a šroubů. Ujistěte se, že povrch podlahy, který bude podpírat produkt, je rovný
4. Seřizovací operace provádějte bez zatížení. Vždy pomáhajte uživateli během provozu

Údržba a čištění:

Po každém použití očistěte povrch výrobku měkkým hadříkem.

Z povrchu produktu musí být odstraněny nečistoty, olej nebo zbytky. Na povrchy, které je třeba vyčistit, používejte pouze hadřík a jemné mýdlo. Poté použijte čistý hadřík a před použitím produktu dobře osušte. Nenechávejte výrobek mokrá. Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční prostředek



POZOR (!):

V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu **NEPOUŽÍVEJTE** produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.

Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu

MOBIAK S.A. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu. MOBIAK S.A. si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění

Existuje $\pm 3 \%$. Odchylka rozměrů produktů



Ochrana životního prostředí:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obratě se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

Prohlášení o shodě:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a tam, kde je to vhodné, normy a právní předpisy, na které se odkazuje. Hlášení incidentů: Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

Záruka:

Na produkt je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu.

Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s dodávkami (pokud jsou použitelné), dopravci.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

ÚDAJE O KUPUJÍCÍM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
DATUM NÁKUPU:		TELEFON	
SÉRIOVÉ ČÍSLO:			
LOT :			

ÚDAJE O PRODEJCI

JMÉNO A PŘÍJMENÍ			
ADRESA			
TELEFON			
		PODPIS A RAZÍTKO	



MOBIAK S.A

KΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE


T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com




0808195

HRAZDA SE ZÁKLADNOU

Rám	ocelový
Barva	bílá
Rozměry balení (VxŠxH)	129x43x27 cm
Výška od země	174 cm
Síře základny	106 cm
Délka základny	135 cm
Max.nosnost	136 Kg
Hmotnost	23 Kg
S plastovou rukojetí (kód náhradního dílu: 0810573)	

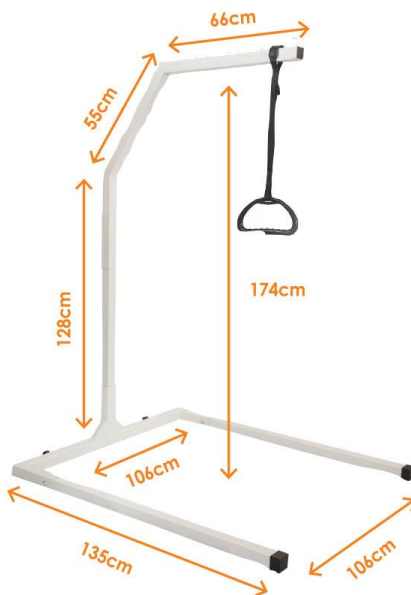


1/ Instalační díly hrazdy

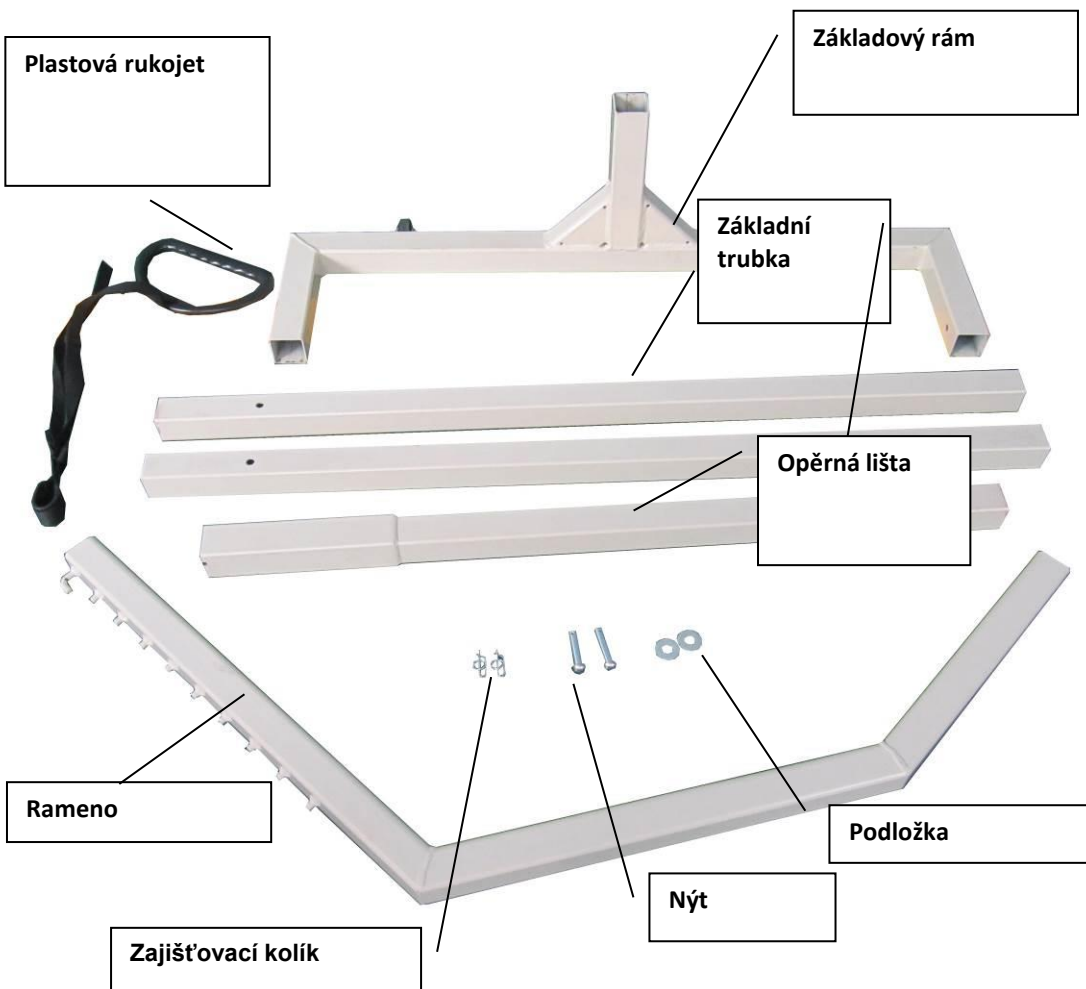

Obrázek č. 1

Vložte základní trubku do otvorů základního rámu tak, aby odpovídaly otvoru pro nýt, prostrčte nýt s podložkou a pojistným kolíkem jako na obrázku č. 2.

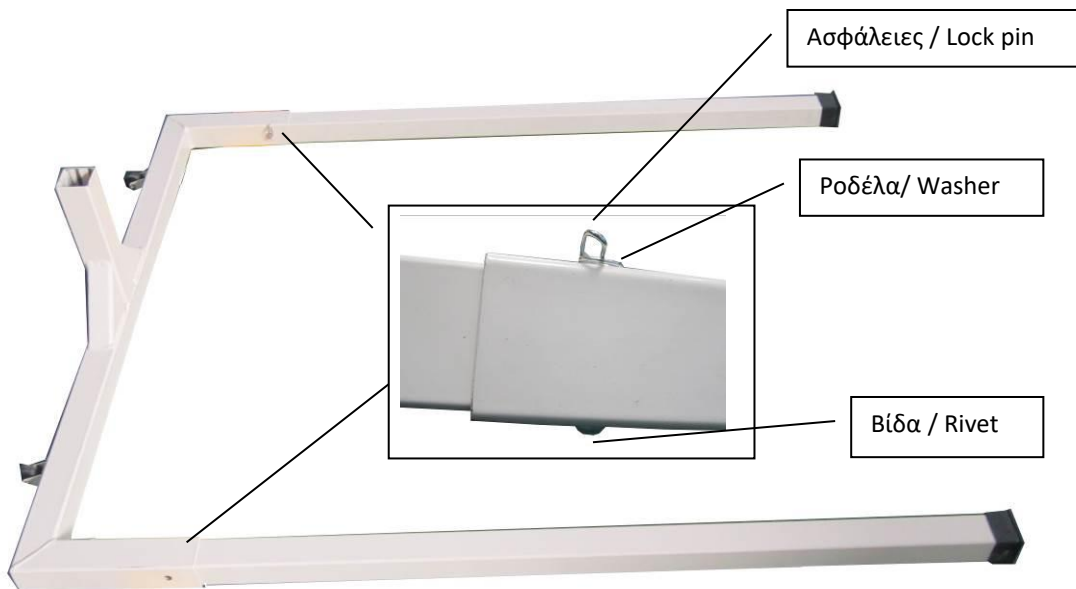

Obrázek č.2

Nainstalujte opěrnou tyč podle obrázku č. 3.



Obrázek č.3

Nainstalujte rameno podle
obrázku č. 4.



Obrázek č.4

Nasad'te plastovou rukojeť podle
obrázku č. 5.



Obrázek č.5

Na základním rámu jsou 2 ks
koleček pro přesun. Lehce
nakloňte hrazdu, abyste se
ujistili, že se kolečka dotýkají
země, jemně na ni zatlačte, aby
se pohybovala jako na obrázku č.
6.



Obrázek č.6



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením