



**MOBIAK®**  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ref:0806235

VANIČKA NA MYTÍ HLAVY S PUMPOU

Ref:0806232

VAK NA SPRCHOVÁNÍ



Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité bezpečnostní pokyny

**ÚČEL POUŽITÍ:**Tento produkt umožňuje mýt vlasy lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko.Může ji také používat kdokoli a jako přenosnou vanu.

**OBSAH:**

1. Nafukovací umyvadlo s hadicí pro snadné vypouštění vody.
2. Plastová trubice a šňůra.



Vanička



Vak na sprchování

**CHARAKTERISTIKA:**

1. Koupelnové umyvadlo, dvojitě vyztužené pro větší odolnost a pohodlí.K dispozici také s vypouštěcím ventilem a hadicí pro snadné a rychlé vypouštění vody.S vodním vakem pro případ nepřístupného přístupu ke zdroji vody, volitelně (0806232)

**NÁVOD NA PŘÍPRAVU K POUŽITÍ:**

1. Nafoukněte umyvadlo. Chcete-li jej vypustit, držte ventil a boční stěny stlačené, dokud se zcela nevypustí .
2. Umístěte umyvadlo na rovný povrch.
3. Umístěte vypouštěcí hadici do umyvadla nebo dřezu, ujistěte se, že je níže než umyvadlo, aby voda neprotékala.

4. Otevřete vypouštěcí ventil při používání umyvadla k vypouštění vody

5. Umístěte umyvadlo pod krk uživatele, dokud se nebude cítit pohodlně.



POZNÁMKA: Vyobrazený vak na vodu je volitelný (0806232)



Vak na vodu

#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí: Nelikvidujte svůj výrobek spolu s ostatním komunálním odpadem. Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktu.

## POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Umyjte umyvadlo jemným antiseptickým mýdlem. Očistěte jej vlhkým hadříkem, opláchněte čistou vodou a poté osušte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiná rozpouštědla. Neperte jej v pračce a k sušení nepoužívejte sušičku. K čištění nepoužívejte parní čistič.

### POZOR (!):

V případě poškození nebo nesprávné funkce vašeho produktu **NEPOUŽÍVEJTE** produkt a kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce. Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu. MOBIAK S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění Existuje  $\pm 3\%$  Odchylka rozměrů produktů.

### OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, je lepší nepoužívat tento produkt ani jinou dostupnou součást. Pokud nerozumíte použití nebo bezpečnostním opatřením, obraťte se před použitím produktu na prodejce nebo příslušnou technickou osobu, protože může dojít k poškození. Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla. Uchovejte tento dokument pro budoucí použití. Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti děti, a nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nepokoušejte se zvedat výrobek za odnímatelné části. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.

## ZÁRUKA:

Na produkt je poskytována záruka po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEVZTAHUJE se na škody způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze produktu. Také se NEVZTAHUJE na díly, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (pokud je to relevantní) a dopravci. Není použit žádný servis nebo náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem produktu. Přepravní náklady na záruční zboží hradí koncový uživatel-zákazník nebo prodejce.

## IMPORTED BY

MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΪΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)