


NÁVOD K OBSLUZE

ORTOPEDICKÁ ŽIDLE PRO DĚTI
STABILIZUJÍCÍ ZÁDA A HLAVU

BAFFIN neoSIT RS

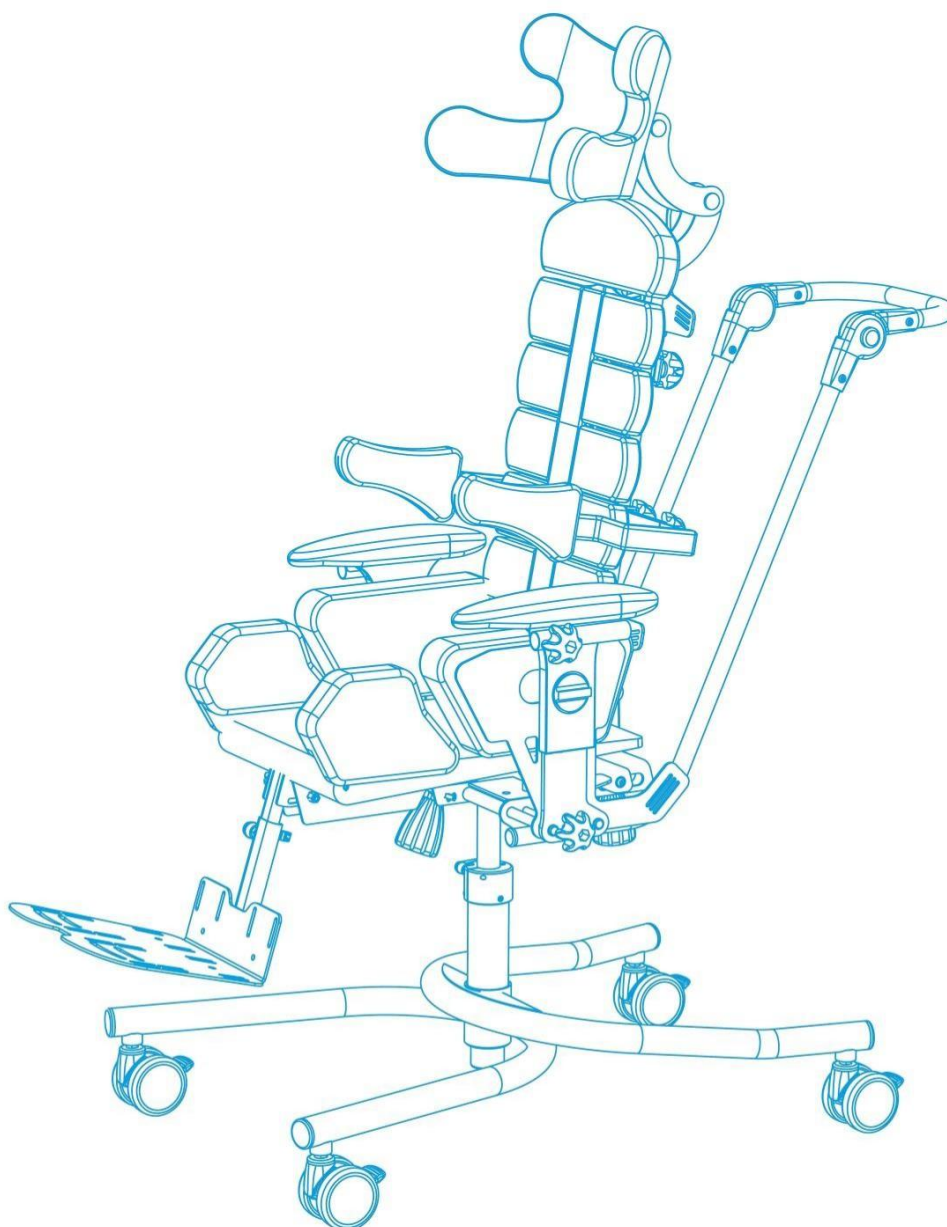

CE

Velikosti: S, M, L
Ovládání: manuální

Vydání 4 – 28.02.2018



POZNÁMKA! ZA ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÉ OD PŘÍMÉHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI LIW CARE TECHNOLOGY NEBO VE SPECIALIZOVANÉM OBCHODĚ SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI ZASTUPUJÍCÍM LIW CARE TECHNOLOGY V POLSKU JE ZODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ VÝROBCE.



POZNÁMKA! POUŽÍVEJTE POUZE UVNITŘ V PROSTORÁCH BEZ PRAHŮ



POZNÁMKA! PŘI POUŽITÍ VÝROBKU, SERVISU, MECHANICKÉM NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ MŮŽE HROZIT NEBEZPEČÍ UVÍZNUTÍ A/NEBO SEVŘENÍ ČÁSTÍ TĚLA UŽIVATELE/PEČOVATELE V OTVORECH/DŘÁŽKÁCH PRVKŮ ZAŘÍZENÍ. TYTO KROKY SE DOPORUČUJE PROVÉST VELMI PĚČLIVĚ. PO NASTAVENÍ STABILIZAČNÍ POLOHY ŘÁDNĚ UTÁHNĚTE MATICE A ŠROUBY.



POZNÁMKA! PŘED ZAHÁJENÍM ÚKONŮ SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU.



1.	Úvod	3
2.	Varování a bezpečnostní informace	3
3.	Určený způsob použití	4
4.	Technické informace	4
4.1	Technické údaje	5
5.	Seřízení a nastavení	6
5.1	Nastavení šířky	6
5.2	Nastavení hloubky	6
5.3	Nastavení délky opěrky nohou	6
5.4	Nastavení úhlu sedadla	6
5.5	Nastavení úhlu zádové opěrky	6
5.6	Nastavení úhlu nožní opěrky	6
5.7	Nastavení výšky podpěry hýždí	7
5.8	Nastavení zádové opěrky	7
5.9	Nastavení výšky sedadla	7
5.10	Nastavení výšky područek	8
5.11	Brzdy	8
6.	Dodatečné vybavení	8
6.1	Opěrka hlavy	8
6.2	Bočnice	8
6.3	Uchycení a nastavení vesty, abdukčních pásů na nohy a pánevních popruhů	9
6.4	Tabulka	9
6.5	Tlačná rukojeť	10
6.6	Oddělené stupačky	10
6.7	Nastavení rozpětí stehenních opěrek	11
6.8	Nastavení zajištění páteře	11
6.9	Stupačky	12
7.	Přenášení zařízení	13
8.	Všeobecná péče a čištění	13
9.	Servis a údržba	14
10.	Typový štítek	14
11.	Významy symbolů	15
12.	Shoda s bezpečnostními požadavky pro zdravotnické prostředky	15



Ortopedická židle BAFFIN neoSIT RS pro děti stabilizující záda a hlavu je navržena a vyvinuta společností LIW Care Technology Sp. z o.o. je inovativní zařízení s nejmodernějšími funkcemi pro anatomické vyrovnání těla uživatele. Poskytuje alternativu ke konfekčním židlím s omezeným nastavením a na míru upraveným židlím, které se sice přizpůsobí křivkám těla uživatele, ale nenabízejí mnoho dalších možností korekce.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zařízení snadno použitelné a nastavitelné, přičemž poskytuje řadu možností přizpůsobení podle anatomického tvaru těla a správného zakřivení páteře uživatele.

Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku. Aby byla zajištěna plná bezpečnost a pohodlí pro uživatele a pečovatele, a aby se předešlo možnému poškození zařízení, je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení. Pokud existuje více pečovatelů nebo nových pečovatelů, měli by být všichni zúčastnění obdržet školení o zařízení a měli by mít kopii tohoto dokumentu nebo by si měli být vědomi jeho umístění pro referenční účely. U distributorů ke k dispozici bezplatné školení.

2. Varování a bezpečnostní informace



Bezpečnost těch, kteří používají naše výrobky, je pro společnost LIW Care Technology Sp. z o.o. na prvním místě. Aby byla zajištěna bezpečnost a komfort při používání ortopedické židle pro děti stabilizující záda a hlavu BAFFIN neoSIT RS, a aby se předešlo riziku poškození zařízení, je velmi důležité, aby si uživatel a/nebo další osoby podílející se na provozu zařízení před používáním zařízení přečetli tento návod včetně doporučení a varování, a aby vše řádně pochopili.

Varování ohledně bezpečnosti a nesprávného použití:

- Na tomto výrobku neprovádějte žádné změny, které by mohly ovlivnit bezpečnost.
- Veškerá zařízení uvedená v této příručce se smí používat pouze popsáním způsobem.
- V případě potřebných oprav jednejte bez prodlení.
- Pokud jsou na tomto výrobku provedeny změny, které mohou mít vliv na bezpečnost, osoba, která tyto změny provádí, nese odpovědnost. Výrobce nebo distributor po odeslání neodpovídá za žádné změny nebo úpravy provedené na jejich výrobcích.



POZOR: Vezměte prosím na vědomí tento symbol. Upozorňuje na konkrétní body týkající se bezpečnosti. Nedodržování těchto pokynů by mohlo ohrozit uživatele nebo pečovatele.

Přeprava:

Uživatel by neměl být přepravován na židli Baffin neoSIT RS ve vozidle.

Servis a údržba: Je důležité provádět pravidelný servis a údržbu. Tím se maximalizuje životnost zařízení. Viz příslušná kapitola této příručky.

Cesta v letadle:

Pokud je vaše židle Baffin neoSIT RS přepravována v nákladním prostoru letadla, ať ve složeném nebo rozloženém stavu, ujistěte se, že je dobře vycpaná a zabalená a bezpečně zajištěná.

3. Účel použití zařízení




Židle BAFFIN neoSIT RS je určena pro uživatele, jejichž výška je v rozmezí 85–130 cm, s maximální hmotností 60 kg. Je určena pouze pro použití v interiéru. Zamýšlenými uživateli jsou ti, kteří disponují vadným držetím těla a svalovou dysfunkcí. Mezi konkrétní onemocnění patří dětská mozková obrna, svalová dystrofie, různé typy paralýzy, tetraplegie a paraplegie. Může být použita při léčbě pro prevenci následků posturálních defektů a nesprávného fungování těla s nimi spojeného. Zařízení umožňuje uvedení páteře a pánve do správné (optimální) polohy. Novinkou tohoto zařízení je, že „roste“ s dítětem, protože jej lze upravit podle aktuální polohy a výšky. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti, obraťte se nejprve na svého poskytovatele zařízení / klinického lékaře.

4. Technické informace



4.1 Technické údaje


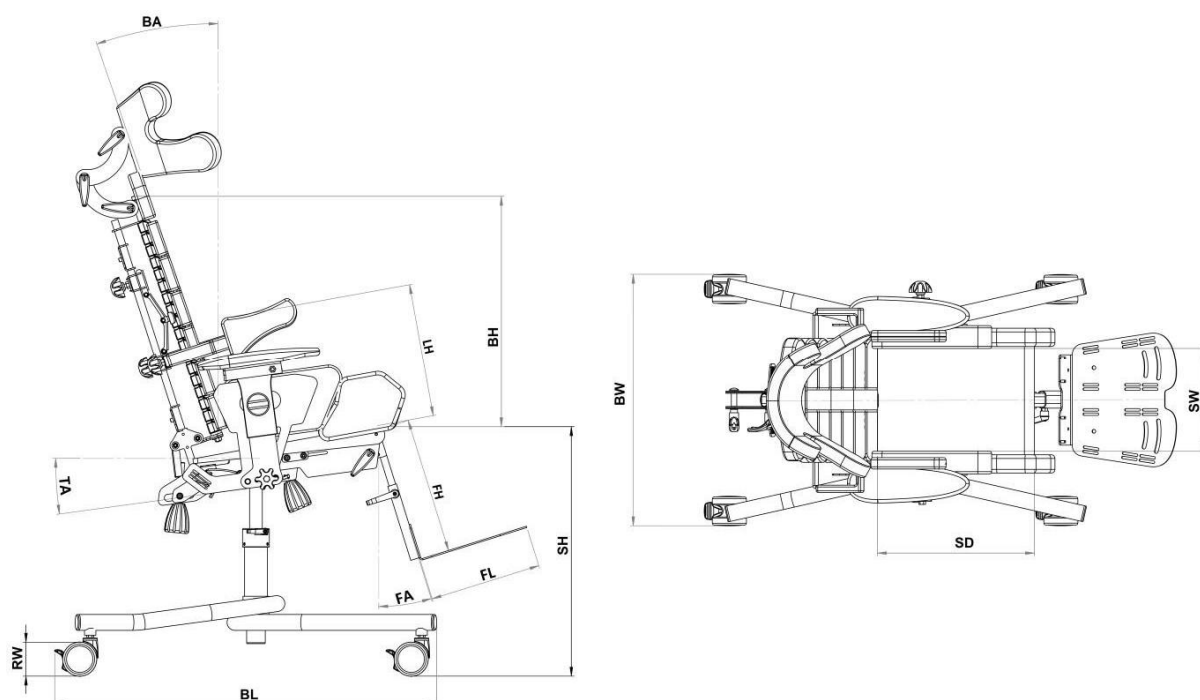


Baffin neoSIT RS je dostupný ve třech velikostech. Podrobnosti o velikostech jsou uvedeny v následující tabulce:

č.	Rozměry	Symbol rozměru	Rozměry [cm]		
			S	M	L
1	Výška sedadla	SH	43÷56	43÷56	43÷56
2	Výška zádové opěrky	BH	42	50	58
3	Úhel zádové opěrky	BA	-5 ⁰ ÷25 ⁰	-5 ⁰ ÷25 ⁰	-5 ⁰ ÷25 ⁰
4	Délka základny	BL	83	83	83
5	Šířka základny	BW	55	55	55
6	Výška podnožky	FH	17÷27	17÷27	28÷38
7	Délka podnožky	FL	18	21,5	24
8	Průměr kola	RW	7.5	7.5	7.5
9	Hloubka sedadla	SD	20÷31	20÷31	27÷40
10	Šířka sedadla	SW	15÷30	15÷30	20÷32
11	Úhel stupačky	FA	-10 ⁰ ÷45 ⁰	-10 ⁰ ÷45 ⁰	-10 ⁰ ÷45 ⁰
12	Úhel sklápění	TA	20 ⁰	20 ⁰	20 ⁰
13	Výška boční opěry	LH	16÷35	16÷40	20÷45
14	Maximální hmotnost uživatele		60 kg	60 kg	60 kg



POZOR: Tento produkt mohou nastavovat a seřizovat pouze oprávněné osoby. Nastavení a seřízení musí provést kvalifikovaný lékař nebo pověřený kvalifikovaný personál.

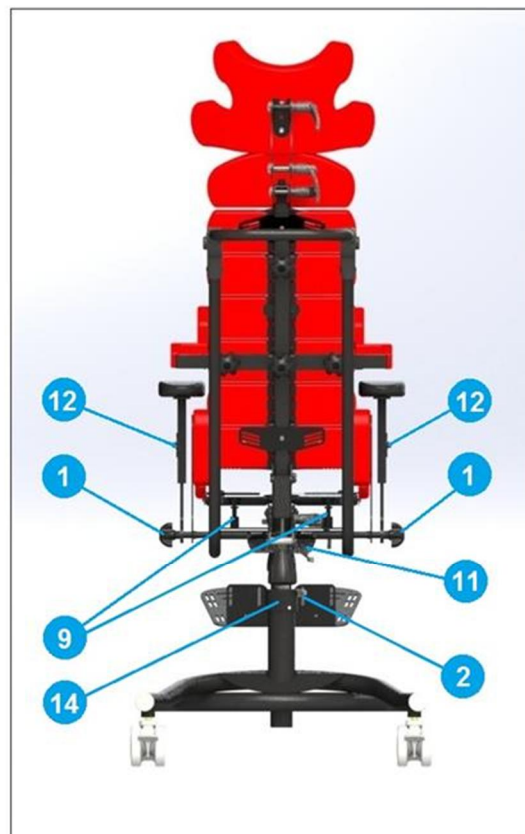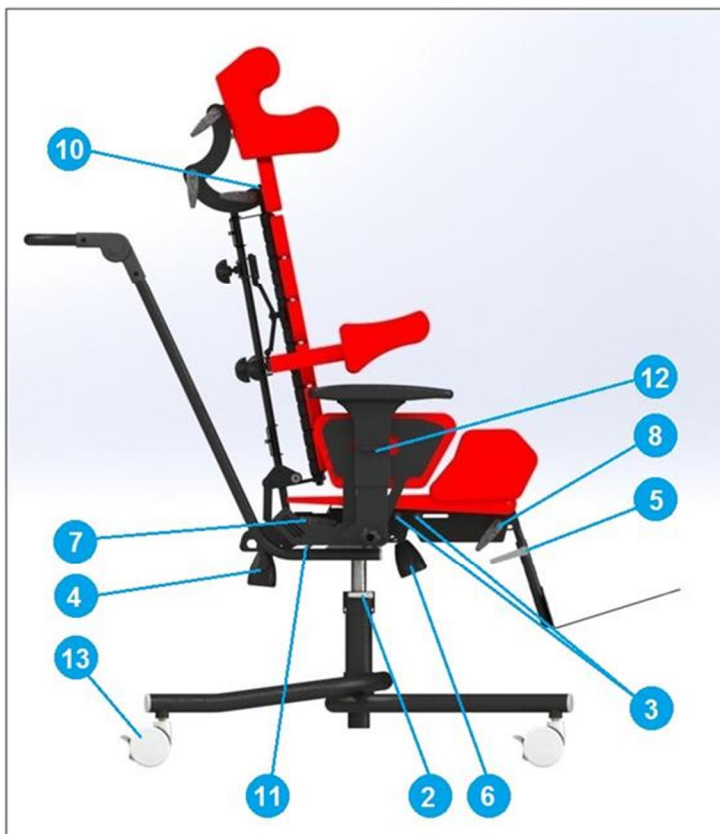

5.1 Nastavení šířky

Chcete-li nastavit boční podpěry pánve, otáčejte knoflíkem 1 doprava nebo doleva, dokud nedosáhnete požadovaných rozměrů. Nastavovací prvky jsou umístěny vlevo a vpravo, což umožňuje symetrickou a asymetrickou polohu pánve uživatele.

5.2 Nastavení hloubky

Pro odblokování povolte šrouby 3 umístěné na obou stranách. Po povolení šroubů nastavte hloubku zatlačením nebo vytažením přední část zařízení. Pro zajištění utáhněte šrouby 3. Pokud rozsah nastavení zajištěný šrouby 3 není dostatečný, dalšího nastavení můžete dosáhnout povolením šroubů 7 a vytažením nebo zatlačením zádové opěrky. Po dokončení nastavení se ujistěte, že jsou šrouby 7 utaženy.

5.3 Nastavení délky nožní opěrky

Pro odblokování povolte šroub 5. Posuňte opěrku nohou do požadované délky. Znovu utáhněte šroub 5 a zajištěte jej.

5.4 Nastavení šířky sedadla

Otáčejte šroubem 6, dokud nedosáhnete požadované polohy.


5.5 Nastavení úhlu zádové opěrky

Pro změnu úhlu zádové opěrky otočte a přidržte páčku 4. Poté rukou nastavte

požadovaný úhel a následně páčku uvolněte.



POZOR: Pokud pacient vyvíjí tlak na záda, uvolnění páčky způsobí jeho rychlý pád, takže pádu vždy braňte rukou!

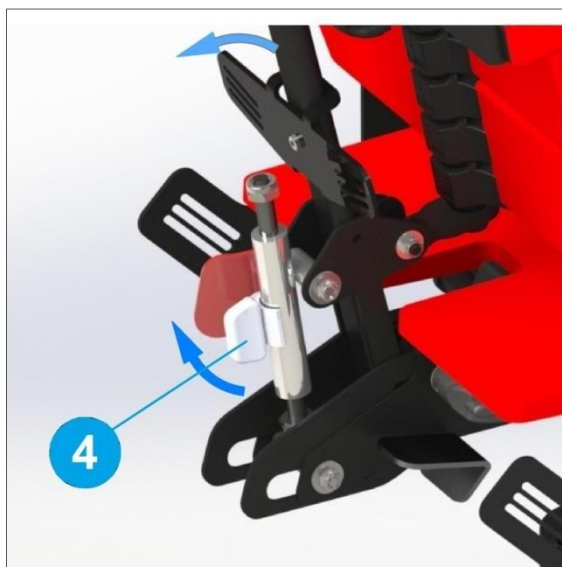

5.6 Úhel nožní opěrky

Povolte šroub 8, nastavte požadovaný úhel a šroub 8 opět utáhněte.

5.7 Nastavení výšky podpěry hýždí

Otáčejte šroubem 9, dokud nedosáhnete požadované výšky.



POZOR: Šrouby 9 se nacházejí na levé a pravé straně zařízení a jsou na sobě nezávislé, aby byla umožněno asymetrické nastavení podpěr hýždí.

Aby se usnadnilo nastavení, je možné vyjmout čalounění ze sedadla, čímž získáte lepší přístup k podpěrám hýždí.

5.8 Nastavení zádové opěrky

Zádová opěrka má jedinečný design umožňující uživateli dosáhnout korekčního nebo anatomického tvaru. Centrální jádro se skládá z několika nezávislých segmentů. Po uvolnění stavěcího šroubu 10 může být zádová opěrka anatomicky tvarována. Po dosažení optimálního tvaru zádové opěrky utáhněte stavěcí šroub 10.



POZOR: Úpravy popsané v bodech 5.7 a 5.8 musí být provedeny přesně, protože mají vliv na polohu páteře.

5.9 Nastavení výšky sedadla

Chcete-li zvýšit výšku sedadla vůči podlaze, nejprve uvolněte šroub 2 a stiskněte páčku uvolňovacího mechanismu 11 (směrem k přední části zařízení). Plynová vzpěra automaticky zvedne sedadlo. Po nastavení znovu utáhněte zámek otáčení. Chcete-li snížit výšku sedadla, uvolněte šroub 2 zámku otáčení a stiskněte páčku 11 a současně zatěžujte sedadlo. Nastavte požadovanou výšku a uvolněte páčku 11 pro zajištění polohy. Nakonec opět utáhněte zámek otáčení.

5.10 Nastavení výšky loketní opěrky

Otáčejte šroubem 12, dokud není nastavena požadovaná výška. Tyto šrouby se nacházejí na pravé a levé straně zařízení. Fungují nezávisle na sobě, což umožňuje nastavení výšky loketních opěrek asymetricky.



Toto zařízení mohou nastavovat a seřizovat pouze oprávněné osoby. Nastavení a seřízení musí provést kvalifikovaný lékař nebo pověřený kvalifikovaný personál.

Pečlivě zkontrolujte, zda je nastavení správné:

1. Žádný prvek nevyvíjí nadměrný tlak na tělo uživatele.
2. Mezi uživatelem a zařízením není příliš velký volný prostor.
3. Po dokončení procesu seřizování jsou všechny stavěcí šrouby a páčky opět utaženy.

5.11 Brzdy

Chcete-li kola zablokovat, stiskněte zajišťovací páčku 13 na každém kole. Pro odblokování kol zvedněte páčku 13 na každém kole. Pokud zařízení Baffin neoSit RS používá dítě, musí být všechna kola zablokována.



POZOR: V případě neočekávaného zatlačení nebo naklonění se na zařízení by mohlo dojít k narušení jeho stability.

6. Dodatečné vybavení¹




6.1 Opěrka hlavy

6.1.1 Montáž opěrky hlavy

- Povolte horní seřizovací šroub 17.
- Nasaďte upevňovací držák 15 opěrky hlavy na profil zádové opěrky 16.
- Utáhněte horní nastavovací šroub 17.

6.1.2 Nastavení hlavové opěrky

- Povolte nastavovací šrouby 18.
- Nastavte opěrku hlavy do správné polohy.
- Utáhněte nastavovací šrouby 18.

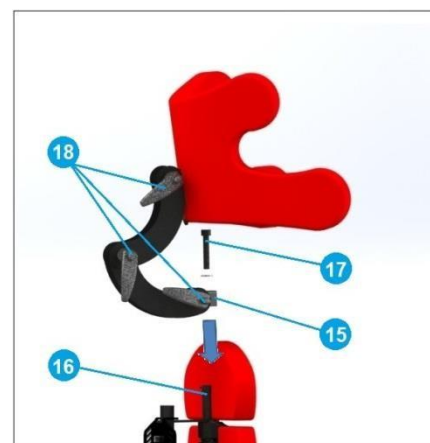

6.2 Bočnice

6.2.1 Montáž bočních opěr

- Zasuňte upevňovací držák opěrky rukou 20 na profil zádové opěrky 16.
- Protáhněte podpěrné desky 21 otvorem 22 v upevňovacím držáku opěrky.
- Utáhněte upevňovací šroub 23.

6.2.2 Nastavení šířky boční opěrky

- Povolte šrouby 24 a 25.
- Posuňte opěrky rukou od sebe nebo k sobě a nastavte požadovanou šířku.
- Utáhněte šrouby 24 a 25.

6.2.3 Nastavení výšky bočních opěrek

- Povolte šroub 23.
- Posuňte opěrku rukou 20 nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky.



¹ V závislosti na kontinentu a zemi jsou k dispozici další funkce.

- Utáhněte šroub 23.

6.3 Uchycení a seřízení vesty, abdukčních pásů na nohy a pánevních popruhů


Vesta a pánevní popruhy jsou uchyceny k židli pomocí pásů. Pro správné uchycení vesty protáhněte upevňovací pásy otvory v upevňovacích očkách 26. Délka upevňovacích pásů může být nastavena protažením pásů upevňovacími očky na zádové opěrce nebo přezkami, které uchycují pásy k vestě. Pánevní pásy jsou uchyceny k upevňovacím očkům umístěným za opěrkami rukou 27. Délka pásů se nastavuje protažením upevňovacích pásů (uvolnění nebo utažení) přes upevňovací spony nebo očka.



POZOR: Pečlivě zkontrolujte, zda je nastavení správné:

1. **Žádný prvek nevyvíjí nadměrný tlak na tělo uživatele.**
2. Mezi uživatelem a zařízením není příliš velký volný prostor.
3. Po dokončení nastavení jsou všechny stavěcí šrouby a páčky opět utaženy.
4. Ujistěte se, že jsou všechny popruhy správně upevněny v upevňovacích očkách a všechny přezky vesty a bederního pásu jsou správně zajištěny.

6.4 Stůl

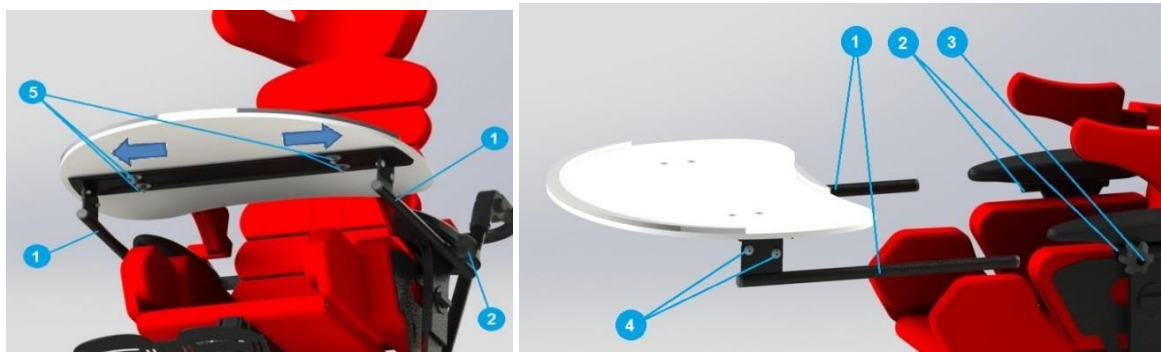

6.4.1 Nastavení rozteče úchytů stolu


Chcete-li upravit rozteč úchytů 1 stolu na rozteč otvorů 2 v opěrkách rukou, povolte šrouby 5, které najdete na úchytkách pod deskou stolu. Přitáhněte nebo roztáhněte úchyty od sebe, nastavte je podle vzdálenosti otvorů a utáhněte šrouby úchytů stolu.

6.4.2 Montáž stolu

Chcete-li namontovat stůl, uvolněte zajišťovací šrouby 3 a zasuňte úchyty stolu 1 do otvorů umístěných pod opěrkami rukou 2. Po zasunutí stolu do správné hloubky utáhněte zajišťovací šrouby 3.

6.4.3 Nastavení sklonu stolu

Uvolněte oba šrouby držáku 4 umístěné nad úchyty stolu 1 pod deskou stolu. Po nastavení požadovaného úhlu sklonu opět utáhněte šrouby držáku 4.

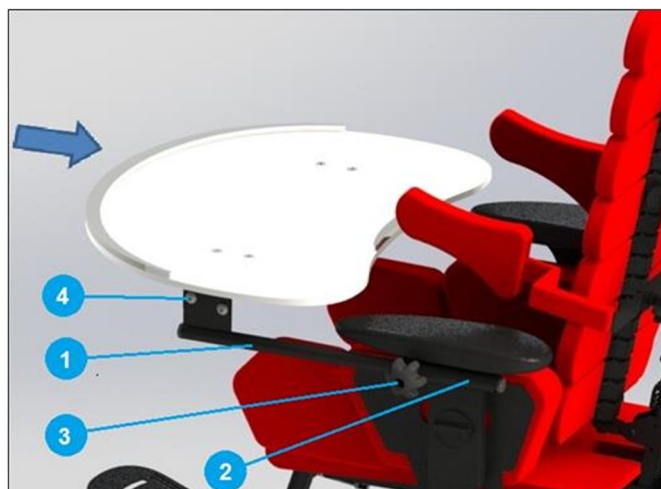


6.5 Tlačná rukojeť



Chcete-li nastavit výšku tlačné rukojeti, stiskněte tlačítka 1 a poté nastavte rukojeť do požadované výšky.

6.6 Oddělené stupačky

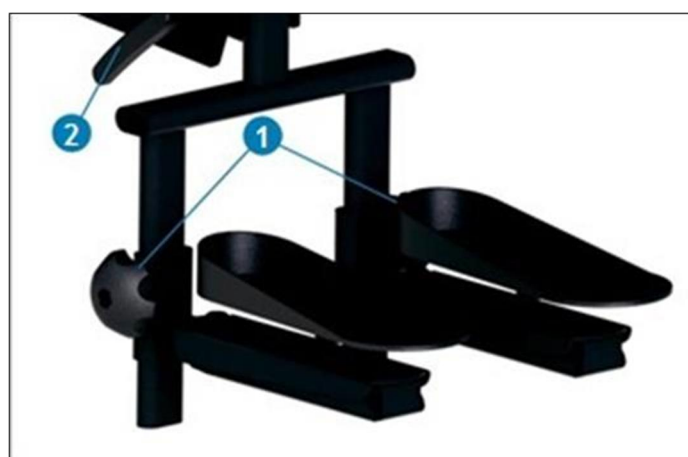

Pro nastavení správné výšky plošin stupaček povolte oba šrouby 1, posuňte plošiny do požadované výšky a utáhněte šrouby 1. Plošiny lze nastavit nezávisle na sobě, což umožňuje asymetrické nastavení výšky plošiny. Chcete-li nastavit správný úhel plošiny stupaček, uvolněte šroub (2), nastavte požadovaný úhel a utáhněte šroub.



Chcete-li nastavit přesnou polohu každé platformy, povolte šrouby 3, nastavte správnou polohu a utáhněte šrouby 3. Toto nastavení umožňuje nezávislé nastavení úhlu, náklonu a polohy každé plošiny.

6.7 Nastavení rozpětí stehenních opěrek

Nastavení rozpětí stehenních opěrek se provádí pomocí dvou regulačních šroubů (1), které se nacházejí pod podpěrami steh. Chcete-li jej nastavit, zvedněte čalounění zakrývající stehenní konzoly a povolte regulační šroub (1), abyste umožnili volný pohyb a nastavení podpěr steh do správné polohy. Po nastavení požadované polohy utáhněte regulační šroub stehenních opěrek pro jejich zajištění na místě. U podpěr steh lze nastavit úhel vzhledem k délce zařízení, což umožňuje deset způsobů nastavení steh. Nastavení opěrek steh ovlivňuje správné nastavení polohy kolena a pánve. Nezávislá regulace podpěr steh umožňuje asymetrické nastavení.




6.8 Nastavení zajištění páteře

Zajištění páteře je mechanická podpěra, která zabraňuje pohybu páteře v případě vystavení velké síly nebo nárazu.

6.8.1 Nastavení zajištění


- Povolte nastavovací šrouby 2.

- Nastavte zámek 1 do požadované polohy podél profilu zádové opěrky 5.
- Povolte dva šrouby 3 umístěné na levé a pravé straně.
- Nastavte zámek dorazu 4 tak, aby ležel na páteři.
- Pokud s dorazem nelze hýbat, zkontrolujte, zda jsou šrouby 3 uvolněné.
- Zablokujte zajištění páteře utažením šroubů 3.

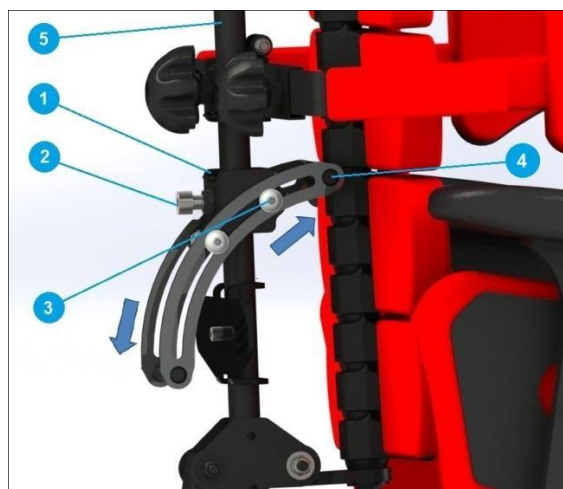

6.9 Opěrka nohou

Chcete-li upravit výšku opěrky nohou, uvolněte zajišťovací páčku 1, posuňte opěrku do požadované výšky a poté utáhněte páčku 1. Chcete-li nastavit správný úhel opěrky nohou, uvolněte západku 2, nastavte požadovaný úhel a poté západku 2 utáhněte.

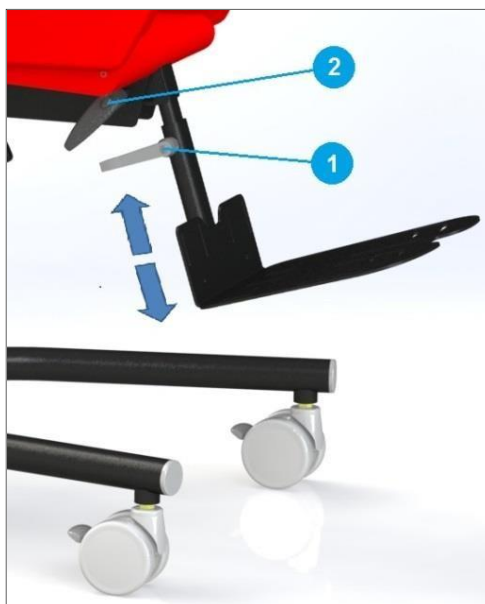

7. Přenášení zařízení



Přenášení zařízení BAFFIN neoSIT RS vyžaduje dvě osoby. Základnu zařízení uchopte oběma rukama, zařízení rovnoměrně zvedněte a poté přesuňte na cílové místo.



8. Všeobecná péče a čištění



Židle BAFFIN neoSIT RS je vyrobena z lakované oceli, hliníku a plastu. Pěnová a houbová výplň je připevněna ke kovové konstrukci a potažena textilním ochranným potahem. Je důležité, aby zařízení bylo udržováno v čistotě a používáno v souladu s doporučeními výrobce.

- Lak je třeba čistit navlhčeným hadříkem. Je povoleno používat jemné čisticí prostředky pro domácnost.
- Před mytím vyjměte houbové výplně z ochranných potahů.
- Čalounění by se mělo prát v ruce nebo v bubnové pračce na max. 40 °C. Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro jemné výrobky. Pokud jsou děti používající sedadlo náchylné k alergiím, použijte zelené mýdlo nebo speciální chemické přípravky.
- Zbavení se vody – neždímejte; krátkodobé odstředování je přijatelné.
- Sušení – umyté prvky musí být pověšeny, aby uschly při pokojové teplotě. Nesušte v sušičce.

Poznámka: Čalounění nabízené se zařízením je vyrobeno z prodyšného materiálu. Je v souladu s normou Oko-Tex Standard 100, která zajišťuje bezpečnost uživatele (včetně dětí). Tkanina použitá u čalounění neobsahuje žádné škodlivé látky, např. pesticidy, chlorfenoly, formaldehyd, barviva způsobující alergie, zakázaná azobarviva a extrahovatelné těžké kovy. Označení Oko-Tex Standard100 se uděluje pouze textiliím, jejichž všechny komponenty jsou testovány během každé fáze výrobního procesu a získají pozitivní výsledky.



POZOR: Při mytí čalounění věnujte pozornost suchým zipům. Aby nedošlo k poškození čalounění, ujistěte se, že pásy na suchý zip nejsou uvolněné a nedotýkají se čalouněné oblasti. Neperte společně s pěnovou výplní.

Pokud zařízení používají různí pacienti (např. V rehabilitačním centru), je nutné použít dezinfekční prostředky. Pro ruční dezinfekci se doporučuje použít Incidin plus v 0,25% – 0,5% roztoku nebo podobný prostředek. Je nutné postupovat podle pokynů k použití dodaných výrobcem dezinfekčního prostředku.

Rada: před dezinfekcí vyčistěte čalounění a rukojeti.

9. Servis a údržba



V případě zjištění jakýchkoli poruch nebo závad je nutno okamžitě přestat zařízení používat a obrátit se na prodejce nebo výrobce. Vadný díl musí být oddělen tak, aby nemohlo dojít k rozšíření oblasti poškození. V žádném případě se nepokoušejte výrobek demontovat nebo opravovat. Originální díly nenahrazujte díly pocházejícími ze zdroje, který nebyl schválen výrobcem.

Pokud se uživatel rozhodne přestat výrobek používat, je povinen jej zlikvidovat v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Ekonomická životnost výrobku je pět let.

Výrobce zajišťuje pozáruční servis. Kontaktní údaje:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polsko.

biuro@liwcare.pl

Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese: www.liwcare.pl

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listě, který je nedílnou součástí tohoto prohlášení. Záruční list je připojen na poslední straně tohoto dokumentu.


10. Identifikační štítek



model:	BAFFIN neoSIT RS	
SN	BAFRS - S0000	
rozměr/size:	S	
	60 kg	
	2017 LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Poland	



Název výrobce a datum výroby

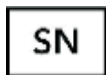

Výrobní číslo



Přípustná hmotnost uživatele



Řiďte se pokyny v uživatelském manuálu



Vyhňte se kontaktu s vodou



Směr pohybu



Označení shody v souladu se směrnicí EU č. 93/42 EHS, příloha VII,
o zdravotnických prostředcích

12. Shoda s bezpečnostními požadavky pro zdravotnické prostředky



Baffin neoSIT RS splňuje základní požadavky směrnice MDD 93/42 EHS pro zdravotnické prostředky.

Baffin neoSIT RS je v souladu s přílohou IX směrnice MDD 93/42 EHS, je neinvazivním neaktivním zdravotnickým prostředkem třídy I podle předpisu 1.

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je možno obdržet v oddělení odbytu výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční podmínky:

1. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku – LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polsko) – zaručuje, že společnost prodává provozuschopné zařízení prosté výrobních, montážních, materiálových a jiných vad a že toto zařízení bude prosté těchto vad během záruční doby. Tato záruka nepokrývá užitečnost výrobku pro účely kupujícího.
2. LIW Care Technology Sp. z o. o. (výrobce) poskytuje na zařízení dvouletou záruku počínaje dnem nákupu.
3. Jediným dokladem o záruce je tento záruční list vystavený prodejcem kupujícímu. Pro přenos nároků ze záruky je nutno provést převod držení tohoto záručního listu.
4. V případě zjištění jakýchkoli poruch nebo vad během záruční doby výrobce odstraní vadu na své vlastní náklady. V případě výměny dílů se odstraněný díl stane majetkem společnosti LIW Care Technology Sp. z o. o. a nebude vrácen uživateli záruky.
5. Na základě této záruky je uživatel povinen v průběhu záruční doby nahlásit fyzickou vadu na výrobku prostřednictvím formuláře uvedeného na naší webové stránce: www.liwcare.pl, a to po předchozím přihlášení se do „zákaznické zóny“ poštou na LIW Care Technology Sp. z o. o. nebo na tel. čísle: +48 42 212-35-18
6. Na základě této záruky je uživatel povinen doručit zařízení spolu se záručním listem a s originálem dokladu o koupi (DPH faktura nebo pokladní doklad) na náklady výrobce do jeho sídla. Pokud není žádný takový doklad k dispozici, bude dnem nákupu (začátkem záruční doby) datum dodání.
7. Zařízení odeslané k servisnímu zásahu by mělo mít čisté čalounění nebo v případě nemožnosti je vyprat by čalounění mělo být sejmuto. V případě obdržení zašpiněného zařízení k servisu má výrobce právo odmítnout provést opravu.
8. Tato záruka se nevztahuje na následující případy:
 - Vyřazené části a díly zničené nebo poškozené nesprávným používáním (zejména například vydanými nesprávnými pokyny nebo nevhodnými podmínkami) nebo nevhodným skladováním výrobku.
 - Poškození způsobené úpravou nebo doplněním zařízení uživatelem nebo třetími stranami.
 - Poškození způsobené nesprávným čištěním nebo nesprávnou údržbou výrobku uživatelem nebo třetí stranou.
 - Poškození způsobené běžným opotřebením nebo obvyklým zastaráním výrobku.
 - Poškození způsobené nedbalostí uživatele (zejména například při údržbě a čištění výrobku).
 - Poškození způsobené událostí vyšší moci.
 - Poškození způsobené vnějšími vlivy (znečištění, mechanické poškození a poškození vodou).
9. Záruka nezahrnuje regulaci a seřízení v průběhu záruční doby, protože se nejedná o vadu výrobku.
10. Pro vyřízení výše uvedené záruky je uživatel povinen doručit výrobek bezpečně zabalený výrobcem. Za tímto účelem použijte původní obal. Pokud uživatel nedodá výrobek zabalený v původním obalu, musí náhradní obal splňovat následující požadavky: pevná krabice s neporušenými stěnami, samostatná ochrana pro každou komponentu, výplňový materiál, pevná páska použitá k přelepení a adresa odesílatele nebo příjemce (LIW Care Technology Sp. z o. o.).
Společnost LIW Care Technology Sp. z o. o. nebude zodpovědná za poškození výrobku způsobené nevhodným obalem.
11. Záruční oprava nebo výměna bude provedena, pokud možno do 30 dnů od řádného dodání výrobku držitelem záruky společností LIW Care Technology Sp. z o. o.
12. Po záruční opravě bude výrobek doručen na náklady společnosti LIW Care Technology Sp. z o. o. na adresu dodavatele. V případě, že nebude obdrženo správně adresovaný obal, bude držitel záruky povinen nést veškeré náklady související s dopravou a uskladněním výrobku.
13. Záruka kvality poskytnutá společností LIW Care Technology Sp. z o. o. nemá vliv na zákonná práva kupujícího.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento výrobek. Přejeme Vám úspěch při terapii s naším zařízením.

POZNÁMKA! ZÁRUČNÍ LIST UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

Před přijetím výrobku k záruční opravě bude LIW Care Technology Sp. z o. o. vyžadovat předložení tohoto dokumentu.

Název produktu/Typ: Výrobní číslo:

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce:

č.	Datum žádosti o opravu	Provedené činnosti	Datum dokončení opravy	Razítko a podpis technika
1				
2				
3				
4				