




NÁVOD K OBSLUZE KAKADU

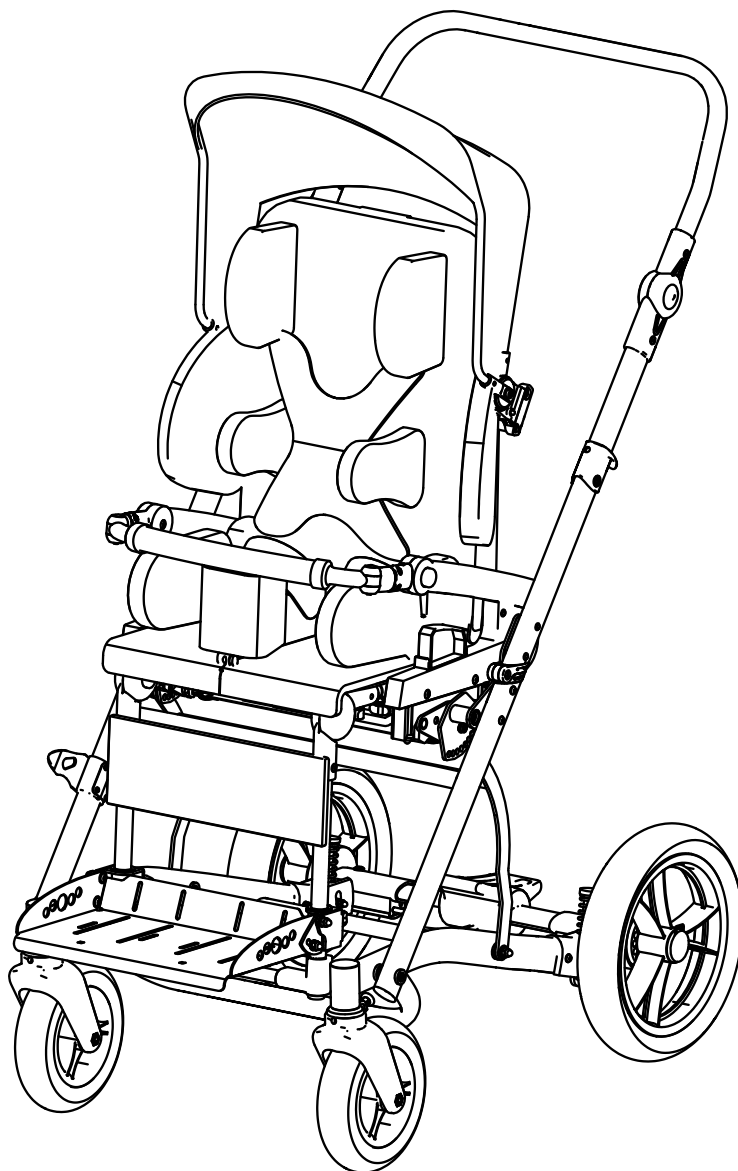

Edice 1 - 01.04.2022



UPOZORNĚNÍ! VÝROBCE JE ODPOVĚDNÝ POUZE ZA ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÉ OD PŘÍMÉHO ZÁSTUPCE TECHNOLOGIE LIW CARE NEBO VE SPECIALIZOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRODEJNÁCH ZASTUPUJÍCÍCH LIW CARE V POLSKU.



UPOZORNĚNÍ! HROZÍ NEBEZPEČÍ UVÍZNUTÍ/ZMÁČKNUTÍ ČÁSTI TĚLA UŽIVATELE/DOPROVODNÉ OSOBY V OTVORECH/MEZERÁCH MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ANEBU SESTAVOVÁNÍ PRODUKTU. TYTO POSTUPY BY MĚLY BÝT PROVÁDĚNY SE ZVLÁŠTNÍ OPATRNOSTÍ. PO PROVEDENÍ VŠECH SEŘÍZENÍ JE NEZBYTNÉ STABILIZOVAT POLOHU SPRÁVNÝM OTÁČENÍM MATIC / ŠROUBŮ.



UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

1 Obsah

1	Obsah.....	3
2	Úvod	3
3	Všeobecná bezpečnost.....	4
4	Účel použití.....	4
5	Identifikace symbolů.....	4
6	Soulad s bezpečnostními požadavky na zdravotnické prostředky.....	5
7	Používání Pediatrického kočárku KAKADU	5
8	Technické údaje.....	6
9	Základní provedení KAKADU	8
10	Montáž kočárku	9
11	Přenášení kočárku KAKADU	10
12	Rám kočárku KAKADU	11
12.1	Montáž a demontáž zadních kol.....	11
12.2	Rozkládání kočárku.....	11
12.3	Skládání kočárku.....	12
12.4	Přední kola.....	12
12.5	Rukojeť.....	13
12.6	Nastavení úhlu sedačky.....	13
12.7	Parkovací brzda.....	15
12.8	Tlumič zadního zavěšení.....	15
13	Sedačka kočárku.....	16
13.1	Nastavení úhlu zádové opěrky	16
13.2	Nastavení výšky zádové opěrky.....	17
13.3	Nastavení výšky podpory hrudníku.....	17
13.4	Nastavení hlavové opěrky.....	18
13.5	Nastavení podpory pánve.....	18
13.6	Nastavení hloubky sedačky.....	18
13.7	Nastavení úhlu opěrky nohou.....	19
13.8	Nastavení hloubky opěrky nohou.....	20
13.9	Nastavení výšky a úhlu opěrky nohou.....	20
13.10	Seřízení a demontáž bezpečnostní zábrany.....	21
13.11	Stříška	22
13.12	Podpora beder.....	22
13.13	Vesta a abdukční pásy.....	23
14	Doplňky.....	23
14.1	Abduktor	23
14.2	Pláštěnka	24
14.3	Podnos.....	24
14.4	Rukávník.....	25
14.5	Fusak.....	25
14.6	Pěnová opěrka hlavy	26
14.7	Nákupní taška	26
14.8	Košík...-.....	26
14.9	Výplň potahu pro podnožku	27
14.10	Rám podvozku a sada adaptérů.....	27
15	Čištění a údržba.....	28
16	Typový štítek	28
17	Záruka/Servis.....	29
	ZÁRUČNÍ LIST.....	30

2 Úvod

Pediatrický kočárek KAKADU pro děti (dále pouze kočárek) je navržený a vyvinutý společností LIW Care Technology tak, aby usnadnil každodenní péči o děti, které je potřeba přemístit, jejichž nemoc jim neumožňuje soběstačný pohyb, ani správné sezení či stání.

Zdravotnický prostředek KAKADU je určen pro děti s paralýzou a triplegií nebo tetra-plegií; s diplegií, hemiplegií nebo hemiparézou s hmotností do 40 kg. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zařízení snadno použitelné a ovladatelné, aby poskytovalo stabilitu a schopnost přizpůsobit se tvaru těla.

Uživatelské pokyny si důkladně prostudujte před použitím kočárku – zajistíte tím bezpečné používání tohoto produktu po celou dobu používání, ovlivníte jeho účinnost, délku použití a umožní vám plně využít všechny výhody kočárku.

3 Všeobecná bezpečnost

Pro LIW Care Technology Sp. z o. o., je nejdůležitější chránit pacienty, kteří používají naše vybavení. Pro zajištění bezpečnosti uživatelů Pediatrického kočárku KAKADU by měla být přijata tato doporučení::

1. Před použitím s používáním kočárku, si prosím důkladně přečtete návod k použití a v případě jakýchkoliv pochybností se neváhejte obrátit na prodejce nebo výrobce.
2. Ujistěte se, že jsou všechny informace, tipy a varování jsou srozumitelné..
3. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru.
4. Pokud je dítě v kočárku, ujistěte se, že je řádně zajištěno pásy a vestou.
5. KAKADU Pediatrický kočárek může být používán pouze jednou osobou najednou.
6. Nesprávné používání kočárku může ohrozit Vaše zdraví a způsobit zranění.
7. Během používání a seřizování kočárku dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí riziko zachycení rukou v pohyblivých částech. Po každém seřízení je důležité zajistit, aby všechny prvky byly správně namontovány a zabezpečeny.
8. Je zakázáno přepravovat dítě v KAKADU během jízdy autem - sedadlo kočárku není autosedačka. Dítě nemůže být v sedačce během jízdy.
9. Nepoužívejte kočárek na schodišti s/i bez dítěte
10. Nepřenášejte kočárek s dítětem.

Uživatelská příručka připojená k přístrojům vyráběným společností LIW Care Technology Sp. z o.o. obsahuje odstavec označený slovem UPOZORNĚNÍ, jehož cílem je zdůraznit obsah daného odstavce. Význam symbolu, o kterém bylo uvedeno výše, je následující:












UPOZORNĚNÍ: Veźměte prosím na vědomí tento symbol. Upozorňuje na konkrétní body týkající se bezpečnosti. Nedodržování těchto pokynů by mohlo ohrozit uživatele nebo pečovatele.

4 Účel použití

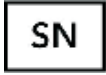Pediatrický kočárek KAKADU je vhodný pro děti, kteří trpí různými formami triplegie nebo tetraplegie, stejně jako paraplegie, a to jak hemiplegie, tak střídavé hemiplegie:

- mozková obrna;
- svalové dystrofie;
- palsies různých etiologií;
- rozštěp páteře;
- myelomeningocele;
- stavy po poranění páteře;
- stavy po kraniocerebrálním traumatu;
- stavy vyplývající z mrtvice;
- vady držení těla, a zejména skolióza, v případě, že nemají možnost použití jiného zařízení

5 Význam symbolů

	Jméno výrobce a datum výroby
	Datum výroby
	Sériové číslo
	Přípustná hmotnost uživatele
	Vyhňte se kontaktu s vodou
	Řiďte se návodem k obsluze
	Šipky znázorňují směr pohybu
	Označení CE v souladu s Rezolucí EU 2017/745 Evropského parlamentu a Rady Evropy datovaného k 5. Květnu 2017 o zdravotnických prostředcích příloha V.
	Zdravotnický prostředek

6 Shoda s bezpečnostními požadavky pro zdravotnické prostředky

Hereby we confirm that the KAKADU Specialised Paediatric Stroller meets requirements of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/745 dated from April 5th, 2017 on medical devices.

The KAKADU Specialised Paediatric Stroller in accordance with Annex VIII of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/745 dated from April 5th, 2017 on medical devices is a non-invasive, active class I medical device according to the rule 1.

Conformity declaration of the device can be obtained in the Commercial Department of the manufacturer.

7 Používání kočárku KAKADU

KAKADU je určena pro pohyb uživatelů, jejichž podmínky jim znemožňují samostatný pohyb, bez jakékoli pomoci. Kočárek umožňuje polohu sedačky vpřed i vzad. Je také možné nastavit úhel sedáku vůči zemi v rozsahu od -45° do +45°.



UPOZORNĚNÍ! Předpokládá se, že kočárek bude používat vždy pouze jedna osoba.



UPOZORNĚNÍ! Kočárek by měl být zatížen pouze v povoleném rozsahu zatížení, přidání jakýchkoli předmětů, které by leželi na produktu, může způsobit jeho pád.



UPOZORNĚNÍ! Extrémní nastavení a držení těla (velké naklonění) zvyšuje riziko pádu.




UPOZORNĚNÍ! Kočárek v žádném případě nezvedejte, pokud v něm sedí uživatel.



UPOZORNĚNÍ! Předpokládá se, že produkt bude používán na rovných a zpevněných površích. Překonávání překážek, jako jsou prahy, hrany, je možné pouze tehdy, když je kočárek neobsazený a uživatel v kočárku nesedí.

8 Technické údaje

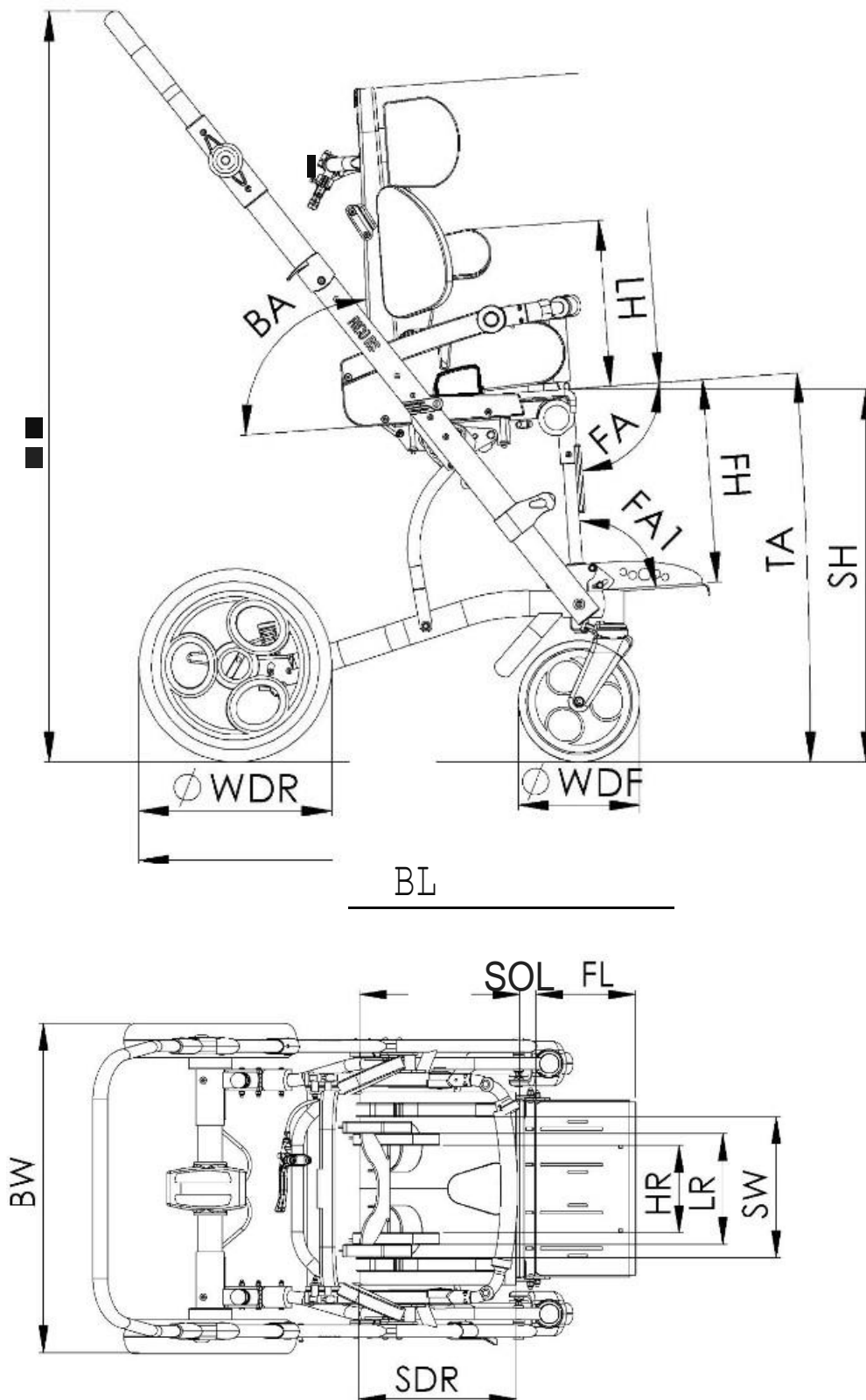


Obr. 1

číslo.	Název rozměru	Symbol	velik.	
			1	2
1	Výška sedačky	SH	61 cm	61 cm
2	Výška zad	BH	43÷60 cm	48 ÷65 cm
3	Výška podpory hrudníku	LH	14 ÷ 29 cm	18 ÷ 36 cm
4	Rozteč podpory hrudníku	LR	16÷26 cm	16 ÷ 26 cm
5	Rozteč opěrky hlavy	HR	13÷22 cm	13 ÷ 22 cm
6	Úhel opěrky zad	BA	20°÷90°	20° ÷ 90°
7	Hloubka sedačky na levé straně*	SDL	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
8	Hloubka sedačky na pravé straně *	SDR	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
9	Rozteč opěrky pánve (šířka sedadla)	SW	17÷ 27 cm	17÷ 32 cm
10	Výška stupaček	FH	18 ÷ 36 cm	18 ÷36 cm
11	Délka stupaček	FL	17 cm	17 cm
12	Nastavení úhlu opěrky nohou	FA	0° ÷ 90°	0°÷90°
13	Nastavení úhlu opěrky nohou	FA1	-20° ÷ 20°	-20°÷20°
14	Náklon zad	TA	-45° ÷ 45°	-45°÷45°
15	Délka základny	BL	80 cm	80 cm
16	Šířka základny	BW	58 cm	58 cm
17	Průměr kola (přední)	WDF	19 cm	19 cm
18	Průměr kola (zadní)	WDR	29 cm	29 cm
19	Výška rukojeti	HH	75 ÷ 118 cm	75÷118 cm
20	Maximální hmotnost uživatele		40 kg	40 kg
21	Maximální nosnost kočárku		40 kg	40kg
22	Váha kočárku		20,3 kg	22,1 kg

* - Hloubka může být nastavena nezávisle

9 Základní provedení KAKADU

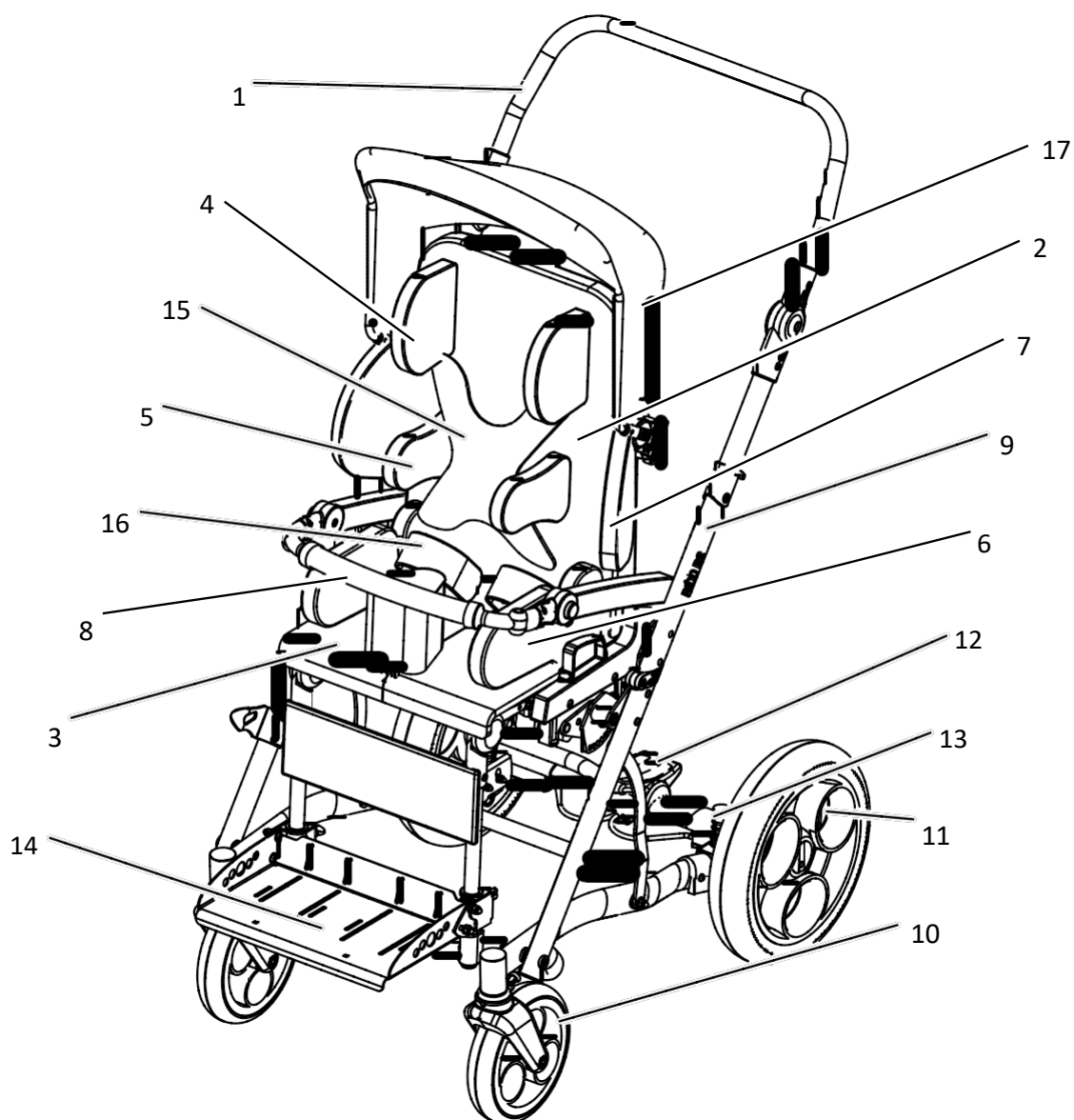


Obr. 2

1. Rukojeť
2. Zádová opěrka
3. Sedačka
4. Opěrka hlavy (stabilizátor hlavy)
5. Podpora hrudníku (stabilizátory hrudníku)
6. Podpora kyčle (stabilizátory kyčle)
7. Boční opěrky
8. Madlo
9. Rám kočárku
10. Přední kola
11. Zadní kola
12. Ruční brzda
13. Zadní tlumiče
14. Opěrka nohou
15. Vesta
16. Pánevní stabilizační pásy
17. Ochranná stříška


10 Montáž kočárku

Kočárek KAKADU se skládá ze dvou částí: rám a sedačka. Umístěte sedačku na rozložený rám. Poté navkněte madla sedačky na příčníky rámu a přitlačte sedačku k rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí zajišťovacích pojistek.

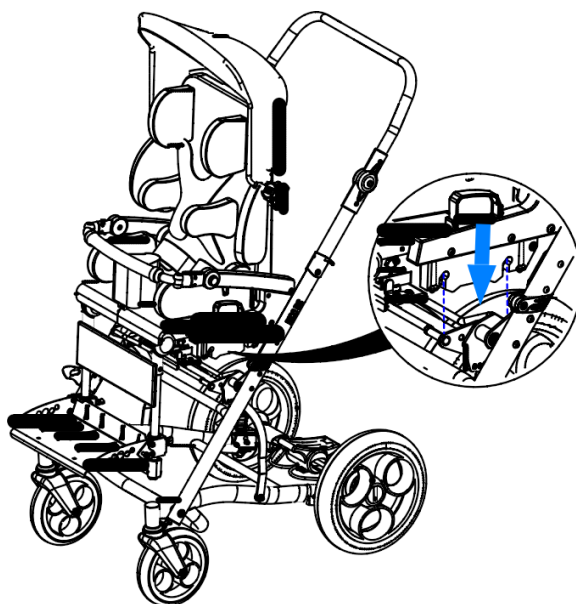


Obr. 3

Konstrukce kočárku umožňuje montáž sedačky směrem dopředu i vzad.

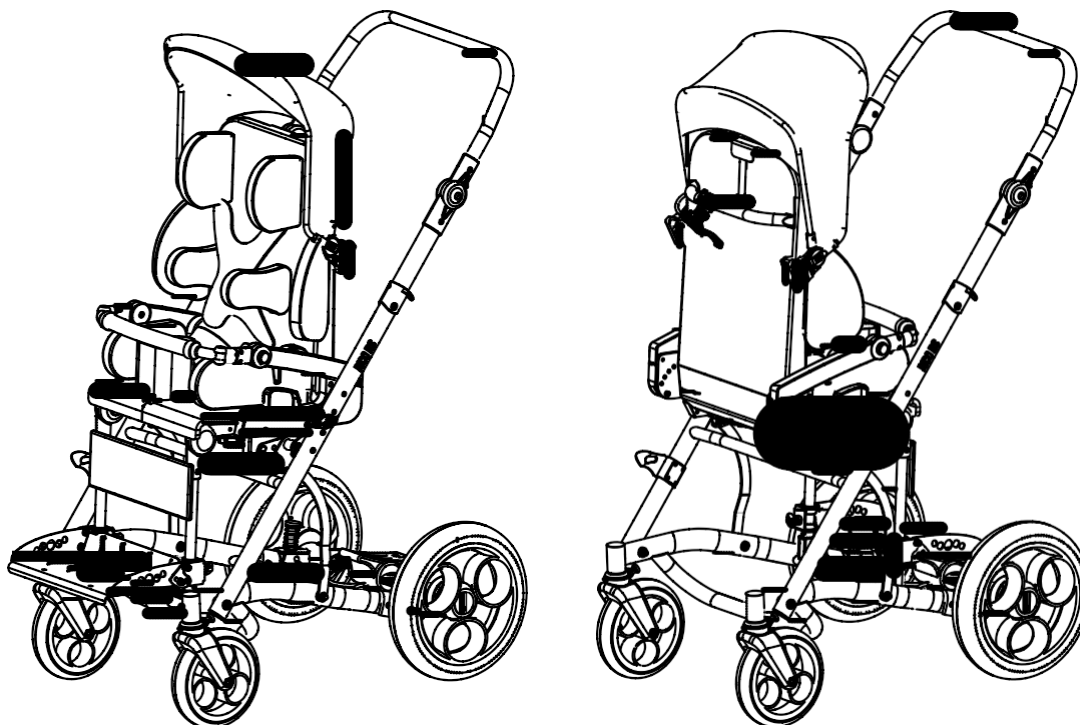

Obr. 4

Pro vyjmutí sedačky z rámu zatáhněte za rukojeť zámku sedačky nahoru, sedačku zvedněte a sejměte z příčnicků rámu.

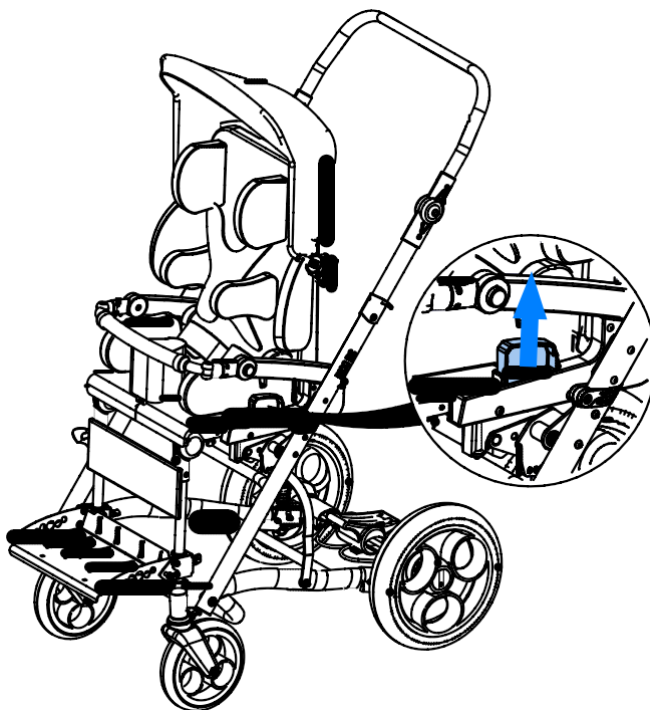


Obr. 5

11 Přenášení kočárku KAKADU

Z bezpečnostních důvodů by se kočárek měl nosit po částech, zvláště sedačku a rám. Způsob přenášení je na obr. 6.



UPOZORNĚNÍ! Je zakázáno přenášet kočárek s uživatelem, který v něm sedí.

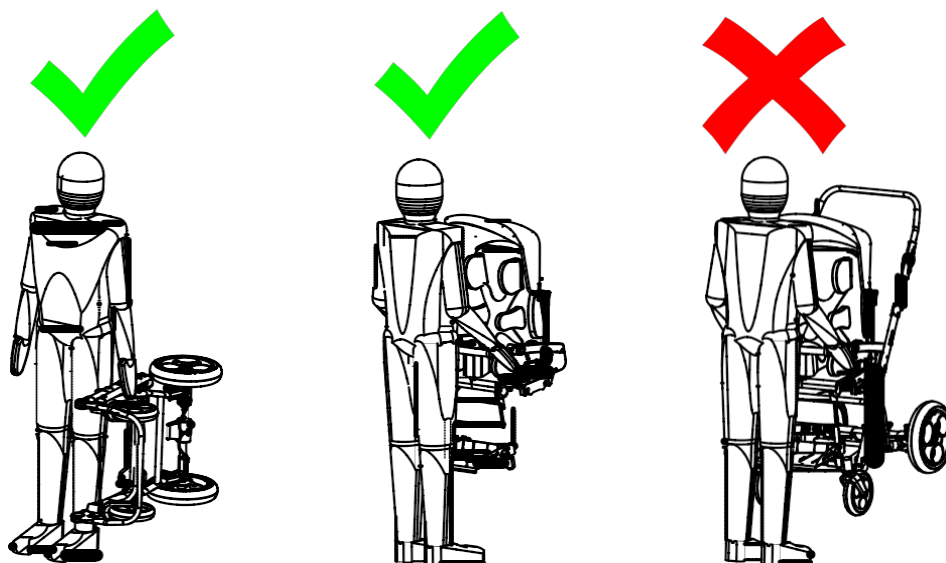

Obr. 6

12 Rám kočárku KAKADU




UPOZORNĚNÍ! Po každé změně nastavení je nezbytné zkontrolovat zda jsou všechny šrouby a matice utažené.

12.1 Montáž a demontáž zadních kol

Zadní kola se montují nasazením kola na osu a zablokováním čepu mechanismu blokujícího kolo na ose. Kola jsou správně nasazená po "zacvaknutí".

Chcete-li zadní kola sundat, stiskněte tlačítko, které blokuje uvolnění kola a poté jej vysuňte z osy.

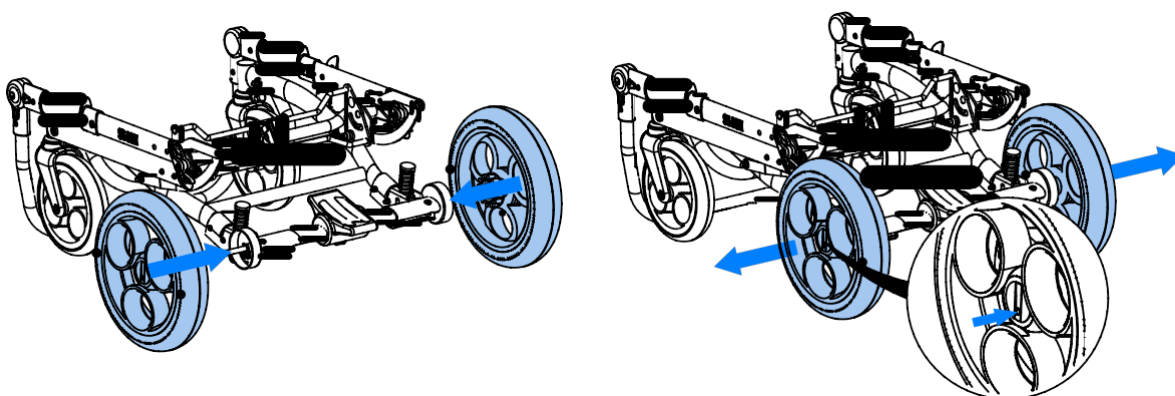

Obr. 7




UPOZORNĚNÍ! Před montáží kola odstraňte veškeré nečistoty z osy i kola.



UPOZORNĚNÍ! Po montáži se ujistěte, že jsou kola správně zajištěna.

12.2 Rozkládání kočárku

Pro rozložení postavte kočárek na pevnou zem, uvolněte pojistku a zvedejte madlo, dokud rám kočárku nezacvakne.

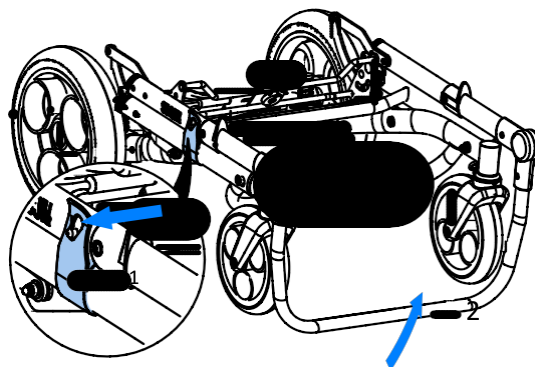


Obr. 8



UPOZORNĚNÍ! Při rozkládání rámu věnujte pozornost možnému zranění způsobenému pohyblivými částmi kočárku.

12.3 Skládání kočárku

Zatáhněte za pojistky (1) na obou stranách rukojeti kočárku směrem k sobě a poté zatlačte madlo (2) dopředu a složte rám až do zacvaknutí pojistky (3).

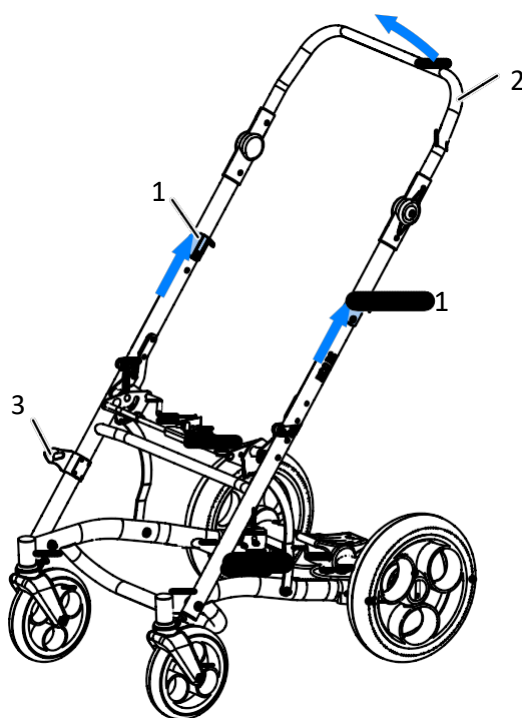


Obr. 9



UPOZORNĚNÍ! Při skládání rámu věnujte pozornost možnému zranění při zachycení pohyblivých částí kočárku.

12.4 Přední kola


Přední kola lze zablokovat ve směru „vpřed“. Pro odblokování směru otáčení kola, vytáhněte zajišťovací pojistku a otočte jej o 90° (obr. 10). Pro opětovné zablokování kol posuňte pojistku otáčením, dokud se opět nezablokuje.

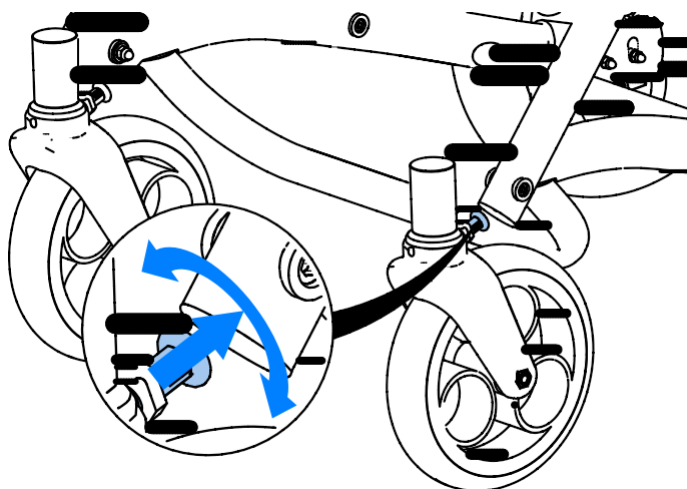

Obr. 10

12.5 Rukojeť

Stiskněte obě nastavovací tlačítka současně (1) do požadované výšky rukojeť. Poté pohybujte rukojetí dokud neuslyšíte cvaknutí zámku (obr.11).

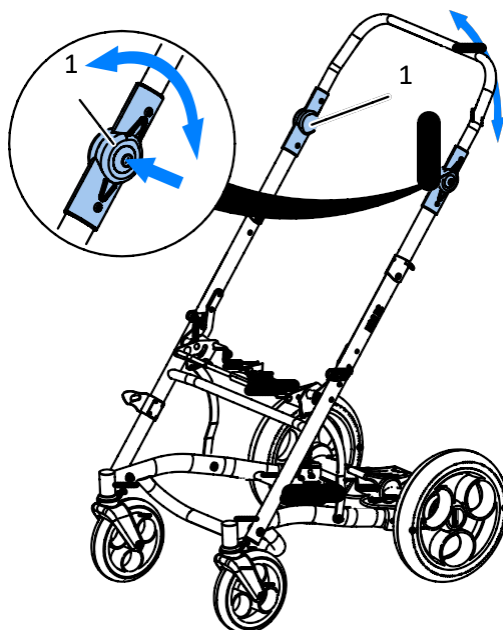


Obr. 11



UPOZORNĚNÍ! Pamatujte, že zavěšení jakéhokoliv předmětu na rukojeť má významný vliv na stabilitu kočárku.


12.6 Nastavení sklonu sedačky

Sklon sedačky začněte nastavovat zmáčknutím rukojeti (2). Rukojeť je umístěna na vodorovné tyči připevněná k opěradlu sedačky. Přidržením rukojeti (2) upravte úhel sedačky. Při nastavování úhlu PAMATUJTE na držení rukojeti i hrazdy. Po dosažení požadovaného úhlu, rukojeť uvolněte. Nakonec uchopte vodorovnou příčku (3) a pohybem nahoru a dolů zkontrolujte, zda je sedačka upevněná a bezpečná pro použití. Nepoužívejte kočárek, když je nastavení úhlu sedačky uvolněné.


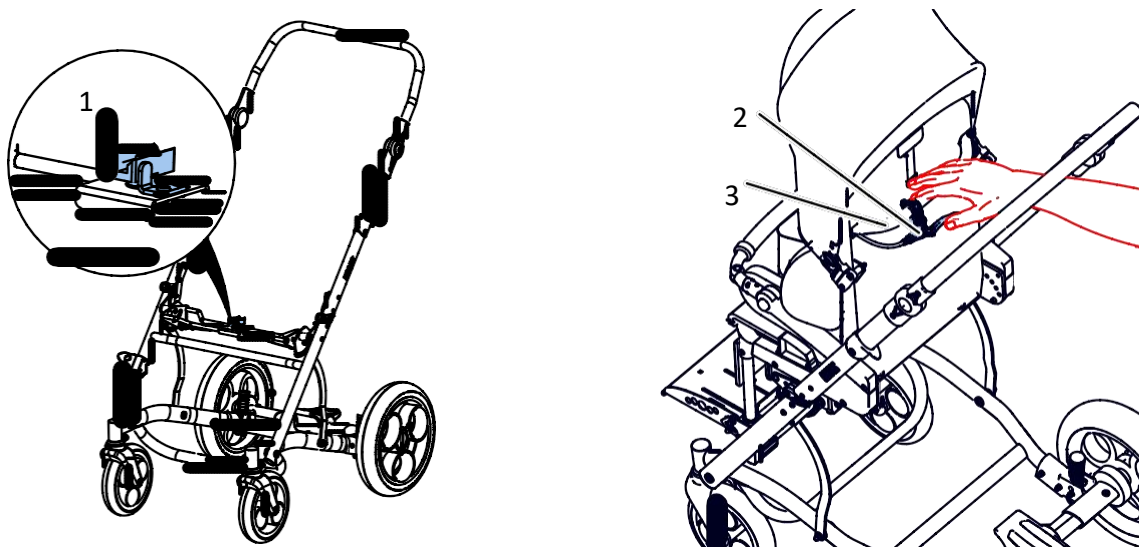


Obr. 12


Nastavení úhlu sedačky je v rozsahu 5° - 45°.

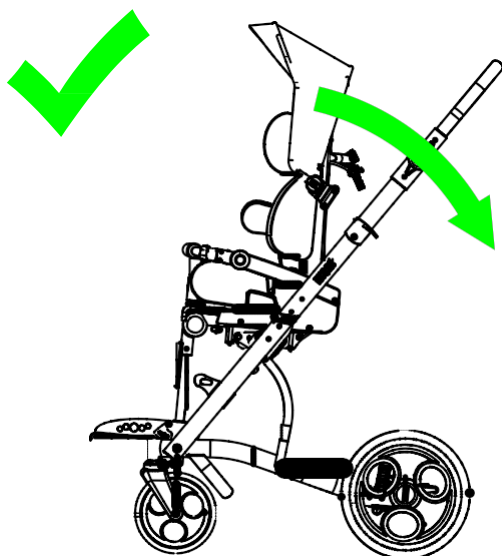

NENAKLÁPĚJTE OPĚRKA ZAD DOPŘEDU

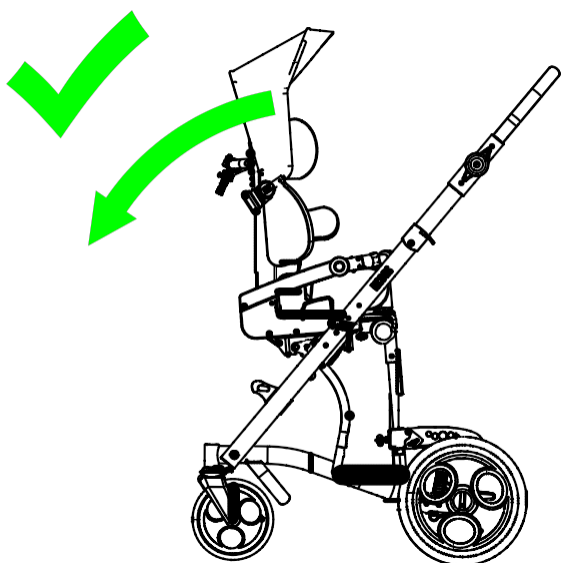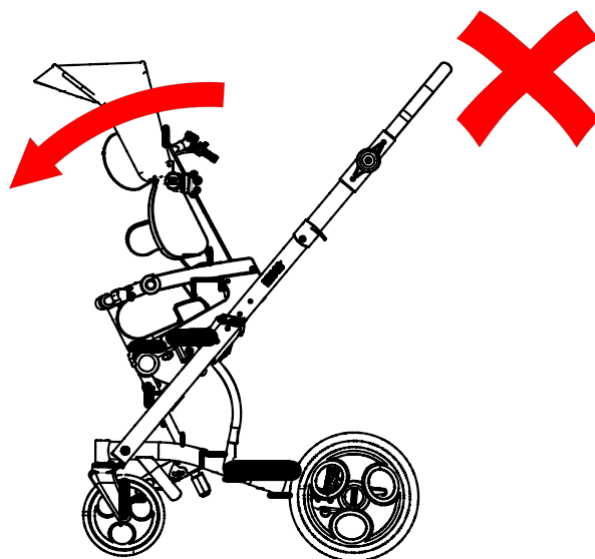

NENAKLÁPĚJTE OPĚRKA ZAD DOPŘEDU

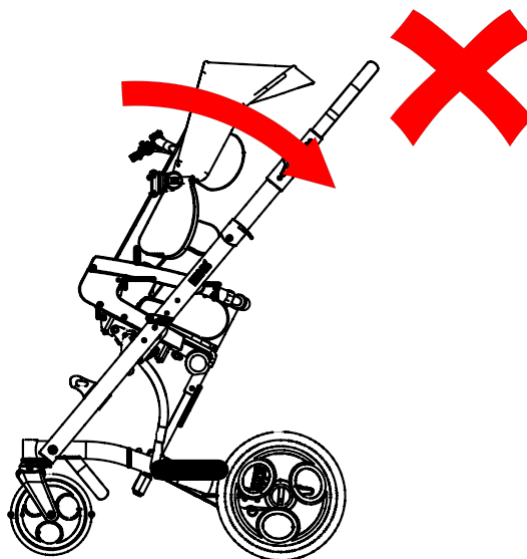

Obr. 13



UPOZORNĚNÍ! Při nastavování úhlu sedačky držte rukojeť I hrazdu (2 a 3 na Obr. 12)




UPOZORNĚNÍ! Během nastavování sklonu sedačky věnujte pozornost možnému zranění rukou způsobenému pohyblivými částmi kočárku.



UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k rozsahu nastavení úhlu sedačky je možné, že nastavíte polohu kde je hlava dítěte za úroveň pelvisu. Takové nastavení je zakázané, může vést i k zadušení dítěte.

12.7 Parkovací brzda

Zadní kola zabrzdíte páčkou na spodní části rámu, zvednutím páčky je odbrzdíte. Obr. 14

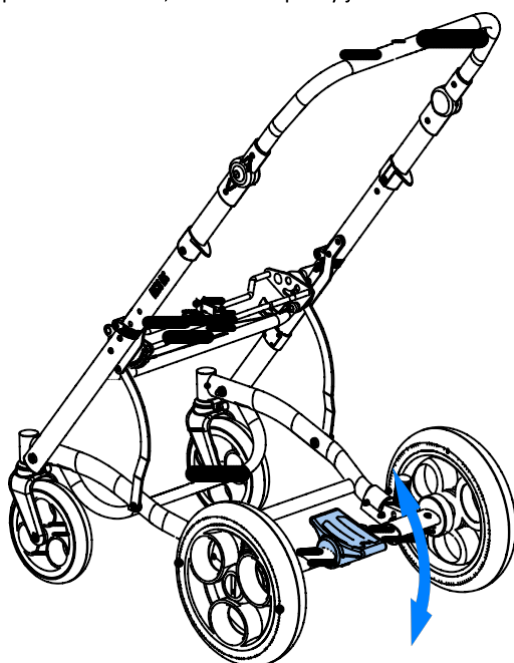

Obr. 14



UPOZORNĚNÍ! Brzdy pravidelně kontrolujte, očistěte od bahna a hlíny.



UPOZORNĚNÍ! Stabilita kočárku může být narušena v případě nebezpečného tlačení, skládání a nebo pokud se někdo o kočárek opře.

12.8 Tlumič zadního zavěšení

Tlumiče zadního odpružení umožňují nastavení dvou úrovní odpružení a tedy komfortu. Uživatel si může nastavit úroveň tuhosti odpružení posunutím páčky (1) do další pozice dle svých potřeb obr. 15. Toto nastavení je nutné provést jak na pravé, tak na levé straně.



Obr. 15


13 Sedačka kočárku



UPOZORNĚNÍ! Po každé změně nastavení je nezbytné zkontrolovat zda jsou všechny šrouby a matice utažené.

13.1 Nastavení úhlu zádové opěrky

Pro nastavení sklonu opěradla chytte jednou rukou madlo (1) a druhou rukou zatáhněte za západku (2) obr. 16. Po dosažení požadovaného úhlu, západku pusťte (2). Pohybem madla nahoru a dolů se ujistěte, že je opěrka ve stabilní poloze. Nepoužívejte kočárek, když je nastavení zádové opěrky uvolněné

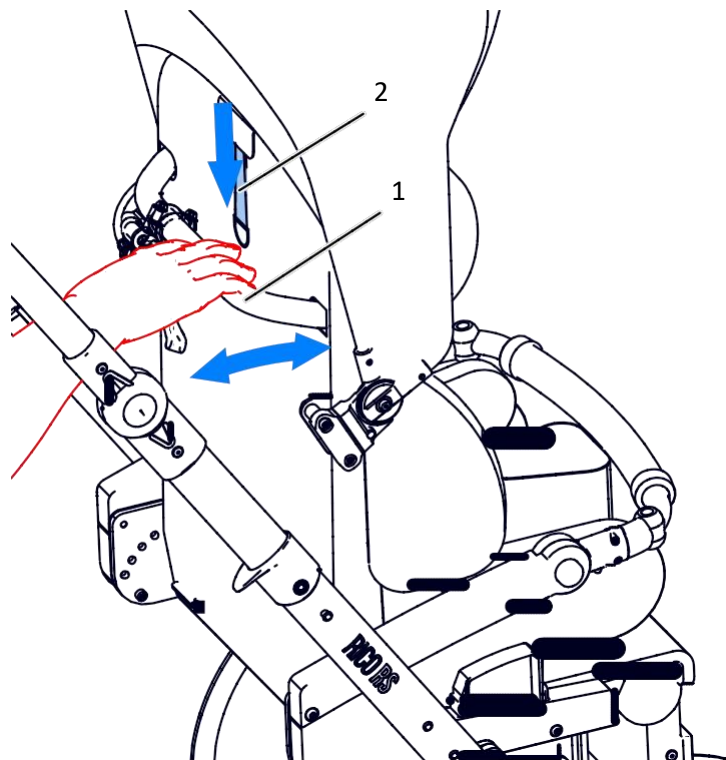

Obr. 16




UPOZORNĚNÍ! Během nastavování sklonu opěrky věnujte pozornost možnému zranění rukou způsobenému pohyblivými částmi kočárku.



UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k rozsahu nastavení úhlu opěrky je možné, že nastavíte polohu kde je hlava dítěte pod úroveň pelvisu. Takové nastavení je zakázané, může vést i k zadušení dítěte.

13.2 Nastavení výšky zádové opěrky


Pro nastavení výšky opěradla, obr.17, uvolněte pojistku hrudní opěrky a pojišťovací šroubky (2). Po dosažení požadované výšky, pojistku znovu zajistěte (2). Maximální vysunutí opěradla je označeno nápisem MAX – nápis je viditelný po dosažení maximální výšky opěrky. Prodloužení opěradla nad označení MAX není dovoleno.

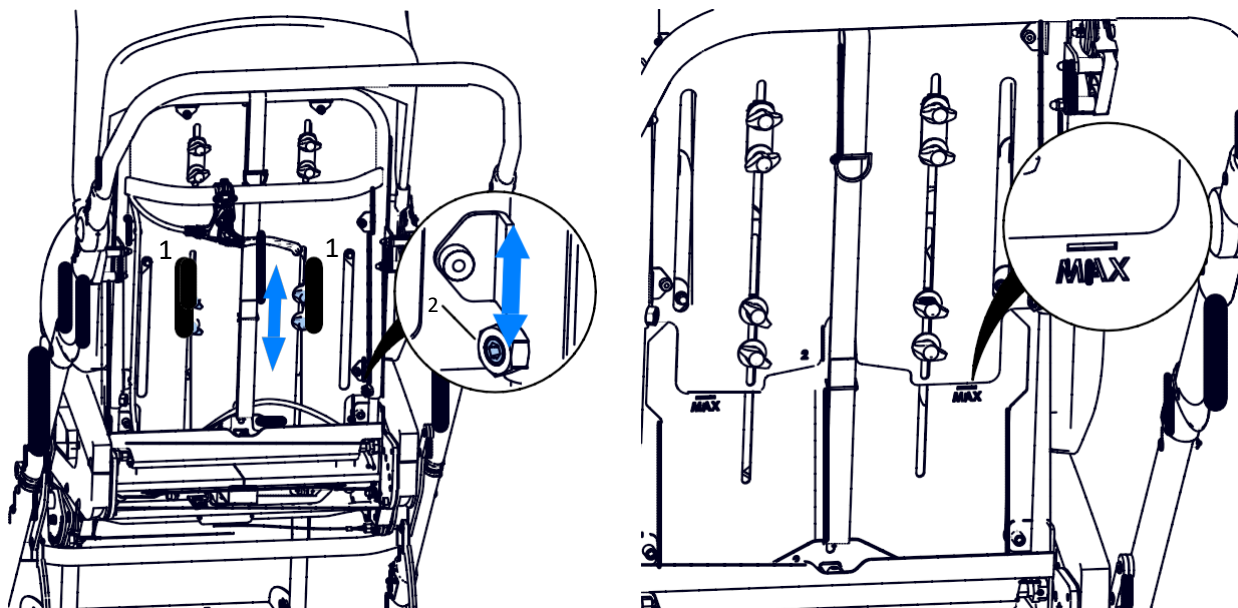

Obr. 17

13.3 Nastavení výšky podpory hrudníku


Pro nastavení výšky podpory hrudníku (2), uvolněte pojistky (1) obr.18 a upravte nastavení podpory (2). Po dosažení požadované výšky, pojistky které blokují pohyb podpěry znovu zajistěte (2). Poloha pravé a levé hrudní opěrky je nezávislá a lze je nastavit individuálně.

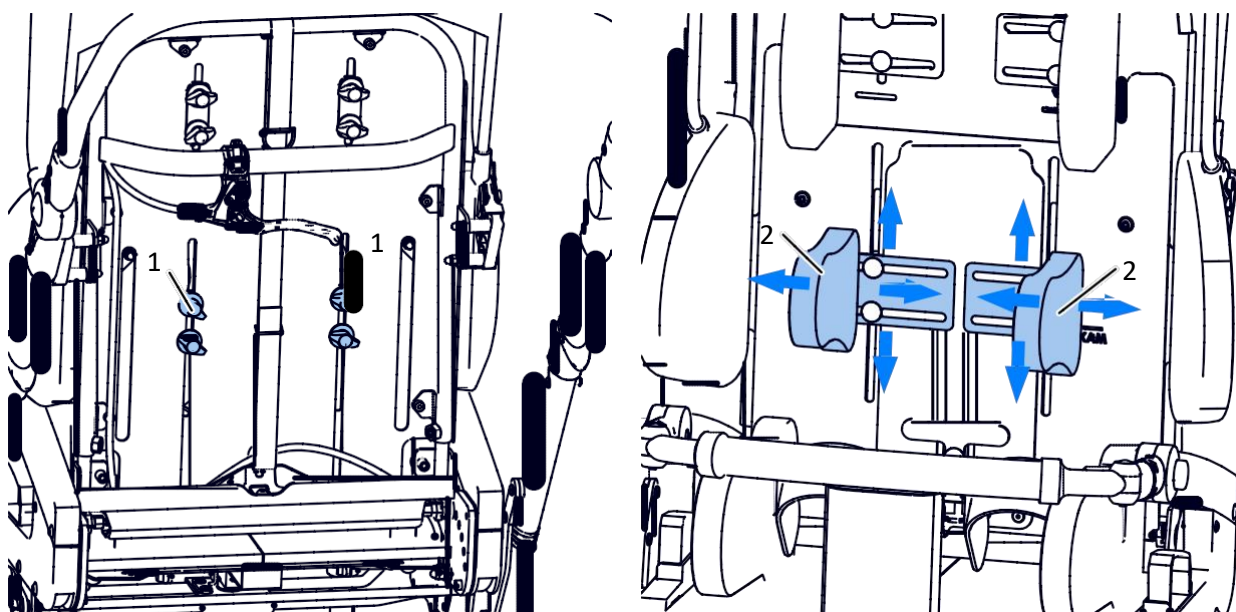

Obr. 18

13.4 Nastavení opěrky hlavy


Pro nastavení opěrky hlavy (2) uvolněte pojistky (1) obr. 19 a po nastavení pojistky opět zajistěte (1) aby jste zablokovali její pohyb. Poloha pravé a levé opěrky hlavy je nezávislá a lze je nastavit individuálně.

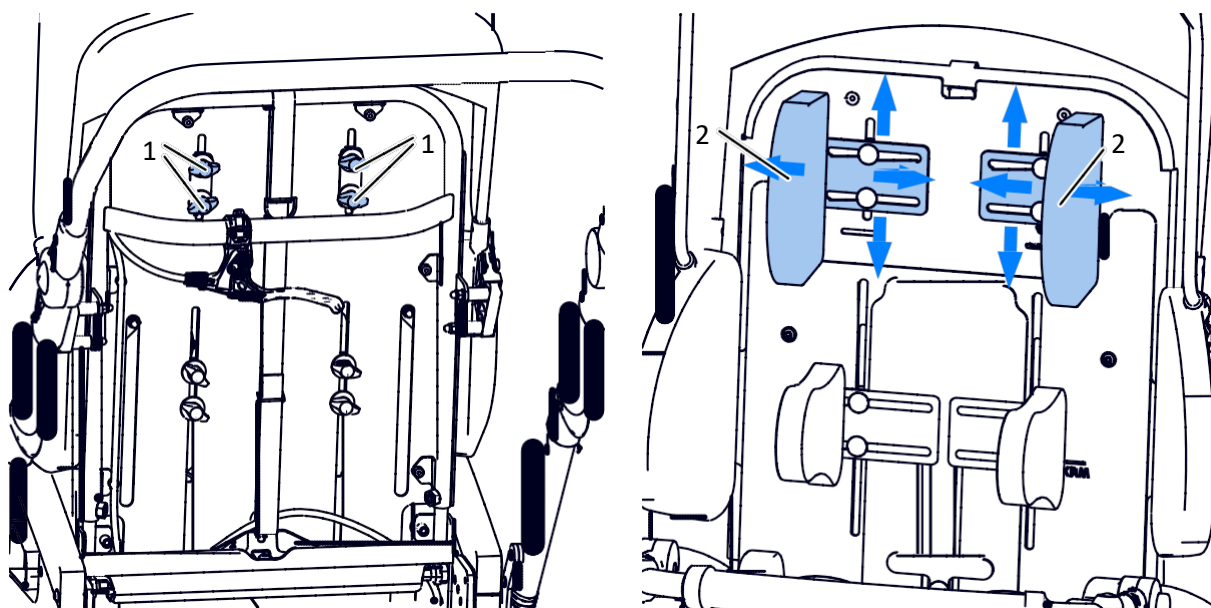

Obr. 19

13.5 Nastavení podpory pánve

Pro nastavení podpory pánve (1) uvolněte pojistky (2) pod sedačkou obr. 20. Po dosažení požadovaného nastavení (1) pojistky znovu zajistěte (2), aby jste zablokovali jejich pohyb. Poloha pravé a levé podpory pánve je nezávislá a lze je nastavit individuálně.

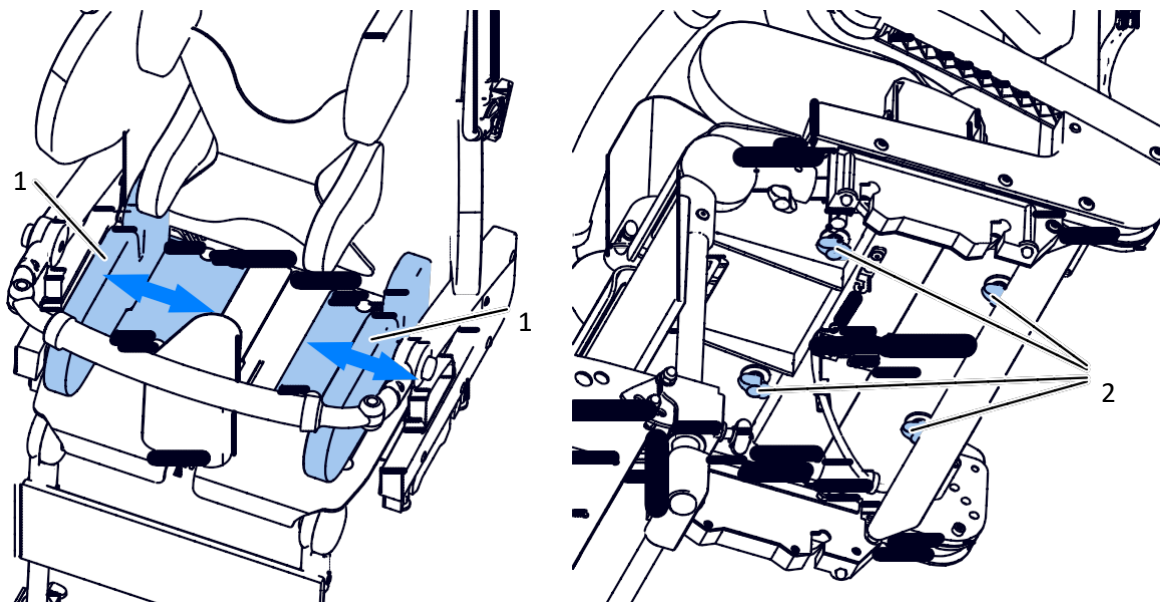


Obr. 20

13.6 Nastavení hloubky sedačky

Sedačka umožňuje vyhovět individuálním požadavkům každého dítěte nezávislým nastavení hloubkové asymetrie levého/právěho stehna. Je tedy možné nezávisle regulovat pravou (1) a levou (2) část sedačky.


Pro nastavení uvolněte pojistky (3) podpory pánve a hloubky stupačky (4). V případě nastavení asymetrie sedačky je také nutné povolit pojistky (5) vodící lišty stupaček pod sedačkou a pojistku na nastavení klínu. Hloubku sedačky nastavíte vytažením nebo zatlačením plošin do požadované hloubky. Po nastavení všechny pojistky (6), (5), (4) utáhněte, zablokujte stupačky a utážením pojistky (3) nastavíte požadovanou podporu pánve.

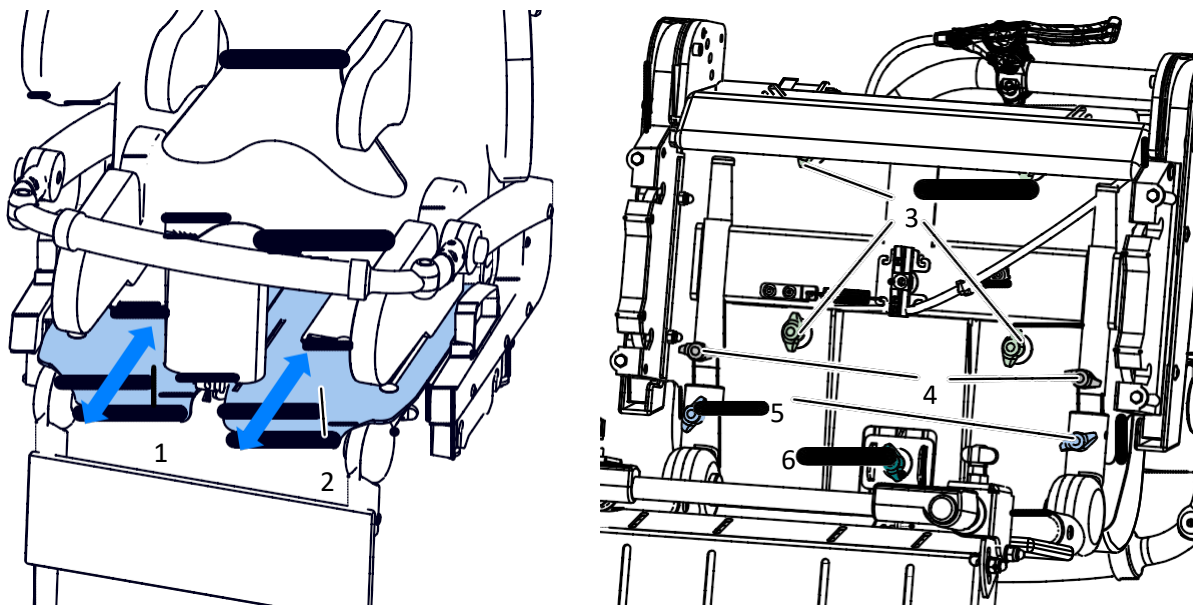

Obr. 21

13.7 Nastavení úhlu opěrky nohou


Nastavení sklonu opěrky nohou lze upravit nastavením pod sedačkou. Pro nastavení úhlu, uvolněte pojistky (1) a nastavte do požadované pozice. Po dosažení požadovaného nastavení (1) pojistky znovu zajistěte (2), aby jste zablokovali jejich pohyb.

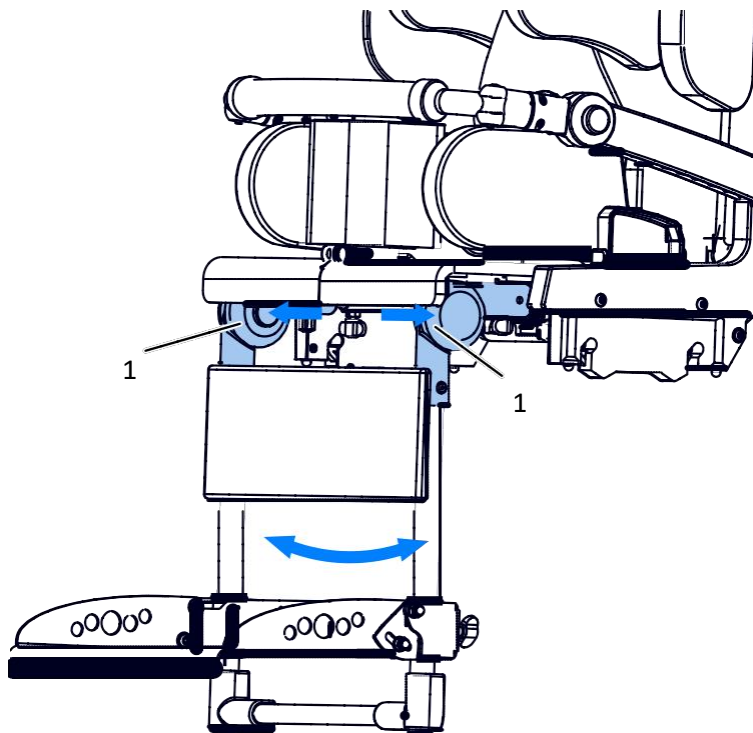

Obr. 22

13.8 Nastavení hloubky opěrky nohou


Podnožky mohou být nastavené nezávisle na pozici sedačky. Pro nastavení hloubky uvolněte pojistky (1) and (2). Po dosažení požadované délky pojistky utáhněte a zablokujte stupačky.

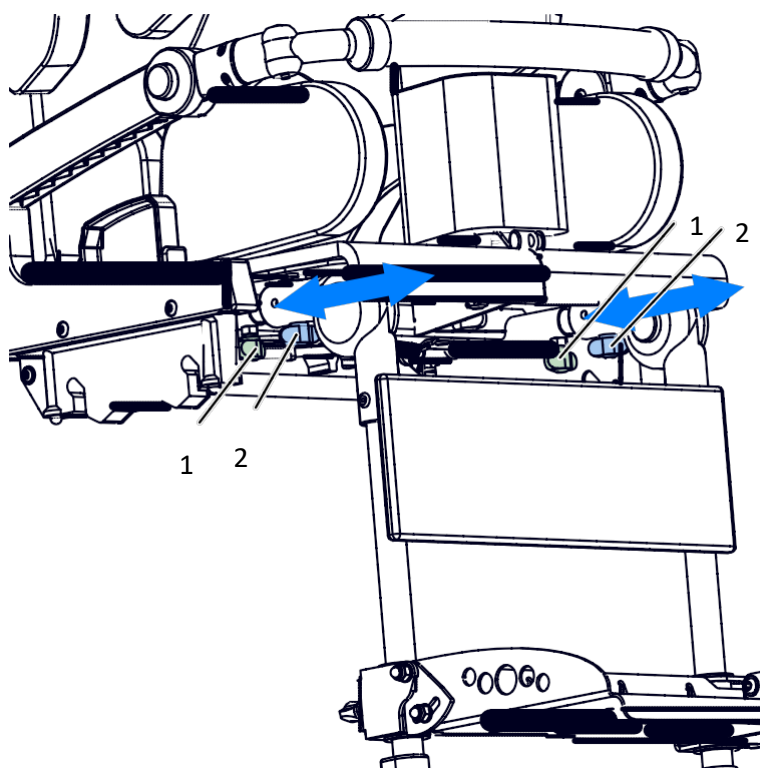

Obr. 23

13.9 Nastavení výšky a úhlu opěrky nohou


Pro nastavení výšky opěrky nohou obr. 24, uvolněte pojistky (1), nastavte požadovanou výšku a pojistky znovu zajistěte. Pro nastavení úhlu, uvolněte pojistky (2), nastavte úhel plošiny a pojistky (2) znovu zajistěte.

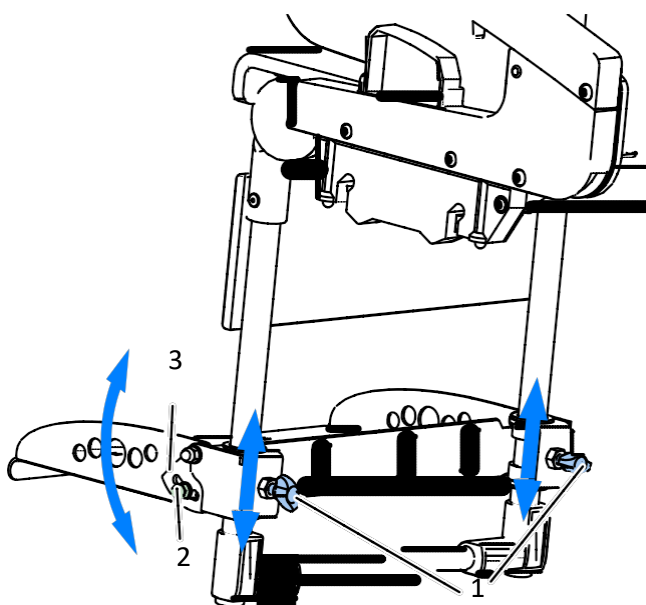

Obr. 24


13.10 Seřízení a demontáž bezpečnostní zábrany

Pro nastavení bezpečnostní zábrany (2) uvolněte pojistky (1) seřizovače úhlu na obou stranách sedačky obr. 25. Nastavte požadovanou polohu zábrany, Po dosažení požadovaného nastavení zábrany pojistky znovu zajistěte.

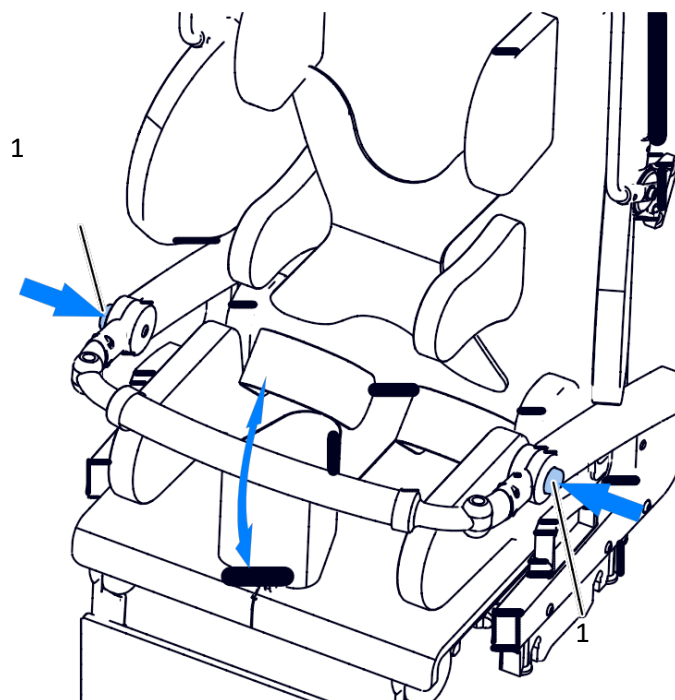

Obr. 25


Bezpečnostní zábranu můžete odstranit, obr. 26. Uvolněte pojistku seřizovače úhlu (2) a vyjměte zábranu.

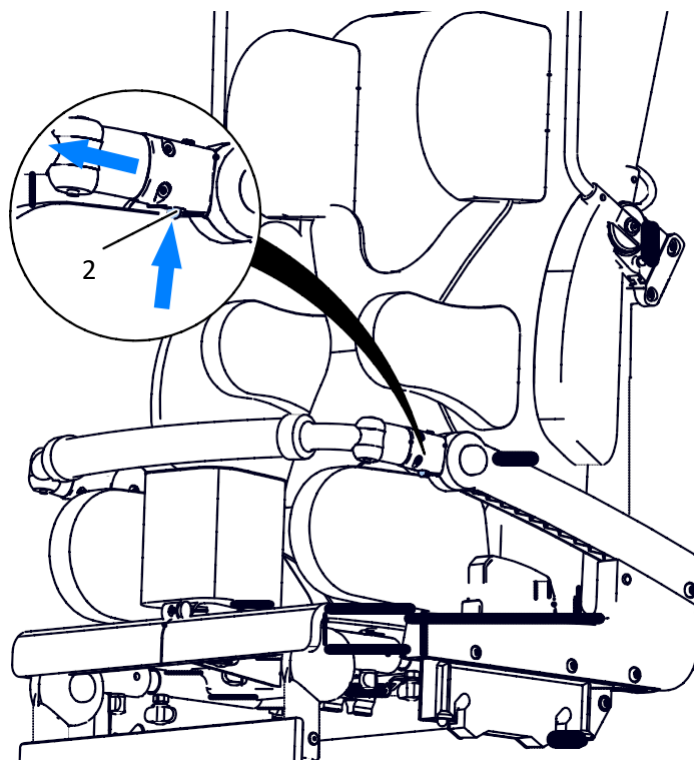

Obr. 26

13.11 Stříška


Pro namontování stříšky, zasuňte pojistky stříšky (1) do otvorů na obou stranách zádové opěrky až do zapadnutí. Pro sundání stříšky uvolněte pojistky (3) na háčcích (1) na obou stranách zádové opěrky a stříšku vysuňte směrem nahoru.

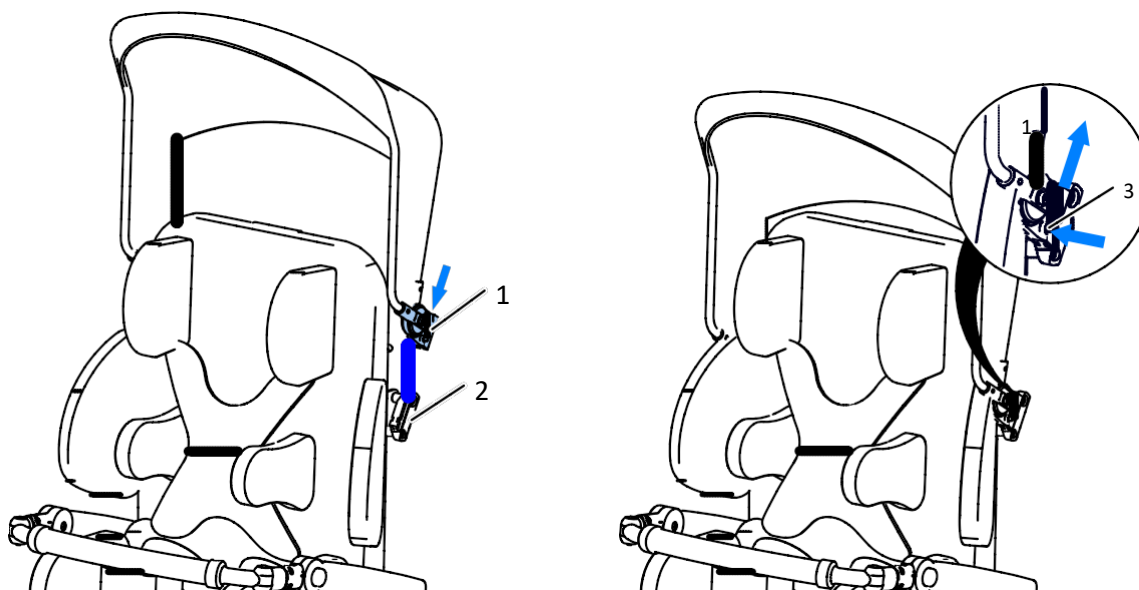

Obr. 27

13.12 Podpora beder


Sedačka umožňuje nastavení zádové opěrky. Správné nastavení koresponduje s tvarem zad pacienta a jeho potřebám. Pro vyklenutí bederní opěrky nahoru (1) šroub utáhněte, uvolněním (2) se vyklenutí zmenší.

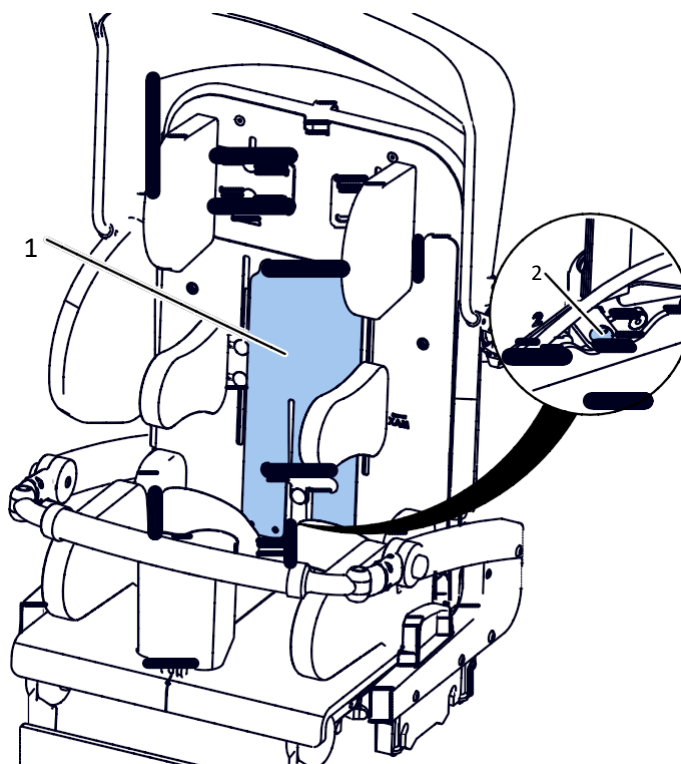

Obr. 28

13.13 Vesta a abdukční pásy

Upevňovací horní pásy vesty jsou připevněny přímo k rámu opěrky. Spodní pásy se používají jak pro vestu, tak pro abdukční pásy a jsou připevněny k sedačce. Vesta je s pásy spojena pomocí samosvorných přezek. Tyto přezky se uzamknou posunutím obou částí přezky „zacvaknutí“. Pro rozepnutí vesty stiskněte přezku v její střední části, západka se odjistí a přezku lze otevřít. Vestu i abdukční pásy lze upravit pomocí délky upínacích pásů. Správné nastavení vesty by mělo zajistit správnou stabilizaci dětského těla, avšak by nemělo způsobovat nepohodlí.

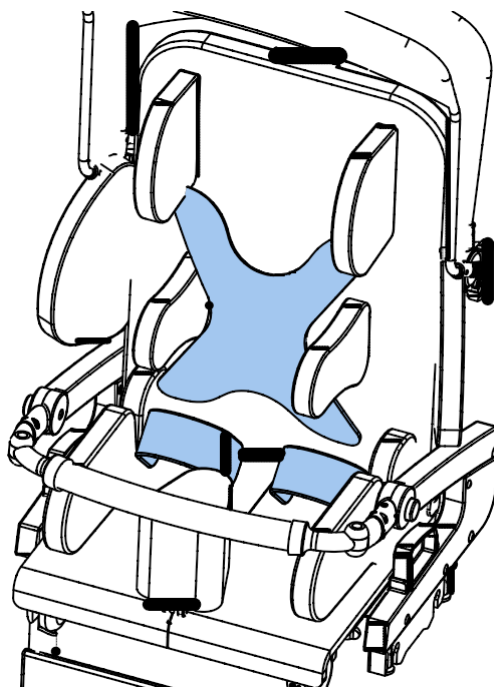

Obr. 29




UPOZORNĚNÍ! Vždy se ujistěte že je vesta správně zajištěna všemi čtyřmi přezkami. Bez správného zajištění, může dítě z kočárku vypadnout.

14 Doplnky

14.1 Abduktor


Před nastavením abduktoru vždy nejdřív sundejte kryt (1). Pro nastavení uvolněte šroub (2), posuňte abduktor na správné místo a nakonec abduktor (2) přišroubujte a nasadte na něj kryt.

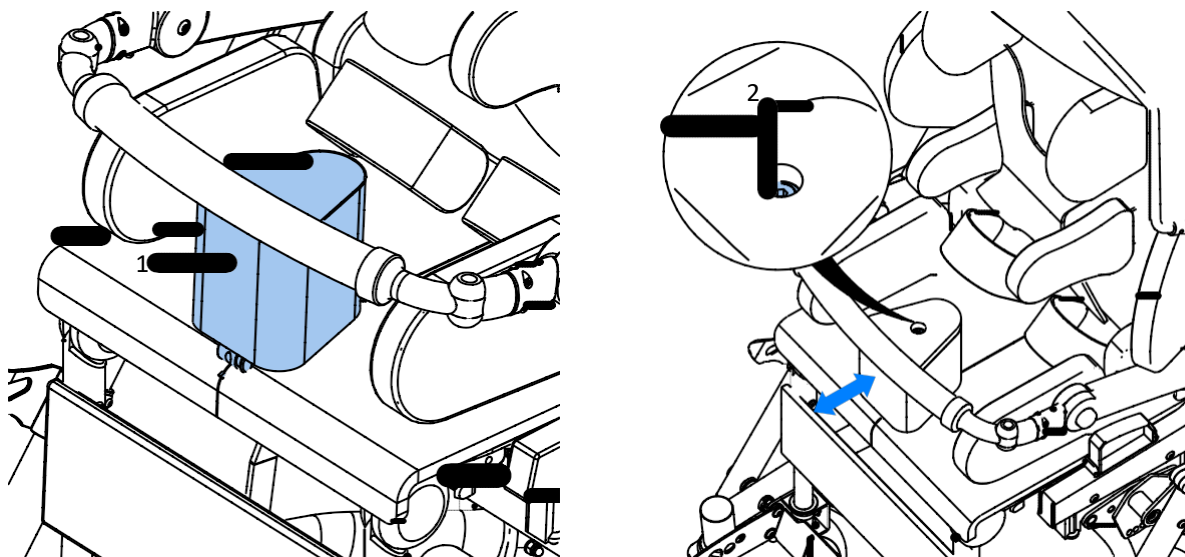

Obr. 30

14.2 Pláštěnka


Pláštěnka by měla být umístěna tak, že její pružné okraje umístíte za opěradlo a opěrku nohou.

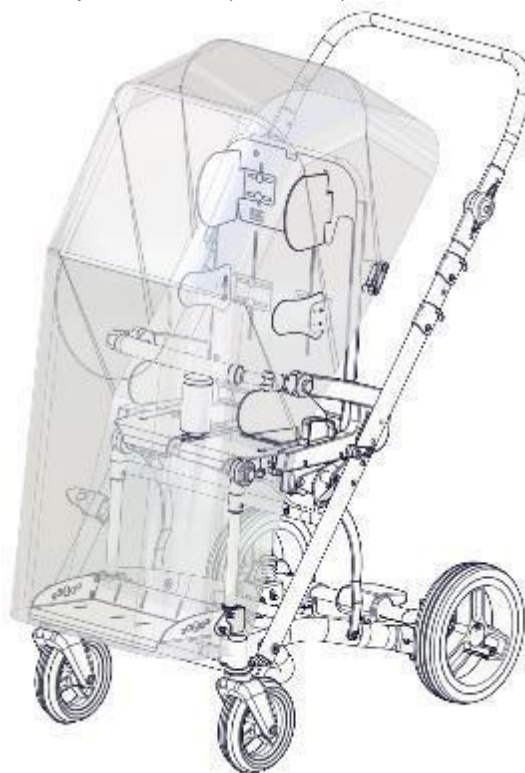

Obr. 31


14.3 Stolek

Při montáži stolku (2) je třeba nejprve namontovat adaptéry (1) místo pro bezpečnostní zábrany a poté zasunout stolec do otvorů adaptéru. Po dosažení požadovaného nastavení (1) pojistku znovu zajistíte (3), aby jste zablokovali jeho pohyb obr. 32.

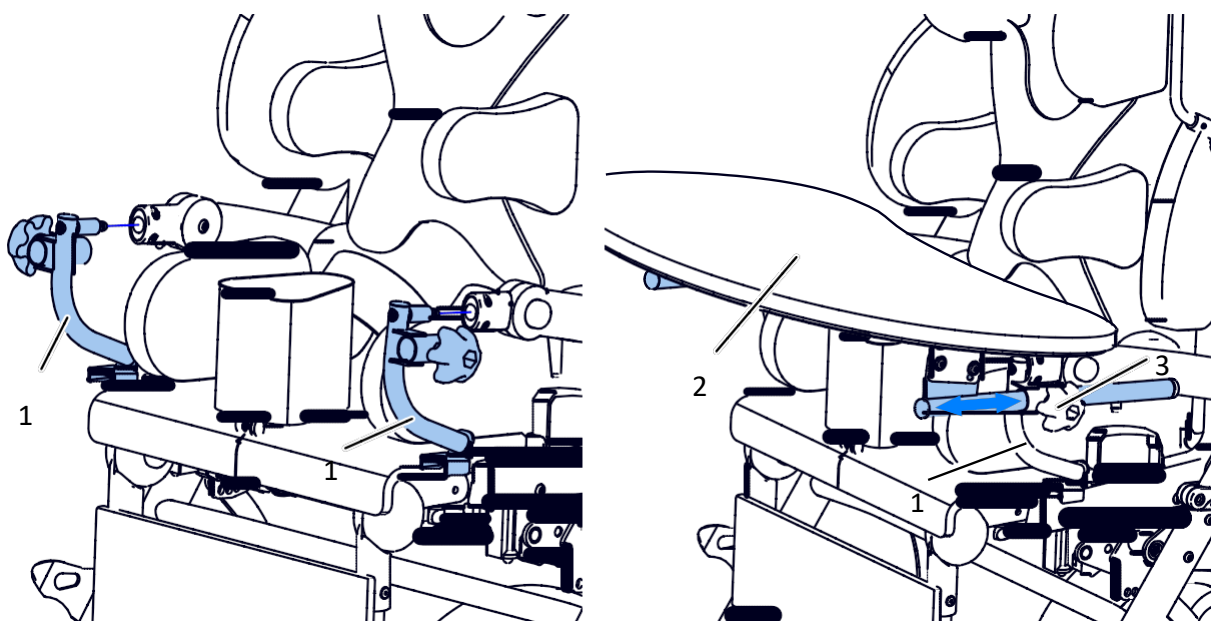

Obr. 32

Úhel sklonu stolku obr. 33 se nastavíte povolením dvou šroubů (1) umístěných nad adaptéry stolku pod jeho deskou. Po dosažení požadovaného úhlu náklonu šrouby utáhněte. Seřizovací šrouby jsou na levé i pravé straně stolku.

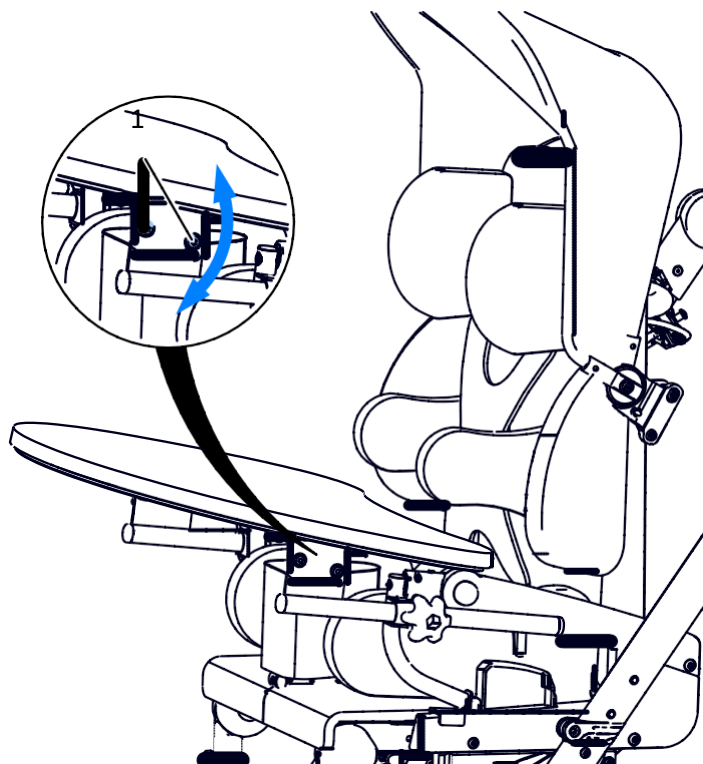

Obr. 33

14.4 Rukávník

Rukávník připevněný k rukojeti kočárku zvýší pohodlí doprovodu při procházkách.

14.5 Fusak


Spacák chrání nohy dítěte před chladem.



Obr. 34

14.6 Pěnová opěrka hlavy

Pěnová opěrka poskytuje dítěti přesnější podporu hlavy. Konstrukce umožňuje namontovat opěrky hlavy mezi podpory hlavy. Pokud je potřeba nastavit montáž opěrky hlavy asymetricky, je potřeba opěrku hlavy sejmout a nastavit ji do libovolné požadované polohy.

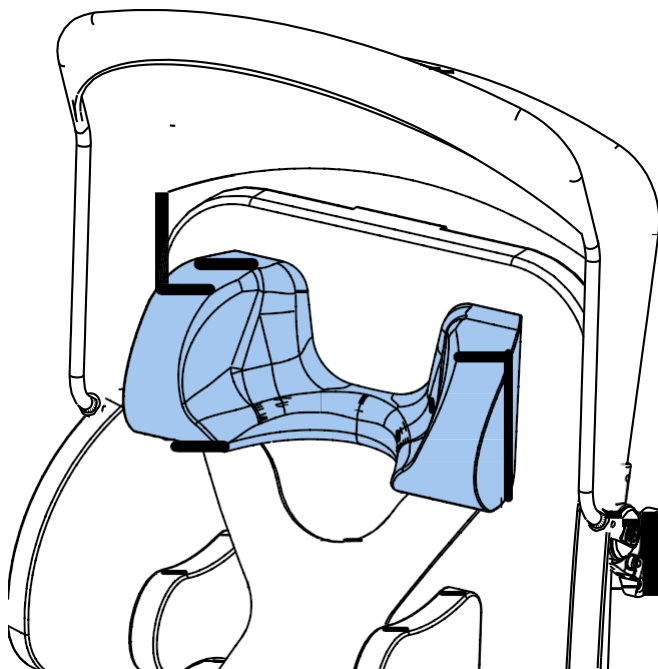


Obr. 35

14.7 Nákupní košík

Nákupní košík lze použít pro přepravu příručních zavazadel. Je umístěn na rámu kočárku.


14.8 Košík

Košík (1) je připevněn k rámu popruhy (2). Základna je vybavena popruhy (3) kterými lze košík upevnit pokud je kočárek přepravován.

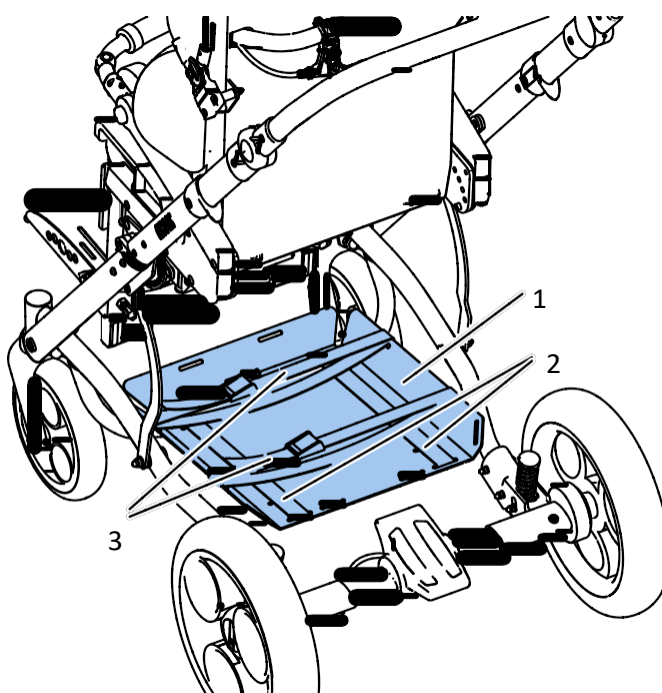

Obr. 36


14.9 Výplň potahu pro podnožku

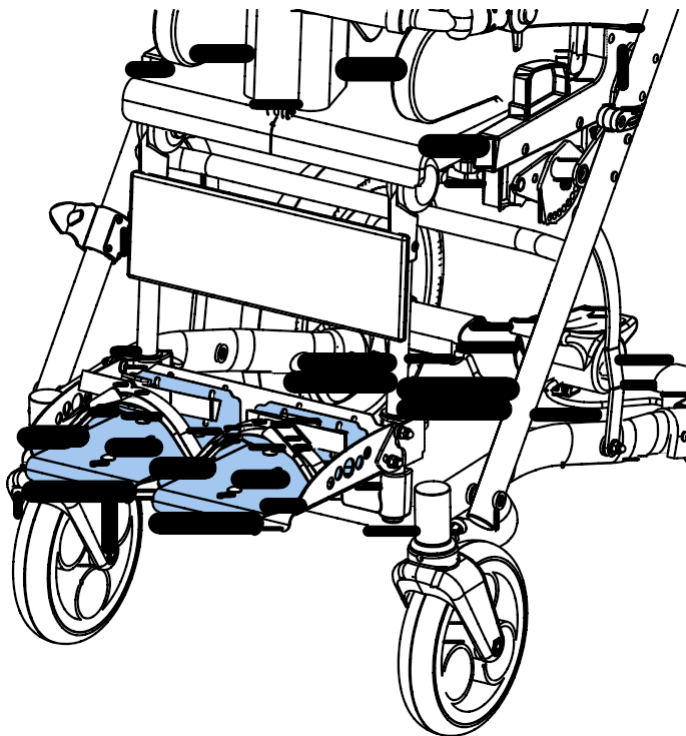

Obr. 37

Výplň potahu pro podnožku umožňující asymetrické nastavení opěrky nohou. Pro nastavení výplně potahu: Obr. 38.

1. Pojistky (6) povolíte otočením doleva.
2. Vytáhněte plošinku podnožky (1) a upravte podle umístění nohou
3. Zablokujte pohyb plošky utahením pojistek (2) (otočením doprava).

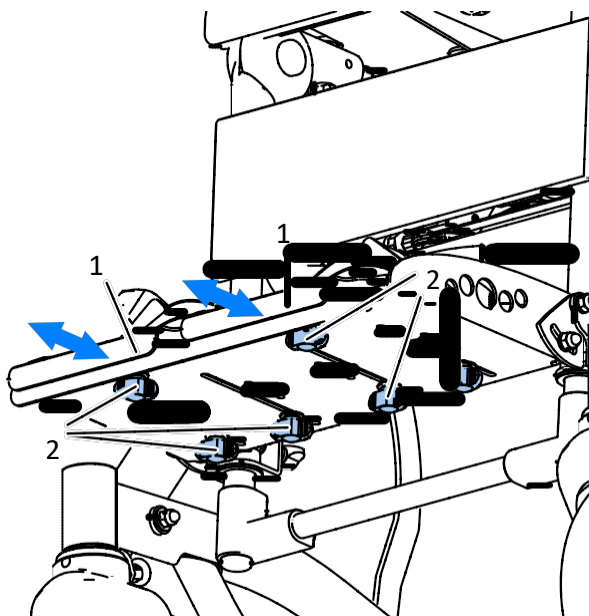

Obr. 38

14.10 Rám podvozku a sada adaptérů

Pro použití sedačky kočárku doma je potřeba použít rám a sada adaptérů. Tento rám má vlastní uživatelskou příručku.

15 Čištění a údržba

Dětský kočárek KAKADU specializované mechanické zařízení s nosnou konstrukcí vyrobenou z hliníku a práškově lakované oceli. Pěnové a houbové výplně jsou připevněné ke kovové konstrukci. Výplně jsou vyrobené z textilních materiálů, které nedráždí pokožku. Dětský kočárek KAKADU specialist, stejně jako jakýkoli jiný zdravotnický prostředek, by měl být udržován v čistotě a používán podle doporučení výrobce.

- Povrchy s práškovým nástřikem a prvky vyrobené z plastu by se měly čistit vlhkým hadříkem. Je možné použít jemné mycí prostředky. Mechanicky vysajte vysavačem nebo vyčistěte měkkým kartáčem.
- Pěno-houbové vložky je možné čistit vlhkým hadříkem a jemným chemickým prostředkem. Po vyčištění je důležité nechat vložku zcela vyschnout při pokojové teplotě.
- Pravidelně provádějte údržbu rámu, odstraňujte nečistoty a bláto z pohyblivých částí zařízení.
- K čištění kočárku nepoužívejte agresivní prostředky.
- Čalounění sedačky neperte v pračce.
- Vyhněte se dlouhodobému pobytu na slunci a před vložení dítěte do kočárku vždy zkontrolujte teplotu sedačky.




UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku se ujistěte, že je čalounění zcela suché.



UPOZORNĚNÍ! Kočárek by měl projít údržbou alespoň jednou ročně (každých 12 měsíců).

Údržbu by měl provádět kvalifikovaný servisní technik. Postup údržby musí zahrnovat bezpečnostní přehled kočárku - ověření stavu spojů, které se během používání pohybují, zámkové a regulační mechanismy. Pravidelná údržba zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání kočárku.

16 Identifikační štítek

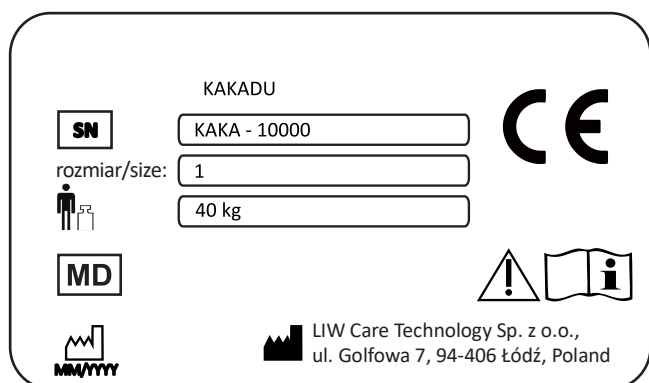

Obr. 39

17 Záruka/údržba

V případě, že dojde k závadám nebo poškození, přestaňte přístroj okamžitě používat a obraťte se na prodejce nebo výrobce. Poškozené zařízení zajistěte, aby nedošlo k dalšímu poškození. Nepokoušejte se zařízení opravit. Nenahrazujte žádné originální díly neoriginálními náhradními díly nebo získanými z jiného zdroje, než je zdroj doporučený výrobcem.

- Pokud se uživatel rozhodne ukončit provoz zařízení, je povinen s ním nakládat v souladu s předpisy o životním prostředí.
- Výrobce stanoví životnost výrobku na 5 let.
- Servis zařízení po záruce provádí výrobce.

Kontaktní údaje servisního oddělení:
LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Lodž.
www.liwcare.pl
e-mail: reklamacje@liwcare.pl

- Aktuální údaje o adrese lze získat na následujících webových stránkách: www.liwcare.pl.
- Záruční podmínky byly stanoveny v záručním listě, který je nedílnou součástí této uživatelské příručky. Záruční list naleznete na poslední stránce tohoto dokumentu.
- Záruční podmínky a záruční list platí na území Polska.

ZÁRUČNÍ LIST

Podmínky záruky:

- Výrobce tohoto zdravotnického prostředku – LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polsko) – zaručuje, že společnost prodává provozuschopné zařízení prosté výrobních, montážních, materiálových a jiných vad a že toto zařízení bude prosté těchto vad během záruční doby. Tato záruka nepokrývá užitečnost výrobku pro účely kupujícího.
- SPOLEČNOST LIW Care Technology Sp. z o.o. poskytuje na své výrobky dvouletou záruku počínaje dnem nákupu.
- Jediným dokladem o záruce je tento záruční list vystavený prodejcem kupujícímu spolu s dokladem o koupi (faktura nebo účtenka). Pro přenos nároků ze záruky je nutno provést převod držení tohoto záručního listu.
- V případě zjištění jakýchkoli poruch nebo vad během záruční doby výrobce odstraní vadu na své vlastní náklady. V případě výměny dílů se odstraněný díl stane majetkem společnosti LIW Care Technology Sp. z o.o. a nebude vrácen uživateli záruky.
- Na základě této záruky je uživatel povinen v průběhu záruční doby nahlásit fyzickou vadu na výrobku prostřednictvím formuláře uvedeného na naší webové stránce: www.liwcare.pl, a to po předchozím přihlášení se do „zákaznické zóny“ poštou na LIW Care Technology Sp. z o.o. nebo na tel. číslo: +48 42 212-35-18.
- Uživatel záruky je povinen vyplnit reklamační formulář a zaslat ho do Obchodu, kde zařízení zakoupil, nebo přímo výrobci na e-mailovou adresu reklamacje@liwcare.pl.
- Na základě reklamační formy obdržené e-mailem rozhoduje prodávající o způsobu opravy. Proávající může:
 - Objednat opravu zařízení na místě s uživatelem záruky - v takovém případě je datum opravy zařízení dohodnuto s oznamující stranou e-mailem nebo telefonicky.
 - Objednat dopravu přístroje k výrobci za účelem jeho opravy - v takovém případě je uživatel povinen dodat zařízení do zdravotnické prodejny, kde bylo zakoupeno, nebo na sídlo výrobce spolu s dokladem o nákupu a vyplněným reklamačním listem. Zboží, které je předmětem reklamacie, je prodávajícímu zasláno po odsouhlasení termínu vyzvednutí kurýrem. Náklady na dopravu hradí výrobce.
- Tato záruka se nevztahuje na následující případy:
 - opotřebované prvky a díly, které byly opotřebované nebo poškozené v důsledku nesprávného použití (mimo jiné včetně použití, které není v souladu s vydaným uživatelským návodem nebo za nevhodných podmínek) nebo nevhodného skladování výrobku,
 - poškození způsobené změnami, úpravami, úpravami a konstrukčními změnami, které provedl uživatel výrobku nebo třetí strany,
 - poškození způsobené nesprávným čištěním nebo nesprávnou údržbou výrobku uživatelem nebo třetí stranou,
 - poškození způsobené běžným opotřebením nebo obvyklým zastaráním výrobku,
 - poškození způsobené nedbalostí uživatele (zejména například při údržbě a čištění výrobku,
 - Poškození způsobené vnějšími vlivy (znečištění, mechanické poškození a poškození vodou).
- Záruka a podmínky v nich uvedené se vztahují pouze na území Polské republiky. V jiné zemi se obraťte na místního distributora.
- Záruka nezahrnuje regulaci a seřízení v průběhu záruční doby, protože se nejedná o vadu výrobku.
- Záruka je podmíněna dodáním výrobku do zdravotnického skladu, kde byl prostředek zakoupen, nebo výrobcí způsobem, který zabráni jeho poškození.
- Záruční oprava nebo výměna bude provedena, pokud možno do 30 dnů od řádného dodání výrobku držitelem záruky společnosti LIW Care Technology Sp. z o.o.
- Po záruční opravě bude výrobek doručen na náklady společnosti LIW Care Technology Sp. z o.o. na adresu dodavatele. V případě, že nebude obdržen správně adresovaný obal, bude držitel záruky povinen nést veškeré náklady související s dopravou a uskladněním výrobku.
- Záruka kvality poskytnutá společností LIW Care Technology Sp. z o.o. nemá vliv na zákonná práva kupujícího.

POZNÁMKA!

ZÁRUČNÍ LIST UCHOVÁTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

Před přijetím výrobku k záruční opravě bude LIW Care Technology Sp. z o.o. vyžadovat předložení tohoto dokumentu.

Název produktu /typ: Sériové číslo:

Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:

Číslo.	Datum přijetí do servisu	Provedené činnosti	Datum ukončení opravy	Razítko a podpis osoby provádějící opravu
1				
2				
3				
4				