



MyWam

Individuálně a kompletně

Mewa

Návod k obsluze
a použití

CE

Mewa - Moderní zdravotní kočárek
s vynikajícími jízdními vlastnostmi

1. Účel kočárku MEWA	3
2. Důležité upozornění a bezpečnost	3
3. Účel příručky	6
4. Konstrukce kočárku	7
5. Zařízení	9
6. Antikorozní ochrana	12
7. Opakované použití	12
8. Popis obsluhy kočárku	12
9. Použití	28
10. Čištění a údržba	29
11. Pravidelná údržba	30
12. Technická data kočárku Mewa	31
13. Poznámky	32
14. Výrobce	33
15. Prohlášení o shodě	34
16. Záruční list	35



POZOR! Před použitím kočárku je uživatel povinen si přečíst obsah této příručky a dodržovat pokyny.

1. Účel kočárku MEWA

1. Specialní zdravotní kočárek Mewa je určen pro děti s neurologickými a ortopedickými poruchami, což jim ztěžuje nebo znemožňuje pohyb. Kočárek, díky mnoha nastavením, umožňuje pohodlné a bezpečné přizpůsobení individuálním potřebám dítěte. Kočárek Mewa je určen pro uživatele s výškou 90 - 125 cm a hmotností do 35 kg. Statisticky se jedná o děti ve věku 3-8 let. Při výběru kočárku jsou však nejdůležitější individuální fyzikální vlastnosti a subjekt nemoci konkrétního uživatele. Kočárek používejte podle pokynů specialisty. Rizika spojená s používáním zdravotního kočárku jsou podrobně popsána v bodě 2 - "Důležité tipy a bezpečnostní pravidla".

1.1. Rozsah použití vozíku

Kočárek Mewa je určen pro vnitřní i venkovní použití (byty, denní centra) a venku (parky, ulice) na tvrdých a rovných pozemcích.

2. Důležité upozornění a bezpečnost

2.1 UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku se ujistěte, že je správně smontován a že všechny mechanismy, háčky a upevňovací prvky jsou řádně složené, zajištěné a připravené k použití. To platí zejména pro mechanismus skládání rámu, svorky rámu k sedací části a montáž všech čtyř kol.

2.2 UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru v kočárku.

2.3 UPOZORNĚNÍ! Nedodržování pokynů, zejména těch, které se týkají pohyblivých částí kočárků, může být pro uživatele nebezpečné. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití.

2.4 UPOZORNĚNÍ! Aby nedošlo k poranění, ujistěte se, že je dítě při rozkládání a skládání kočárku v bezpečné vzdálenosti.

2.5 UPOZORNĚNÍ! Pro Vaše dítě vždy používejte bezpečnostní systémy. Patří mezi ně: pětibodové pásy, klín, stabilizační kalhoty, ledvinové peloty, peloty opěrky hlavy, opěrky nohou, popruhy pro nohy, bezpečnostní hrazda nebo stůl.

2.6 UPOZORNĚNÍ! Před použitím musí být kočárek kompletně sestaven. V případě jakýchkoli problémů v této fázi se neprodleně obraťte na prodávajícího nebo výrobce.

2.7 UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení.

2.8 Kočárek by měl být pravidelně čistěn a ošetřován. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

2.9 Výrobek obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné při požití dítětem.

2.10 Nepoužívejte kočárek, pokud je poškozený, nebo pokud existuje pouze podezření, že došlo k poškození kočárku, nebo že kočárek nefunguje správně. V takovém případě doporučujeme poradit se s prodávajícím nebo výrobcem.

- 2.11 Nepoužívejte jiné příslušenství než originální.
- 2.12 Při vkládání a vyjímání dítěte z vozíku musí být zabrzděna centrální brzda.
- 2.13 Všechny další prvky připojené k vozíku ovlivňují jeho stabilitu.
- 2.14 Veškerá nastavení a regulace by měly být prováděny pod dohledem a péčí lékaře, nebo fyzioterapeuta.
- 2.15 Ke kočárku mohou být použity pouze náhradní díly dodané ,nebo doporučené výrobcem.
- 2.16 Opravy vozíku provedené jinými osobami než autorizovaným servisem výrobce ,ruší platnost záruky. Výrobce neručí za škody nebo škody na výrobku, které mohou být následkem opravy provedené jinými osobami než autorizovaným servisem výrobce.
- 2.17 Výrobce je zodpovědný za správné fungování vozíku pouze v případě, že je zakoupen ve specializovaném zdravotnickém obchodě.



2.18 UPOZORNĚNÍ! Maximální tlak v každém kole nesmí

Překročit 0,8 baru (u nafukovacích kol)



2.19 UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku je uživatel povinen

Seznámit se s obsahem této příručky.

2.20 Před každým použitím vozíku je nutné:

2.20.1 Zkontrolovat zdravotní kočárek z hlediska viditelného poškození nebo jiných vad, které by mohly při používání vozíku ohrozit dítě.

2.20.2 Zkontrolovat správný tlak v kolech.

2.20.3 Zkontrolovat funkčnost centrální brzdy.

2.20.4 Zkontrolujte stav běhounu pneumatik.

2.20.5 Zkontrolujte správnou montáž kol.

2.20.6 Zkontrolujte, zda je rám kočárku správně složen.

Sklopný mechanismus rámu by měl být uzavřen.

2.20.7 Zkontrolujte, zda je sedací část, správně

upevněna na rámu vozíku.

2.20.8 Nastavte prvky vybavení zdravotního kočárku podle rozměrů a potřeb dítěte, např. Nastavte sklon sedadla a sklon opěradla, nastavte odpovídající sklon podnožky ,nastavte odpovídající délku pětibodových pásů.

2.20.9 Po usazení dítěte jej zabezpečte nasazením hrazdy ,případně stolíku.

2.20.10 Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky kočárku, jako jsou: pětibodové pásy, klín, stabilizační kalhoty, bederní peloty, peloty opěrky hlavy, opěrka nohou, popruhy pro opěrky nohou, hrazdou nebo stolíkem.

Uchráníte tím dítě před pádem a vyklouznutím z kočárku a ochráníte nohy dítěte před pádem z podnožky.

2.21 Je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen.

2.22 Je zakázáno ponechat dítě v kočárku bez dozoru dospělé osoby a odpovědného opatrovníka, což platí zejména pro opuštění dítěte ve zdravotním kočárku na nakloněné ploše.

2.23 Je zakázáno jet nahoru nebo dolů po schodech, a to jak s dítětem, tak s kočárkem.

2.24 Ujistěte se, že dítě při vkládání a vyndávání z kočárku nestojí na podnožce.

2.25 Je zakázáno přepravovat dítě ve zdravotním kočárku a současně v jiných dopravních prostředcích, např. v autě, autobusu nebo ve vlaku.

2.26 Je zakázáno používat sedačku jako autosedačku.

2.27 Při vkládání nebo vyndávání dítěte z kočárku se ujistěte, že je zajištěna centrální brzda kočárku.

2.28 Maximální zatížení tašky zavěšené na rukojeti pro zatlačení vozíku je 2 kg.

2.29 Je třeba dbát na to, aby se během používání kočárku končetiny dítěte nedostaly mezi paprsky kol a běžné součásti kočárku.

2.30 Vždy mějte na paměti, že těžiště kočárku se mění, když překonáváte nerovnosti nebo terenní překážky. V tomto případě buďte zvláště opatrní a zajištěte kočárek.

2.31 Při přepravě kočárku v jiných dopravních prostředcích, např. v autě, autobusu, nebo ve vlaku, musí být přeprava kočárku provedena bez dítěte a kočárek musí být dobře chráněn před poškozením. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným zajištěním výrobku během přepravy.

2.32 Je zakázáno zvedat nebo přenášet kočárek s dítětem uvnitř.

2.33 Při manipulaci nebo zvedání kočárku, držte kočárek za rám kočárku. Ve složené poloze má rám kočárku držadlo. Sedací část kočárku by měla být držena za pevné prvky.

2.34 Pro kočárek Mewa je maximální hmotnost dítěte 35 kg. Maximální zatížení cestovní tašky je 2 kg. Maximální nosnost protiskluzového terapeutického stolíku je 3 kg.

Maximální zatížení nákupního košíku je 3 kg.



2.35 UPOZORNĚNÍ! Před a během používání kočárku je nezbytné dodržovat pokyny a bezpečnostní pravidla popsaná v této příručce a řídit se dalšími pokyny popsány v tomto návodu.



2.36 UPOZORNĚNÍ! Při používání nebo provozu nebo skládání kočárku může existovat riziko vzniku pevných a pohyblivých mezer a otvorů. Tyto úkoly byste měli provádět zvlášť opatrně.



2.37 UPOZORNĚNÍ! Před použitím kočárku musí být čalounění vždy suché.



2.38 UPOZORNĚNÍ! Výrobce odpovídá za technické vady nebo poškození kočárku, které se vyskytly pouze za správného použití kočárku. Odpovědnost za správné fungování kočárku spočívá na výrobci pouze v případě přísného dodržování všech doporučení výrobce.



2.39 UPOZORNĚNÍ! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje změnu délky pětibodových pásů!



2.40 UPOZORNĚNÍ! Veškerá seřízení kočárku a jeho součástí, veškerá nastavení, změny, upevnění a další činnosti související s přizpůsobením kočárku musí být provedeny bez dítěte umístěného v kočárku. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vážné ohrožení dítěte a jiných osob!



2.41 UPOZORNĚNÍ! Každá změna sklonu sedadla způsobuje změnu celkového těžiště, které ovlivňuje stabilitu kočárku.

Při používání a provozu kočárku a při jeho skládání a nastavování mechanismů, může být riziko zachycení a nebo stlačení částí těla uživatele / obsluhy /v otvorech, mezerách mezi prvky. Tyto úkoly byste měli provádět zvlášť opatrně. Po dokončení těchto operací stabilizujte polohu dotažením matic / šroubů. Pokaždé, když budete postupovat podle výše uvedených kroků, vytáhněte dítě z kočárku!

Účel instrukce

Příručka obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání kočárku.

Přípravu pro práci, způsob údržby a čištění kočárku a podmínky záruky.

Tento návod uchovávejte na snadno přístupném místě.

Je určen pro osoby, které mají přímou péči o postižené děti a budou kočárek používat.
Je určen také pro lékaře a fyzioterapeuty kočárek obsluhující.

POZOR! Tento návod uchovávejte pro budoucí použití!

4. Stříška kočárku

4.1 Obecná konstrukce kočárku



Popis 4.1.

4.2 Ocelový rám (Popis.4.1. – č. 20) obohacený hliníkovými prvky. Prvky rámu vozíku zahrnují:

- 4.2.1 Nastavitelná, ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku (Popis.4.1. – obr. 15)
- 4.2.2 Přední kola, torzní, gelová nebo nafukovací (Popis.4.1. – obr. 12)
- 4.2.3 Aretační zámek předních kol (Popis.4.1. - obr. 10)
- 4.2.4 Odpružení předního kola (Popis.4.1. - obr. 11)
- 4.2.5 Rychlá demontáž předních kol (Popis.4.1. - obr. 9)
- 4.2.7 Zadní kola, gelová nebo nafukovací (Popis.4.1. - obr. 25)
- 4.2.7 Dvoufázové odpružení zadního kola (Popis.4.1. - obr. 24)
- 4.28. Rychlý demontážní systém zadního kola (Popis.4.1. - obr. 23)
- 4.2.10 Centrální zadní brzda (Popis.4.1. - obr. 22)
- 4.2.10 Nákupní taška (Popis.4.1. - obr. 26)
- 4.2.11 Rámové uchycení pro sedací část (Popis.4.1. - obr. 21)
- 4.2.12 Transportní zámek (Popis. 8.1.1.b.)
- 4.2.13 Rukojeť pro přenášení (Popis. 8.11.)
- 4.2.14 Skládací mechanismus rámu (horní a dolní) (Popis.4.1. - obr. 17)

4.3 Úhlově nastavitelné terapeutické sedadlo (Popis.4.1. – č.1). Mezi jeho prvky patří:

- 4.3.1 Sedací část potažena jedním ze tří typů čalounění: (Popis.4.1. - obr. 7)
 - 4.3.1.1 Syntetický materiál
 - 4.3.1.2 Alcantara
 - 4.3.1.3 Eko-koženka
- 4.3.2 Nastavitelné opěradlo (Popis.4.1. - obr. 16)
- 4.3.3 Upevnění stolíku nebo hrazdy (Popis.4.1. - obr. 19)
- 4.3.4 Protiskluzový terapeutický stolík (Popis. 8.16.)
- 4.3.5 Bezpečnostní hrazda (Popis.4.1. - obr. 4)
- 4.3.6 Pětibodové pásy (Popis.4.1. - obr. 2)
- 4.3.7. Stabilizační kalhotky (Popis.4.1. - obr. 6)
- 4.3.8 Klín (Popis.4.1. - obr. 5)
- 4.3.9 Peloty opěrky hlavy s regulací ↔ nebo ↑ (Popis.4.1. - obr. 14)
- 4.3.10 Prsní a bederní peloty s regulací ↔ nebo ↑ (Popis.4.1. - obr. 3)
- 4.3.11 Nastavitelná stříška s oknem (Popis.4.1. - obr. 13)
- 4.3.12 Nastavitelná opěrka pro nohy (Popis.4.1. - obr. 8)
- 4.3.13 Nánožník (Popis. 8.25.)
- 4.3.14 Slunečník (Popis. 8.26.)
- 4.3.15 Velká turistická taška (Popis.4.1. - obr. 18)
- 4.3.16 Zimní rukavice (Popis. 8.28.)
- 4.3.17 Moskytiéra (Popis. 8.29.)
- 4.3.18 Pláštěnka (Popis. 8.30.)
- 4.3.19 Nášlapná patka (volitelně) (Popis. 8.7.2
a Popis. 4.1. - obr. 27)

5. Zařízení

Speciální kočárek Mewa se vyznačuje velmi bohatým vybavením.

Mezi standardní vybavení rámu vozíku patří:



Obrázek 5.1.2.
Centrální brzda



Obrázek 5.1.3.
Košík na nákupy
(pod kočárkem)

5.2. Mezi standardní vybavení sedací části kočárku patří:



Obrázek 5.2.1.
Protiskluzový terapeutický stůl
(umístitelný místo hrazdy)



Obrázek 5.2.2.
Bezpečnostní hrazda
(umístitelná místo stůlku)



Obrázek 5.2.3.
Pětibodové pásy



Obrázek 5.2.4.
Stabilizační kalhotky



Obrázek 5.2.5.
Klín



Obrázek 5.2.6.
Peloty hlavové
S regulací ↔ nebo ↓



Obrázek 5.2.7.
Peloty bederní
S regulací ↔ nebo ↓



Obrázek 5.2.8.
Nastavitelná stříška s okýnkem



Obrázek 5.2.9.
Regulovatelná podnožka



Obrázek 5.2.10.
Nánožník



Obrázek 5.2.11.
Slunečník



Obrázek 5.2.12.
Velká taška
(upevnitelná na řídítka)



Obrázek 5.2.13.
Zimní rukavice
(upevnitelná na řídítka)



Obrázek 5.2.14.
Moskitiéra
(zap.místo pláštěnky)



Obrázek 5.2.15.
Pláštěnka
(zap.místo moskitiéry)

6. Antikorozní ochrana

Aby nedošlo k poškození kočárku, nesmí být kočárek používán, nebo ponechán ve vlhkém nebo mokřem prostředí. Po navlhčení kočárku jej otřete měkkým hadříkem do sucha a chráňte ho konzervačním prostředkem na bázi lehkého oleje. Kočárek je standardně opatřen nejkvalitnějšími nátěry. V případě poškození laku, by měla být zajištěna oprava nátěru pomocí laku, navrženého naší společností. Pravidelné čištění a mazání mechanismů lehkým olejem zaručí dlouhé a bezproblémové používání kočárku.

7. Opakované použití

Výrobek je vhodný pro opakované použití. Všechny znovu použitelné výrobky podléhají zvýšenému namáhání. Jejich vlastnosti a pevnost se proto mohou od nového výrobku lišit v takovém rozsahu, že je ohrožena bezpečnost pacientů a třetích osob v průběhu jejich používání. Výrobek s náležitou péčí a údržbou, udržuje svou kvalitu po dobu cca 3 let. Pro opětovné použití odstraňte všechny čalouněné prvky a nahraďte je novými. Rám vozíku, včetně kol a vodicích prvků, musí být důkladně vyčištěn a vydezinfikován komerčně dostupnými výrobky. Výrobek musí poté zkontrolovat autorizovaný odborník na opotřebení a poškození. Všechny opotřebované díly a komponenty, které nejsou vhodné pro uživatele, by měly být nahrazeny novými. Takto připravený produkt může být znovu zaveden pro použití. Plán kontrol a informace o součástech a komponentech by měly být převzaty z kapitoly 11 - "Periodické kontroly".

8. Popis obsluhy kočárku

8.1. Sestavení kočárku

8.1.1 Rozložení rámu kočárku.

Pro rozložení rámu kočárku: uvolněte přepravní pojistku a zatáhněte za rukojeť, aby se kočárek zvedl, až zaklapne.

Rám kočárku bude správně sestaven pouze tehdy, když je mechanismus skládání rámu řádně zajištěn. Důkazem toho je jasné "cvaknutí" z dobře zavřeného skládacího mechanismu.



Obrázek 8.1.1a.



Obrázek 8.1.1b.

8.1.2 Montáž předních kol

Namontujte obě přední kola. Za tímto účelem vložte vodící hřídel kola do otvoru systému rychlé demontáže, dokud nezacvakne.

Správné nasazení je doloženo zřetelným „cvaknutím“ z rychlého demontážního systému předních kol.

8.1.3. Montáž zadních kol

Při montáži zadního kola stiskněte tlačítko ve středu kola. Za tímto účelem nasadte kolo na osu systému rychlé demontáže, dokud nezacvakne.

Správná montáž kola je potvrzena „cvaknutím“ z rychlého demontážního systému zadních kol.



Obrázek 8.1.2.



Obrázek 8.1.3.

8.1.4 Montáž sedací části

Sedací část může být namontována po i proti směru jízdy.

Pro montáž sedací části, ji položte na západky rámu. Nyní zatlačte sedací část do zámků až uslyšíte na dvě zacvaknutí.

Správné umístění sedací části je provázeno zřetelnými "cvaknutími" z obou zámků rámu.



Obrázek 8.1.4.

8.2. Rozložení kočárku

8.2.1 Demontáž sedací části

Aby bylo možné sedací část demontovat, zatlačte na dvě barevná tlačítka na spodní straně obou zámků směrem dolů. Poté vysuňte sedací část z uchycení zámků.



Obrázek 8.2.1.

Demontáž zadních kol

8.2.2 Při demontáži zadního kola stiskněte tlačítko uprostřed. Poté vytáhněte kolo z nápravy systému uchycení zadního kola. Stejným způsobem demontujte i druhé kolo.

8.2.3 Demontáž předních kol

Při demontáži předního kola stiskněte tlačítko shora v systému rychlé demontáže. Poté vysuňte hřídel kola z otvoru systému rychlé demontáže předního kola. Stejným způsobem demontujte i druhé kolo.



Obrázek 8.2.2.



Obrázek 8.2.3.


8.2.4.1. Sklopení rámu kočárku - popis skládacího mechanismu umístěného v dolní části rámu.

Pro sklopení rámu kočárku: oba spodní zámky sklopného mechanismu zvedněte nahoru. Pak sklopte rám kočárku a zajistěte pojistkou .

8.2.4.2 Sklopení rámu kočárku - popis skládacího mechanismu umístěného v horní části rámu. Sklopení rámu kočárku: stiskněte červené tlačítko umístěné v horní části skládacího mechanismu rámu a současně vytáhněte obě rukojeti umístěné v horní části skládacího mechanismu rámu. Pak sklopte rám kočárku a zajistěte pojistkou.



Obrázek 8.2.4.1.

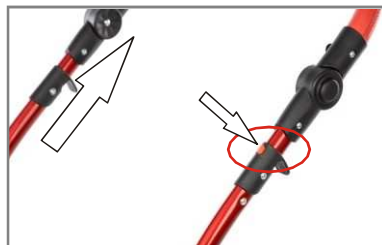

Obrázek 8.2.4.2.

8.3. Nastavitelná, ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku

Pro změnu úhlu rukojeti stiskněte současně obě tlačítka po stranách rukojeti a změňte úhel sklonu. Po nastavení rukojeti do správné polohy tlačítka uvolněte.



Obrázek 8.3.

8.4. Aretace předních otočných kol

Chcete-li přední kola zaaretovat, otočte knoflíkem zámku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li odaretovat otáčení předních kol, otočte knoflíkem zámku ve směru hodinových ručiček.



Obrázek 8.4.a.



Obrázek 8.4.b.

8.5 Odpružení předního kola

Kočárek je vybaven odpružením vidlice předních kol. Nenastavuje se. Odpružení funguje automaticky.



Obrázek 8.5.

8.6 Dvoufázové odpružení zadního kola

Kočárek je vybaven dvěma typy odpružení zadního kola: měkkým odpružením a tvrdým odpružením. Chcete-li změnit typ odpružení zadního kola, otočte páčku tlumení zadního kola o 180 stupňů dopředu nebo dozadu. Tato páčka by měla být nastavena na obou zadních kolech stejně.



Obrázek 8.6.a.



Obrázek 8.6.b.

8.7 Centrální brzda a nášlapová patka (volitelná)

Pro aktivaci centrální brzdý stiskněte brzdový pedál dolů. Obr. 8.7.1 Pro uvolnění centrální brzdý zatáhněte brzdový pedál nahoru.

Aby bylo možné zvednout přední kola nahoru, zatlačte nohou na nášlapnou patku a zároveň zatáhněte za rukojeť, aby jste zvedli kočárek směrem k sobě. Obr. 8.7.2



Obrázek 8.7.1



Obrázek 8.7.2

8.8 Košík na nákupy (umístěný pod kočárkem)

Kočárek je vybaven nákupním košíkem, který je namontován ve spodní části rámu kočárku. Nákupní košík slouží k přepravě malých, běžných průmyslových předmětů každodenního života, odolných proti nárazům, potlučení, namočení a znečištění. Maximální zatížení nákupního košíku je 3 kg.



Obrázek 8.8.

8.9 Rámové háky pro sedadlo

Dva rámové zámky pro sedací část, jsou velmi důležitými prvky konstrukce kočárku. Slouží k připojení sedací části k rámu kočárku. Správné používání zámků je důležité pro bezpečnost dítěte a dalších osob. Podrobný popis správného použití zámků naleznete v popisu montáže a demontáže kočárku. Vždy věnujte zvláštní pozornost jakýmkoli trhlinám či poškození zámků a jejich správnému fungování. V případě podezření nepoužívejte zdravotní kočárek, protože je to nebezpečné pro dítě a osoby, které ho používají!



Rysunek 8.9.

8.10 Transportní pojistka

Kočárek je vybaven transportní pojistkou, která slouží k zajištění složeného (zabaleného) rámu proti jeho samovolnému otevření během přepravy. Transportní pojistka by měla být nasazena při sklápění rámu a při sestavování rámu se musí uvolnit. Nerozevírejte rám kočárku, pokud je pojistka zajištěna, mohl by se poškodit.



Obrázek 8.10

8.11 Rukojeť pro přenos

Rukojeť pro nesení rámu kočárku se nachází mezi upevňovacími prvky košíku pro nákupy.



Obrázek 8.11.

8.12 Skládací mechanismus rámu

Čtyři skládací mechanismy rámu jsou velmi důležitými prvky konstrukce kočárku. Skládají se ze dvou spodních mechanismů (velké rukojeti) a dvou horních mechanismů (menší rukojeti a červeného tlačítka). Správné používání sklápěcího mechanismu je důležité pro bezpečnost dítěte a dalších osob. Podrobný popis správného použití sklápěcího mechanismu rámu je uveden v popisu sestavení a demontáže kočárku.

Vždy věnujte zvláštní pozornost výskytu trhlin, poškození mechanismu sklápění rámu a jeho správnému fungování. V případě podezření nepoužívejte kočárek, protože je to nebezpečné pro dítě a ostatní osoby, které ho používají!



Obrázek 8.12.

8.13 Regulovatelná sedací část

Vozíkočárek je vybaven sedadlem, které lze nastavit ve 4 různých polohách naklopení (kolébka). Za účelem změny sklonu sedadla zatáhněte ocelovou rukojeť umístěnou na zadní straně sedadla a pomalu změňte sklon sedadla. Po nastavení sedadla do požadované polohy uvolněte rukojeť.

POZOR! Jakákoli změna sklonu sedadla změní celkové těžiště. Toto může mít vliv na stabilitu vozíku.

POZOR! Veškeré nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno BEZ DÍTĚTE, umístěného v kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může mít za následek vážné ohrožení dítěte.



Rysunek 8.13.

8.14 Nastavitelné opěradlo

Kočárek je vybaven opěradlem, které může být nastaveno v různých polohách naklonění: z polohy sezení do polohy k ležení. Aby bylo možné změnit sklon opěradla, měly by být nastaveno celé opěradlo mírně směrem k sedadlu. Pak zatáhněte za rukojeť na zadní straně opěradla nahoru a pomalu změňte sklon opěradla. Po umístění opěradla do správné polohy spusťte držák umístěný na zadní straně opěradla směrem dolů.

POZOR! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje změnu délky pětibodových pásů!

POZOR! Veškeré nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno **BEZ DÍTĚTE**, umístěného v kočárku! **Nedodržení výše uvedených varování může mít za následek vážné ohrožení dítěte.**



Obrázek 8.14

8.15 Upevnění stolíku nebo hrazdy

K upevnění stolíku nebo hrazdy slouží dva plastové upevňovací prvky umístěné na vnějších stranách sedadla. Prvky slouží k připojení stolíku nebo hrazdy se sedadlem.



Rysunek 8.15.

8.16 Protiskluzový terapeutický stolík (místo bezpečnostní hrazdy)

Kočárek je vybaven protiskluzovým terapeutickým stolíkem, jehož maximální nosnost je 3 kg.

Montáž stolíku provedeme vložení do zámků pro upevnění stolíku nebo hrazdy, dokud neklapne. Stolík bude správně namontován tehdy, pokud je řádně zasunut do zámků pro stolík ,nebo hrazdu. Důkazem toho je jasné cvaknutí , které vychází ze zámků pro stolík,nebo hrazdu. Pokud chcete stolík demontovat, stiskněte dvě tlačítka na zámcích a vytáhněte stolík ven.



Obrázek 8.16.

8.17 Bezpečnostní hrazda (místo stolíku)

Aby bylo možné bezpečnostní hrazdu namontovat, zasuňte ji do zámků pro upevnění stolíku, nebo zábradlí, dokud neklapne.

Hrazda bude řádně namontována pouze tehdy, když je správně vložena do zámků pro upevnění stolíku, nebo zábradlí. Důkazem toho je jasné "cvaknutí" které vychází ze zámků pro upevnění stolíku,nebo hrazdy.

Pokud chcete hrazdu demontovat, stiskněte dvě tlačítka na zámcích a vytáhněte ji ven.



Obrázek 8.17.

8.18 Pětibodové pásy

Aby bylo možné zapnutí pětibodových pásů, mělo by být mít dítě pásy přes levé i pravé rameno. Poté zasuňte obě vzpěry do spony pásu.

Chcete-li nastavit délku pásů, posuňte nastavovače na pásech nahoru nebo dolů a zakryjte je chrániči. POZOR! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje změnu délky pětibodových pásů!

POZOR! Veškerá nastavení kočárku a jeho součástí musí být provedeno BEZ DÍTĚTE, v kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může způsobit vážné nebezpečí pro dítě, které je používá!



Obrázek 8.18.a.



Obrázek 8.18.b.

8.19 Stabilizační kalhotky

Aby jste upevnili stabilizační kalhotky, obepněte nohu dítěte a upevněte sponu k popruhu na boku sedadla..



Rysunek 8.19.

8.20 Klín

Kočárek je vybaven klínem, který by měl být po umístění dítěte do kočárku umístěn mezi jeho nohy.



Obrázek 8.20.

8.21 Hlavové peloty s regulací ↔ nebo ↕


Aby bylo možné nastavit opěrku hlavy, musí být odepnuty uzávěry čalounění na přední i zadní straně opěradla. Poté uvolníte a vyjměte knoflíky (knoflíky z peloty), které jsou umístěny na zadní straně opěradla. Peloty umístíte do vhodné a bezpečné polohy pro dítě na přední straně opěradla. Knoflíky vzadu dobře dotáhněte. Nakonec uzavřete závěry čalounění na přední a zadní straně opěradla.

8.22 Prsní a bederní peloty s regulací ↔ nebo ↕

Pro nastavení pelot musí být odepnuty uzávěry čalounění na přední i zadní straně opěradla. Poté uvolníte a vyjměte knoflíky (knoflíky z peloty), které jsou umístěny na zadní straně opěradla. Peloty umístíte do vhodné a bezpečné polohy pro dítě na přední straně opěradla. Knoflíky vzadu dobře dotáhněte. Nakonec uzavřete závěry čalounění na přední a zadní straně opěradla.



Obrázek 8.21.a.

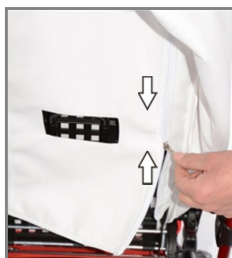

Obrázek 8.21.b.



Obrázek 8.21.c.



Obrázek 8.21.d.

8.23 Nastavitelná stříška s okýnkem

Aby bylo možné roztáhnout nebo složit stříšku s okýnkem, měla by se stříška nastavit do vhodné polohy a umístit do správného úhlu.

Okýnko se otevře a zavře uzávěrem zipu.



Obrázek 8.23.

8.24 Reulovatelná podnožka

Chcete-li změnit sklon podnožky, stiskněte tlačítka označená na obrázku na obou stranách podnožky, poté nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka.

Chcete-li změnit výšku podnožky, odšroubujte šroubky vyznačené na obrázku, pak nastavte opěrku nohou do příslušné výšky a šroubky zašroubujte.

Podnožka je vybavena popruhy, pro uchycení nohou dítěte. Doporučuje se nasadit při používání kočárku.



Obrázek 8.24.a.



Obrázek 8.24.b.

8.25 Nánožník

Aby bylo možné nánožník nasadit, nasadte jej na opěrku nohou ze spodní strany a zapněte ho kolem bezpečnostní hrazdy shora a zapněte jej zipem...

Obrázek 8.25.



8.26 Slunečník

Držák slunečníku připevněte k rámu vozíku a do držáku zasuňte slunečník.

Obrázek 8.26.



8.27 Velká taška (umístěná na rukojeti pro tlačení)

Velká taška je upevněna na dvou háčcích, umístěných na vnitřní straně rukojeti pro tlačení kočárku. Maximální zatížení je 2 kg.

Obrázek 8.27.



8.28 Zimní rukavice

Na rukojeť lze umístit zimní rukavice, pro obsluhu kočárku.

Obrázek 8.28.



8.29 Moskitiéra (místo pláštěnky)

Pro nasazení sítě proti komárům, ji připevněte pomocí zipu na spodní straně stříšky a přetáhněte moskytiéru přes sedadlo kočárku.

Obrázek 8.29.



8.30 Pláštěnka (místo moskitiéry)

Pro nasazení pláštěnky, ji připevněte pomocí zipu na spodní straně stříšky a přetáhněte pláštěnku přes sedadlo kočárku.

Obrázek 8.30.



9 Použití

9.1 Příprava dítěte /uživatele kočárku.

9.1.1 Před použitím kočárku se ujistěte, že je dětská obuv pohodlná a dobře stabilizuje kotník.

9.1.2 Před použitím kočárku se ujistěte, že dítě není umístěno v kočárku bez oděvu chránícího tělo před kontaktem s potahem vozíku. Tím se zabrání tření těla dítěte s potahem.

9.1.3 Pokud používáte jakékoli další pomůcky, jako jsou katetry, odtoky, sáčky, sondy atd., ujistěte se, že jsou dobře chráněny před pádem, vytažením, utahením a nepřekážejí v používání kočárku.

9.2 Návod k použití kočárku

9.2.1 Chcete-li začít správně používat kočárek, musíte provést tyto následující kroky:

9.2.1.1 Zkontrolujte technický stav kočárku a všech jeho součástí.

POZOR ! Pokud je technický stav kočárku nebo některého technického prvku špatný, nebo pokud má uživatel nějaké pochybnosti, nepoužívejte kočárek, protože je to nebezpečné pro dítě a osoby, které ho používají!

9.2.1.2 Umístěte kočárek na rovný a bezpečný povrch. Správně sestavte kočárek, viz návod.

9.2.1.3 Provedte všechny úpravy na kočárku (viz popis kočárku): nastavte polohu sedadla a opěradla, peloty opěrky hlavy, bederních pelot , podnožky, rukojeti, stříšky s okýnem a nastavte odpovídající délku pětibodových pásů a odpružení zadních kol kočárku.

9.2.1.4 Odstraňte hrazdu a protiskluzový terapeutický stůl.

9.2.1.5 Připravte si pětibodové pásy, stabilizační kalhoty a pásky na podnožce.

9.2.1.6 Zajistěte centrální brzdu.

9.2.1.7 Usadte dítě do kočárku a ujistěte se, že všechny dříve provedené úpravy jsou pro dítě vhodné a bezpečné.

9.2.1.8 Zajistěte dítě pětibodovými pásy, stabilizačními kalhotami a opasky na opěrce nohou.

9.2.1.9 Nainstalujte bezpečnostní hrazdu nebo protiskluzový terapeutický stůl a další potřebné vybavení.

9.2.2 Pro děti, které mají problémy s močením, položte na sedadlo kočárku speciální podložku, kterou si můžete zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách.

9.2.3 Během používání musí být kočárek vždy držen za rukojeť, aby se zabránilo samovolnému poježdění kočárku.

9.2.4 Při stoupání do kopců nebo na rampách vždy umístěte vozík ve směru jízdy.

9.2.5 Pokud překonáváte malé překážky (malé schody, malé obrubníky atd.), Zatlačte na rukojeť, aby se kočárek přitlačil dolů k zemi, a tím se zvedly přední kola kočárku a opatrně najedte předními koly přes překážku. Pak zatáhněte za rukojeť, aby se kočárek nadzvedl směrem vzhůru, tak aby se zvedla zadní kola kočárku a opatrně přejeďte zadními koly přes překážku.

10 Čištění a konzervace

10.1 Malé zašpinění a skvrny lze odstranit z povrchu pomocí kuchyňské houby a čisté teplé vody.

10.2 Skvrny by měly být odstraněny ihned po vytvoření na povrchu kočárku.

10.3 Nestírejte - stítání bude mít za následek rozšíření skvrny na ještě větší povrch a můžete narušit strukturu tkaniny.

10.4 Odstranění skvrn, jako jsou skvrny od potravin, zeleniny a rostlinného oleje, je následující: Skvrnu vysušte tak, že po celé ploše rozestřete bílý papírový ručník, kapesník nebo savý, čistý hadřík.

10.4.1 Navlhčete malý kus látky slabým roztokem saponátu s horkou vodou (nebo studenou vodou v případě krevních skvrn) a opláchněte skvrnu tak, že ji odstraníte zvenčí, abyste se vyhnuli jejímu zvětšení.

10.4.2 Nepoužívejte příliš vlhký hadřík, protože nadměrné množství kapaliny může způsobit zvětšení skvrny a poškození čalounění nebo materiálů uvnitř.

10.4.3 Může být nezbytné opakovat výše uvedený postup (10.4.2.) V závislosti na typu skvrny a množství obarveného materiálu. Opakujte výše uvedený postup, dokud nebude skvrna zcela odstraněna, ale vždy nezapomeňte odstranit přebytečnou vlhkost (10.4.1.)

10.4.4 Poté opláchněte materiál pouze vlažnou vodou bez saponátu pomocí čisté houby nebo čisté bílé látky. Jak je uvedeno výše, opláchněte materiál na místě správným směrem, tj. Zvenčí dovnitř.

10.5 Dezinfekční prostředky neobsahující žádná organická rozpouštědla mohou být používány v souladu s pokyny výrobce výrobku.

10.6 Tkaninu nenamáčejte.

10.7 Nepoužívejte organická rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.

10.8 Pro dezinfekci použijte malé množství běžného bělicího prostředku pro domácnost ředěného vodou s maximální koncentrací 3% bělidla.

10.9 Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý.

10.10 Kočárek musí být skladován v čistém, suchém a dobře větraném prostoru.

10.11 Pozor! Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků.

11 Pravidelné kontroly

K bezpečnému a bezproblémovému používání kočárku Mewa by měl být pravidelně a důkladně kontrolován následujícími kontrolami a servisem. V případě, kdy uživatel kočárku není schopen provádět výše uvedené úkony sám, musí předat kočárek odbornému servisnímu místu nebo přímo výrobcí, který bude řádně kontrolovat a provádět nezbytné údržbové činnosti (tyto činnosti mohou být dodatečně hrazeny).

Veškeré opravy by měly být prováděny ve specializovaných místech s použitím originálních náhradních dílů.

Servisní činnosti - periodické:

KDY ?	POPIS	POZNÁMKY
Před použitím vozíku	Kontrola účinnosti brzdy	po zajištění brzdy/pro zadní kola/soustava kol- musí být zablokována a neumožňovat otočení kol.
	Kontrola upevnění konstrukčních prvků	Věnujte pozornost zejména: sestavě kol, upevnění sedadla k rámu, upevnění bezpečnostních pásů, bezpečnostní hrazdy a upevnění podnožky.
	Kontrola stavu pneumatik a tlaku v pneumatikách	Zkontrolujte, zda pneumatiky nejsou poškozené, ztuhlělé a zda mají správný tlak. (platí pro nafukovací kola)
	Kontrola poškození rámu	Rám by měl být vizuálně zkontrolován zda není prasklý či jinak poškozený.

Měsíčně		
	Provedeme očištění Pohyblivých částí ložisek a Mechanismů od hrubých nečistot a ošetříme několika kapkami lehkého oleje.	Dbáme na to aby nedošlo ke znečištění čalounění.
	Zkontrolujte upevnění všech šroubových spojů	Všechny šroubové spoje musí být řádně dotaženy.
Jednou za ½ roku		
	Zkontrolujte čistotu čalounění.	Nedopusťte, aby došlo k zanedbání kočárku, viz bod 10
	Kontrola celkového stavu kočárku	Nedopusťte, aby došlo k zanedbání kočárku, viz bod 10

12 Technická data kočárku MEWA

PARAMETRY	MEWA
Délka kočárku	114 cm
Šířka kočárku	67 cm
Výška kočárku	112 cm
Šíře sedáku	30 cm
Hloubka sedáku	25 cm
Výška opěradla	63 cm
Vzdálenost podnožky-sedadla	20-30 cm, skoková regulace 2,5 cm
Úhel nastavení sedadla	5, 10, 15, 20 stupňů
Úhel mezi sedadlem a opěradlem	3-80 stopňů, skoková regulace
Velikost kol přední/zadní	25cmx5cm/30cmx6cm
Max tlak kol přední/zadní	0,8 bar (nafukovací)

12.1 Materiálové složení kočárku

Ocel ošetřena hliníkovým práškovým lakem, tkanina 100% polyester použité plasty (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU)

12.2 Váha a rozměry kočárku

Kočárek s příslušenstvím	Šířka	Výška	Délka	Váha
Sestavený k použití	67 cm	112 cm	114 cm	22,5 kg
K transportu, zabalený v krabici	64 cm	86 cm	48 cm	26 kg

Tabulka: Váhy a rozměry

12.3. Parametry uživatele

Maximální váha dítěte	35 kg
Maximální šířka hrudníku	30 cm
Minimální a maximální délka nohou	19 ÷ 31 cm
Minimální délka od zad po lýtko	23 cm
Maximální výška dítěte	125 cm

Tabulka: Parametrů uživatele

12.4 Využití a recyklace

Použitý zdravotní kočárek by měl být předán do recyklačního místa v souladu s předpisy platnými v dané zemi.

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
13 Poznámky:

14 Výrobce:

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna
ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
www.mywam.pl
e-mail: mywam@mywam.pl

Kočárek Mewa je polským výrobkem. **Polská kvalita, polská cena!**

Autorizovaný prodejce:



MyWam sp.j. si vyhrazuje právo provádět technické a obchodní změny v návodu k použití a údržbě bez předchozího upozornění.
Každá změna bude určena datem poslední aktualizace.

Vydáno červenec 2016.



MYWAM Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna
ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
tel. 0048 32 733 11 31
mywam@mywam.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wytwórcza: <i>Manufacturer:</i>	MYWAM Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
Produkt: <i>Product:</i>	Wózek inwalidzki specjalny MEWA Specialist Stroller MEWA

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wózek inwalidzki specjalny Mewa, będący wyrobem medycznym klasy I, jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady Europy o wyrobach medycznych - 93/42/EEC z 14 czerwca 1993 roku zmienionej przez 2007/47/EEC z 21 marca 2010 roku, przyjętej w Polsce na mocy ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679), oraz zgodny z normami zharmonizowanymi:

I solely declare that the specialist Stroller Mewa is a class I device, and it is in conformity with the requirements of EU Council Directive for Medical Devices 93/42/EEC of 14 June 1993 amended by 2007/47/EEC of 21 March 2010, implemented in Poland under the Medical Devices Act of 20 May 2010 (Dz. U. nr 107, poz. 679), and is in conformity with harmonized standards:

PN-EN 12183:2014	PN-EN 12182:2012	PN-ISO 7176 part 8	ISO 7176 part 1,3,5,7
PN-EN 1021-1:2007	PN-EN 980:2010	PN-EN 1041:2010	PN-EN ISO 14971:2011



Chorzów, 22 czerwiec 2016r. / 22 June 2016

Data/Date

Wojciech Bartold
Wojciech Bartold
.....wspólnik..

Podpis/Signature
MyWam

Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna
41-516 Chorzów, ul. Szczecińska 10
www.mywam.pl
tel. 32 733 11 31, mail: mywam@mywam.pl
NIP: 627 273 67 93, REGON: 243428050
KRS: 0000487471



ZÁRUČNÍ LIST

Série a číslo: AG

datum nákupu

razítko a podpis prodejce:

Záruční podmínky

1. Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený vozík po dobu 24 měsíců od data nákupu.
2. Vady odhalené během tohoto období budou odstraněny bezplatně.
3. Kupující reklamující kočárek, by měl kočárek předat prodávajícímu nebo výrobcí v původním výrobním balení spolu s dalšími prvky kočárku a zabezpečené proti poškození.
4. Škody způsobené nedostatečným zajištěním při přepravě kočárku a jeho součástí nepodléhají záručním opravám.
5. Reklamující nemůže požadovat reklamaci, pokud nesprávně označí nebo nesprávně zajistí dodání kočárku a jeho součástí.
6. Náklady na zaslání reklamovaného kočárku prodávajícímu nebo výrobcí nese reklamující.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku.
8. Činnosti uvedené v pokynech, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady, nelze provádět v rámci záruční opravy.
9. Kupující má právo vyměnit reklamovaný kočárek za nový, pokud:
 - 9.1 Vykazuje poškození nebo závady, které již byly odstraněny dvakrát a které brání používání kočárku a jsou stále stejné.
10. Použití kočárku by mělo být prováděno v souladu s tímto návodem k obsluze.
11. Použití kočárku v rozporu s jeho účelem, nikoli v souladu s tímto návodem k obsluze, nebo v rozporu s pravidly řádného používání, ruší platnost záruky.
12. Provedením jakýchkoliv konstrukčních změn na vozíku dojde ke ztrátě záruky.

13. Na poškození zdravotního kočárku v důsledku: nesprávného použití, neodborné údržby, nesprávného skladování kočárku, mechanického poškození a přirozeného otěru a opotřebení dílů (např. Čalounění, kol) se nevztahuje záruka. Jejich oprava probíhá na náklady uživatele.
14. Výrobce varuje před záručními opravami v neautorizovaných servisních střediscích. Takovéto opravy nebo neoprávněné úpravy kočárku způsobí ztrátu záruky.
15. Záruční list je platný za předpokladu, že: obsahuje datum prodeje, potvrzený razítkem a podpisem prodávajícího, typ a výrobní číslo kočárku.
16. Záruční list je platný, pokud neobsahuje žádné přepisy nebo opravy.
17. Výrobce kočárku provozuje placený pozáruční servis.
18. Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, platí ustanovení občanského zákoníku.
19. Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku, kontaktujte prosím prodávajícího nebo přímo u výrobce.