

NÁVOD K POUŽITÍ

Koupelnová a vanová židle

(Shower & Bathtub Chair)

- **Kódy výrobků:**
- 0806064 / 0806505 / 0806065

Určené použití (Intended Use)

Koupelnová židle je navržena tak, aby umožnila osobám s omezenou pohyblivostí provádět osobní hygienu vsedě. Použití židle snižuje svalovou únavu způsobenou dlouhodobým stáním a minimalizuje riziko uklouznutí a úrazu. Výrobek lze používat **uvnitř i vně vany** nebo **ve sprchovém koutě**.

Vlastnosti (Specifications)

- Nastavitelná výška (pro modely **0806064** a **0806505**)

Rozměry (Dimensions)

Kód 0806064 (s opěrkou zad)

- Šířka sedáku: 36 cm
- Hloubka sedáku: 37 cm
- Výška sedáku: 50,5 cm / 30,5 cm
- Nastavitelná výška: 34–52 cm
- Nosnost: 100 kg

Kód 0806505

- Šířka sedáku: 51 cm
- Hloubka sedáku: 31 cm
- Nastavitelná výška: 42–52 cm
- Nosnost: 100 kg

Kód 0806065 (sedátko do vany)

- Šířka: 40 cm
- Hloubka: 21 cm
- Délka: 74 cm
- Nosnost: 75 kg

Montáž (Assembling)

www.eldomed.cz

Výrobek je dodáván **sestavený a připravený k použití**.

V některých případech může být nutné připevnit opěrku zad nebo kovové nohy.

Údržba a čištění (Maintenance & Cleaning)

- Pravidelně čistěte všechny části židle.
- Používejte **vlhký hadřík a jemné mýdlo**.
- Po čištění výrobek důkladně osušte.
- V případě nutnosti dezinfekce použijte **běžný jemný dezinfekční prostředek**.

Důležité upozornění (IMPORTANT!)

Před použitím se ujistěte, že:

- židle je správně sestavena,
- všechny nohy pevně dosedají na podlahu nebo na vanu.

Varování (WARNING)

Pokud se vyskytne jakýkoli problém, **židli nepoužívejte**, dokud nebude závada odstraněna.

Další pokyny (Further Instructions)

- Umístěte židli na rovný povrch a zkontrolujte její stabilitu.
- V případě potřeby upravte výšku nohou.
- Usadte uživatele na židli.
- Před zahájením koupání se ujistěte, že je židle stabilní a nekýve se.
- **Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru.**

Ochrana životního prostředí (Environmental Protection)

Pokud výrobek doslouží:

1. Nevyhazujte jej do komunálního odpadu.
2. Kontaktujte místní úřady ohledně recyklace.
3. Správnou likvidací přispíváte k ochraně životního prostředí a opětovnému využití materiálů.

Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity)

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že uvedené zdravotnické prostředky jsou **zdravotnické prostředky třídy I (nízké riziko)** a splňují požadavky **Nařízení (EU) 2017/745 (MDR)** a souvisejících harmonizovaných norem.

www.eldomed.cz

Hlášení incidentů (Incident Reporting)

Jakýkoli závažný incident vzniklý v souvislosti s používáním výrobku musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště.

Záruka (Warranty)

- Záruka: **1 rok od data nákupu**
- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
- Nevztahuje se na poškození způsobená nesprávným použitím, úpravami, zan

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΜΒΟΛΑ
ANNEX A. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and/or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι καταστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Υψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive