

UŽIVATELSKÝ MANUÁL /USER MANUAL

REF: 0803124

PODSEDÁK "SILICONE I" (50x45x5.5)

CUSHION "SILICONE I" (50x45x5.5)

REF: 0803125

PODSEDÁK "SILICONE II" (45x40x5.5))

CUSHION "SILICONE II" (45x40x5.5)




CE

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Antidekubitní podsedáky byly navrženy tak, aby snižovaly riziko vzniku dekubitů. Mohou být použity pro handicapované a starší osoby, které dlouhodobě používají invalidní vozík nebo musejí často a dlouho sedět. Může být také použit pro uživatele, kteří nemají žádné příznaky a chtějí mít více pohodlí ve svém každodenním životě. Antidekubitní podsedák by měli používat pouze uživatelé s určitou pohyblivostí. Antidekubitní podsedák může používat i sám uživatel. Při sezení na podsedáku je důležité, aby uživatel vstal nebo byl zvednut co nejvícekrát, aby se omezilo trvalé stlačování pánve.

FUNKCE:

- Ergonomický design
- Nabízí vysoký komfort a stabilitu uživateli
- Lehký a snadno přenosný
- Prodyšný material
- Nabízí snížení vlhkosti a hromadění tepla
- Vnější potah na zip, snímatelný a prateľný
- Antimikrobiální vlastnosti
- Vlastnosti zpomalující hoření

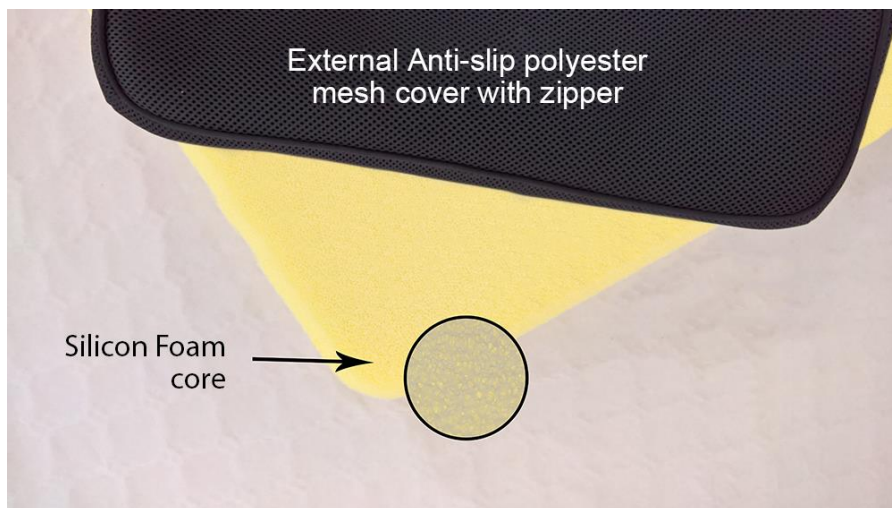

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:

Podsedák

- nelze prát v pračce, ale lze jej ručně prát a dezinfikovat vodou do 95 °C pro optimální hygienu.
- Pěnový vnitřek polštáře může po tomto procesu nějakou dobu trvat, než přirozeně vyschne.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiná rozpouštědla.
- Neperte jej v pračce.Nepoužívejte parní čistič.Nepoužívejte bělidlo
- Nežehlit.Nepoužívejte chemické čištění.

Potah

- Vnější potah polštáře je snímatelný a lze jej prát v pračce na 71°C.
- Při praní potahu v pračce musí být zip zapnutý.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Nepoužívejte bělidlo.
- Nežehlit.Nepoužívejte chemické čištění.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MBK KOD	POPIS	WITH	ROZMĚRY	MAX NOSNOST
0803124	PODSEDÁK "SILICONE I" (50x45x5.5)	VNITŘNÍ JÁDRO ZE SILIKONOVÉ PĚNY	50 x 45 x 5.5cm	120 Kg
0803125	PODSEDÁK "SILICONE II" (45x40x5.5)	VNITŘNÍ JÁDRO ZE SILIKONOVÉ PĚNY	45 x 40 x 5.5cm	120 Kg

UPOZORNĚNÍ(!)

- V blízkosti polštáře nekuřte a nepoužívejte žádný plamen
- Nevystavujte polštář přímému teplu.
- Výrobek čistěte a chraňte před poškrábáním, proříznutím a proražením.
- Vždy zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu bez známek opotřebení. V případě poškození nebo závady se prosím obraťte na svého autorizovaného a vyškoleného prodejce.
- Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu
- MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu nebo jiného použití, než je uvedeno v této příručce.
- MOBIAK S.A si vyhrazuje právo provádět změny na zařízení a informacích obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění

SKLADOVÁNÍ

Podsadák je nutné skladovat v suchém a čistém prostředí při teplotě 0 - 40°C.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Pokud váš produkt potřebuje výměnu nebo vám již neslouží, nelikvidujte svůj výrobek společně s komunálním odpadem (to je také důležité pro uvedený symbol recyklace). Obráťte se na obecní úřad a uveďte místo likvidace vašeho produktu k recyklaci..

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Neseme výhradní odpovědnost za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně normy a právní předpisy, na které se zde odkazuje.

ZÁRUKA:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEPOKRÝVÁ škody způsobené nesprávným použitím, špatnou údržbou, úpravou, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k použití výrobku. Rovněž NEPOKRÝVÁ součásti, které se mohou během používání nebo v průběhu času opotřebovat, jako je čalounění, kola nebo brzdy.

Na škody nebo vady způsobené přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou nebo opravou, a na problémy s napájecím zdrojem (pokud je použit) se záruka nevztahuje.

Není zahrnut žádný servis nebo náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem výrobku. Převážné náklady na

Údaje o kupujícím

Jméno:.....

Datum nákupu:Výrobní č.

ŠARŽE:.....Telefon:.....

Údaje o prodejci

Název:

Adresa:.....

Telefon:

Razítko prodejce



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΠΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Popis symbolů, které byly vytištěny na štítku, kartonovém obale nebo v návodu k použití
Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Zdravotnický prostředek
Medical Device



Označení CE
Production Date



Výrobce
Manufacturer



Datum výroby
Production Date



Číslo výrobku
Product Number



Přečtěte si návod k použití
Read the instruction for use



Sériové číslo
Serial Number



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
Do not use if Package is Damage



Číslo šarže
Batch Number



Touto stranou nahoru
Right Way Up



Jedinečná identifikace výrobku
Unique Device Identification



Chraňte před slunečním světlem
Keep away from sunlight



Uchovávejte v suchu
Keep Dry



Výška stohování
Stacking Height



Zacházejte opatrně
Handle With Care



Křehké
Fragil



Pouze pro vnitřní použití
In Door Use Only



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive