

Gratulujeme k vašemu novému předloketnímu chodítku TOPRO

Každý produkt TOPRO je vyvinut, navržen a vyroben v Norsku. Produkt splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745. Je testován a schválen dle normy EN ISO 11199-3:2005. Při příjmu zboží si svůj produkt zkontrolujte. Pokud máte jakékoli dotazy, ihned kontaktujte váš obchod nebo dodavatele kompenzačních pomůcek pro mobilitu. Pokud máte problémy se čtením této uživatelské příručky, je k dispozici elektronická verze na stránkách topromobility.com.

Zamýšlené použití

TOPRO Taurus H je předloketní chodítko, které poskytuje podporu uživatelům s narušenou rovnováhou a/nebo omezenou schopností chůze. Předloketní chodítko je navrženo k tlačení, ne tahání. Zamýšleným uživatelem je dospělý. Platí omezení výšky a hmotnosti. Hlavním uživatelem produktu je samotný pacient. S chodítkem však může pracovat i pomocník.

Kontraindikace: Produkt není vhodný pro osoby s nízkou silou paží a dolních končetin, s velmi špatnou rovnováhou nebo významným kognitivním deficitem. Produkt je navržen a schválen k interiérovému použití na rovném povrchu. Při použití pomůcky TOPRO Taurus v domácím prostředí s úzkými dveřmi doporučujeme postupovat opatrně, protože maximální šířka chodítka je 660 mm.

Doporučujeme zaškolení profesionálním pracovníkem, abyste se dobře seznámili s předloketním chodítkem a zjistili, jak jej správně používat.

Šedé číslované kroužky v této uživatelské příručce označují číslovaný informační grafický prvek a ilustrace v přebalu

1 Seznamte se s produktem TOPRO

- A** Předloketní opěrka
- B** Uvolňovací páčka pro nastavení výšky
- C** Páčka pro nastavení předloketní opěrky
- D** Přední kolečka
- E** Zadní kolečka
- F** Nožní brzdy
- G** Rukojeti (Basic – základní)
- H** Nastavitelné rukojeti (Premium)
- I** Ruční brzda (Premium)
- J** Brzdový kabel (Premium)
- K** Pojistné kolečko pro rukojeť (Premium)
- L** Směrový zámek (Premium)
- M** Štítek produktu

2 Bezpečnost !

Správné podpory a bezpečnosti dosáhnete přímou chůzí a udržováním chodítka co nejblíže k tělu (A). Jděte mezi zadními kolečky (B), ne za nimi (C).

Netlačte chodítko vpřed, pokud se přední kolečka zastavila o překážku. Chodítko se může naklonit a hrozí nehoda.

Nepoužívejte chodítko na schodech. Dávejte pozor při překonávání prahů atd.

Nezapomínejte, že některé díly chodítka mohou být horké nebo studené, když je vystavíte extrémním teplotám.

Nedávejte prsty do otevřených otvorů ani mezi stacionární díly.

Před každým použitím zkontrolujte brzdy.

Neupravujte produkt, jelikož by to mohlo být spojeno s bezpečnostními riziky a záruka tím pozbude platnosti.

Když je chodítko nehybné nebo zaparkované, zkontrolujte, zda jsou parkovací brzdy na obou stranách aktivované.

Nepoužívejte chodítko k přepravě těžkých nákladů ani osob.

Nepoužívejte chodítko na kluzkých površích.

Chraňte chodítko před požárem a horkými předměty.

Nelezte na chodítko ani nenechávejte děti, aby si s ním hrály.

3 Sestavení a úprava

TOPRO Taurus H se dodává se dvěma úrovněmi výbavy:

Basic – základní (814785) Nastavitelné pažní podložky a brzdy na všech kolečkách. Dodávané částečně sestavené. Sestavení: Postupujte dle kroků na obrázku 3.

Premium (814787) Nad rámec základní výbavy obsahuje nastavitelné rukojeti a řídicí a parkovací brzdu na rukojetích. Zadní kolečka mají směrovou aretaci (směrový zámek). Dodávané zcela sestavené.

Před použitím nastavte předloketní opěrky a rukojeti (viz oddíl 4).

4 Nastavení výšky / Předloketní opěrky / Rukojeti

Nastavení výšky: Zatáhněte uvolňovací páčky (A) nahoru. Působením tělesné hmotnosti jemně zatlačte dolů, abyste snížili výšku, nebo váhu odlehčete, abyste výšku zvýšili. V požadované výšce páčky uvolněte.

Doporučená výška: Postavte se s uvolněnými rameny a lokty držte v úhlu 90° (B). Výška předloketních opěrek by měla být v jedné rovině s úrovní vašich loktů. S nastavením předloketních opěrek a rukojetí by vám měl pomoci profesionální pracovník, pomůže vám tím dosáhnout správného držení těla.

Nastavení předloketních opěrek: Předloketní opěrky lze individuálně nastavit. Odšroubujte páčku pod předloketní opěrkou (C), aby bylo možné pohybovat podložkou. Nastavte do požadované pozice a utáhněte šroub. *Pozn.: Pokud páčka vyčnívá, může být nebezpečná. Zatáhněte ji dolů a otočte tak, aby byla bezpečně skryta.*

Nastavení rukojetí (TOPRO Taurus H Premium): Odšroubujte pojistné kolečko (D). Potáhněte rukojeť (E) dozadu nebo ji zatlačte dopředu a nakloňte do požadovaného úhlu (F). Po nastavení rukojeti utáhněte pojistné kolečko (D). Dávejte pozor, abyste si při tom neporanili prsty.

5 Nožní brzdy / Směrový zámek

TOPRO Taurus H Basic – všechna kolečka / TOPRO Taurus H Premium – přední kolečka:

Sešlápněte nožní brzdy na zadních kolečkách (A), a když je to nutné, také na předních kolečkách (B) – mělo by se ozvat cvaknutí. Kolečka jsou nyní v uzamčené pozici (C). Uvolníte je sešlápnutím horní části pedálu nožní brzdy.

TOPRO Taurus H Premium – zadní kolečka:

Sešlápněte nožní brzdy na zadních kolečkách (A) – mělo by se ozvat cvaknutí. Kolečka jsou nyní v pozici se zablokováním směrováním (E). Sešlápněte nožní brzdy ještě více, dokud se neozve druhé cvaknutí. Kolečka jsou nyní zablokována (F). Uvolníte je sešlápnutím horní části pedálu nožní brzdy (D).

6 Ruční brzdy (Taurus H Premium)

Před každou cestou se ujistěte, že brzdy správně fungují. *Neřídte ani netlačte předloketní chodítko, když jsou aktivní parkovací brzdy nebo když jsou kolečka částečně zajištěna pomocí brzd. To je nesprávné použití a může vést k opotřebení se snížením kvality pneumatik a brzd.*

Parkovací brzdy: Zatlačte obě brzdové páčky vpřed (A) a aktivujte parkovací brzdy.

Nezapomínejte, že páčka klade určitý odpor, než se zastaví a zajistí zadní kolečka. Potáhněte obě brzdové páčky směrem k sobě a uvolněte parkovací brzdy.

Řídicí brzdy: Potažením obou brzdových páček směrem k sobě (B) snížíte rychlost. Systém brzdění používá obě ruce, tzn. brzda se aktivuje na zadním kolečku na stejné straně chodítka jako brzdová páčka. Když aktivujete pouze jednu brzdu, chodítko zatočí při chůzi na stejnou stranu. Uvolněním páčky přestanete brzdít. *Když je chodítko v pohybu, nepoužívejte brzdy nepřetržitě.*

Nastavení/kontrola: Uvolněte matici (C). Utáhněte/uvolněte brzdový kabel pomocí nastavovacího šroubu (D). Ujistěte se, že brzdy fungují správně a dotýkají se koleček pouze při aktivaci. Nastavte brzdy stejně na obou stranách.

Údržba: Pravidelně kontrolujte brzdy podle výše uvedených informací. Nejlepší možné přilnavosti dosáhnete, když pneumatiky otřete vlhkým hadříkem. Kolečka a brzdy lze vyměnit, pokud jsou opotřebené nebo poškozené.

Řešení problémů**Brzdy**

Opotřebené/vadné kolečko	→	Vyměňte celé kolečko
Nebrzdí efektivně	→	Upravte kabely brzd
Opotřebený/vadný mechanismus brzd na kolečku	→	Vyměňte celou část zadního kolečka
Opotřebená/vadná rukojeť brzd	→	Vyměňte kompletní rukojeť brzd
Opotřebený/vadný kabel brzd	→	Vyměňte kabel brzd

Nastavení výšky

Pneumatická pružina je opotřebená nebo poškozená	→	Pneumatickou pružinu vyměňte
Rukojeť pro nastavení výšky je nesprávně seřízená	→	Rukojeť nastavte

Přeprava

Chodítko lze přepravovat ve vertikální nebo horizontální pozici. Nastavte jej do nejnižší výšky, abyste ušetřili místo a ulehčili manipulaci. Ujistěte se, že jsou aktivovány nožní brzdy. Při vkládání chodítka do dopravního prostředku buďte opatrní, zajistěte jej.

Uskladnění

Chodítko je nutné uchovávat v interiéru a ve vzpřímené pozici. Neukládejte na uskladněné chodítko těžké předměty.

Čištění

Chodítko lze mýt hadicí a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte čisticí přípravky určené k drhnutí, parní ani vysokotlaké čisticí přípravky.

Dezinfekce

Dezinfekci musí provádět pouze autorizovaný personál používající dostatečné ochranné vybavení. Povrch chodítka je nutné vyčistit dezinfekčním přípravkem, který obsahuje 70–80 % etanolu. Nedoporučujeme používat dezinfekční přípravky obsahující chlor nebo fenol. *Výrobce nenese odpovědnost za žádné poškození ani poranění, ke kterému může dojít použitím škodlivých dezinfekčních přípravků nebo dezinfekcí provedenou neautorizovaným personálem.*

Kontrola / Údržba / Opětovné použití

Ložiska koleček jsou utěsněna a nevyžadují údržbu. Díly není nutné promazávat. Doporučujeme provádět kontrolu a údržbu pravidelně (frekvence je určena způsobem a četností použití chodítka). Zkontrolujte následující položky: trubky, rám, šrouby, rukojeti, opěrky předloktí, brzdy, kolečka a příslušenství. To platí také pro přípravu chodítka k opětovnému použití. Prostudujte si podrobné pokyny o údržbě brzd a čištění/dezinfekci chodítka v této uživatelské příručce.

Materiál / Recyklace

Chodítko je vyrobeno z plastem potažených hliníkových trubek, plastových spojek, tlačných rukojetí z polyamidu-6 a TPE a předloketních podložek vyrobených z polyuretanu. Většinu dílů lze recyklovat. Zlikvidujte chodítko a jeho balení dle příslušných předpisů ve vaší zemi. Informace vám poskytnou vaše veřejné úřady.

Záruka

Na TOPRO Taurus H poskytujeme záruku na vady a defekty po dobu 2 let. Poškození způsobené nesprávným použitím nebo přirozeným opotřebením dílů (např. brzdy, kolečka a rukojeti) je z dvouleté záruky vyňato. S dotazy na opravy během záručního období se obraťte na místní obchod nebo dodavatele pomůcek pro mobilitu. Záruka zaniká, pokud byly na produktu použity nebo jsou používány neautorizované náhradní díly nebo příslušenství. Očekávaná životnost produktu je odhadována na 10 let při použití správným způsobem dle uživatelské příručky a pokynů pro bezpečnost a údržbu.

7 Štítek produktu

- 1 – Hrubá hmotnost
- 2 – Safe working load
- 3 – Maximální hmotnost uživatele
- 4 – Maximální výška chodítka
- 5 – Maximální šířka chodítka
- 6 – Název modelu
- 7 – Číslo modelu
- 8 – Datum výroby
- 9 – Sériové číslo
- 10 – Globální obchodní číslo položky
- 11 – Označení CE (This product conforms to Medical Device Regulation (EU) 2017/745)

- 12 – GS1 DataMatrix
- 13 – Výrobce
- 14 – Prostudujte si návod k použití
- 15 – Zamýšleno k interiérovému použití
- 16 – Upozornění! – prostudujte si návod k použití
- 17 – Zdravotnický prostředek

Příslušenství

	Č. pol. TOPRO
Jednoruční brzda	814026
Boční opěrka předloktí, pár	814647
Nosič	814810
Malý košík	814821
Nožní deska	814645
Infuzní stojan	814793
Stojan pro vaky na tělní tekutiny	814034
Držák kyslíkové bomby	814820

Příslušenství nainstalované na chodítko může ovlivnit stabilitu; z toho důvodu vám doporučujeme jej používat opatrně. Příslušenství lze objednat samostatně, a přizpůsobit tak předloketní chodítko individuálním potřebám. Kontaktujte váš obchod, dodavatele pomůcek pro mobilitu nebo společnost TOPRO, kde vám poskytnou aktualizovaný přehled dostupného příslušenství, nebo navštivte naše stránky topromobility.com.